

STERISOL Ögondusch

Egenskaper

Sterisol Ögondusch är en steril ögonspolningsprodukt för snabb och effektiv spolning vid ögonskador. Produkten innehåller 1 liter steril isoton koksaltlösning, 0,9 %, och ger ett kontinuerligt och jämnt flöde mot ögat.

En flaska ger cirka 12 minuters spolning. Säkerhetsförseglingen bryts genom ett bestämt slag med handen på det gröna skyddslocket. Flaskan kan tas ur väggfäste eller ställ och användas för kontinuerlig spolning, även under transport till läkare eller fast ögonduschläggning.

Sterisol Ögondusch är CE-märkt och klassad som medicinteknisk produkt, klass 1 steril.

Användningsområde och placering

Sterisol Ögondusch är avsedd för arbetsplatser där det finns risk för att skadliga ämnen, kemikalier, alkaliska ämnen, syror, damm, spån eller smuts kan innebära risk för ögonskador.

Ögonspolning ska finnas i omedelbar närhet av riskfyllda arbetsplatser. Vägen till ögonduschen ska vara fri från hinder, eftersom den skadade själv kan behöva hitta fram med nedsatt syn och smärta i ögonen. Vid hantering av alkaliska eller andra frätande ämnen bör spolningsanordning finnas på armlängds avstånd.



STERISOL Ögondusch

Förp	Art nr	Antal i förp	Antal förp/pall	Antal på pall	EAN-kod	Förp mängd/ liter produkt
1 l Ögondusch refill	4631	10	21	210	7392173046316	-
1 l Ögondusch x 2st i ställ	4635	5	21	105	7392173046354	-
1 l Ögondusch x 5st i väggfäste	4630	2	21	42	7392173046309	-

Innehåll

1 liter steril isoton koksaltlösning (0,9 %). Spoltiden är ca 12 minuter.

Hållbarhet

Ett "används före-datum" finns tydligt skrivet på varje flaska. Efter detta datum ska flaskorna bytas ut, för att Sterisol AB ska garantera att innehållet är lämpligt för ögonspolning.

CE-märkning

Sterisol Ögondusch har märket CE på etiketten. Det innebär att kraven i EU:s direktiv för tillverkning av medicintekniska produkter är uppfyllda. Ögonduschen är kategoriserad i klass 1, steril, och har därför granskats av ett så kallat tredjepartsorgan.

Medicinteknisk produkt

Sterisols kvalitetssystem för tillverkning av medicintekniska produkter överensstämmer med MDR-förordning (Medical Device Regulation EU) 2017/745. MDR ställer höga och tydliga krav på tillverkare för att användare ska få tillgång till säkra och effektiva produkter. Förordningen förtydligar även de skyldigheter som importörer och distributörer har.

Gör så här!

Placera flaskan på en plan yta. Slå hårt och bestämt med handen på det gröna skyddslocket för att bryta säkerhetsförseglingen. Ta bort skyddslocket när det lossnat.

Öppna ögonlocken och spola med huvudet bakåtlutat. Placera flaskan så att spolkoppen hjälper till att hålla ögonlocken öppna. Vätskan ska självrinna mot ögat.

När en flaska har öppnats ska den användas omgående och därefter kastas. Ersätt alltid använd flaska med en öppen flaska. Se till att ha tillräckligt med ersättningsflaskor i lager.



Slå hårt på det gröna skyddslocket.



Ta bort skyddslocket när det har lossnat.



Spola med huvudet bakåtlutat. Spolkoppen hjälper till att hålla ögonlocken öppna.

Tänk på att!

När ett skadligt ämne kommit in i ögat så gäller framför allt tre saker:

- Börja spola omedelbart och fortsätt även under förflyttning till läkare eller fast ögondusch.
- Spola länge. Spoltiden beror på vilket ämne som kommit in i ögat. Låt läkare avgöra när spolningen ska avslutas. Ha därför alltid ett antal extra flaskor i reserv för spolning under transport.
- Kalla snabbt på hjälp. Ofta behövs båda händerna för att hålla isär ögonlocken.

Symbolförklaringar

Etiketten på Sterisol Ögondusch är försedd med de symboler som EU-direktiven föreskriver.



STERILE Steriliserad med ånga eller torr värme.

CE Uppfyller kraven i EU:s direktiv för medicintekniska produkter.

NB2460 Kontrollorganets sifferbeteckning.

⊗ Endast för engångsbruk.

LOT Följs av siffra och betecknar tillverkningsatsens nummer.

MD Medicinteknisk produkt.

⌚ Används före-datum. Anges endast med år och månad. Exempel: 2026-06.

⚙️ Tillverkare.

🌡️ Temperatur som produkter ska förvaras inom.

Kontakt

Vill du veta mer?

För ytterligare information eller teknisk support, besök www.sterisol.se eller kontakta oss direkt.

Sterisol AB | Kronängsgatan 3, 592 30 Vadstena | Tel: 0143-768 68 | info@sterisol.se