

Gebruikershandleiding

Voorgevulde pen met meerdere doses

Elke pen bevat 4 vaste doses, één dosis wordt wekelijks geïnjecteerd.

Mounjaro[®], 2,5 mg/dosis KwikPen[®], oplossing voor injectie in voorgevulde pen
Mounjaro[®], 5 mg/dosis KwikPen[®], oplossing voor injectie in voorgevulde pen
Mounjaro[®], 7,5 mg/dosis KwikPen[®], oplossing voor injectie in voorgevulde pen
Mounjaro[®], 10 mg/dosis KwikPen[®], oplossing voor injectie in voorgevulde pen
Mounjaro[®], 12,5 mg/dosis KwikPen[®], oplossing voor injectie in voorgevulde pen
Mounjaro[®], 15 mg/dosis KwikPen[®], oplossing voor injectie in voorgevulde pen
tirzepatide

Deze gebruikershandleiding bevat informatie over het injecteren met de Mounjaro KwikPen



Belangrijke informatie die u moet weten voordat u met de Mounjaro KwikPen injecteert.

Lees deze gebruikershandleiding en de bijsluiter voordat u start met de injectie met de Mounjaro KwikPen en elke keer wanneer u een andere pen krijgt. Mogelijk is er nieuwe informatie. Deze informatie vervangt niet het gesprek met uw arts, verpleegkundige of apotheker over uw medische aandoening of behandeling.

Mounjaro KwikPen is een wegwerpbare voorgevulde pen met meerdere doses. **De pen bevat 4 vaste doses, om wekelijks één dosis toe te dienen.** Injecteer een enkele injectie per week, onder de huid (subcutaan).


Gooi de pen na 4 doseringen weg, inclusief het ongebruikte medicijn. De pen is zo gemaakt dat u geen volledige dosis meer kunt draaien nadat u uzelf 4 maal de wekelijkse doses heeft gegeven. Injecteer het overgebleven medicijn **niet**. Breng het medicijn niet over van uw pen in een spuit.

Deel uw Mounjaro KwikPen **niet** met anderen, ook niet als een nieuwe naald gebruikt wordt. U kunt hun hiermee een ernstige infectie geven of zelf van hen een ernstige infectie krijgen.

Mensen die blind zijn of problemen hebben met het gezichtsvermogen, mogen de pen niet gebruiken zonder hulp van een persoon die getraind is in het gebruik van de pen.

Handleiding voor onderdelen

Onderdelen van de Mounjaro Kwikpen

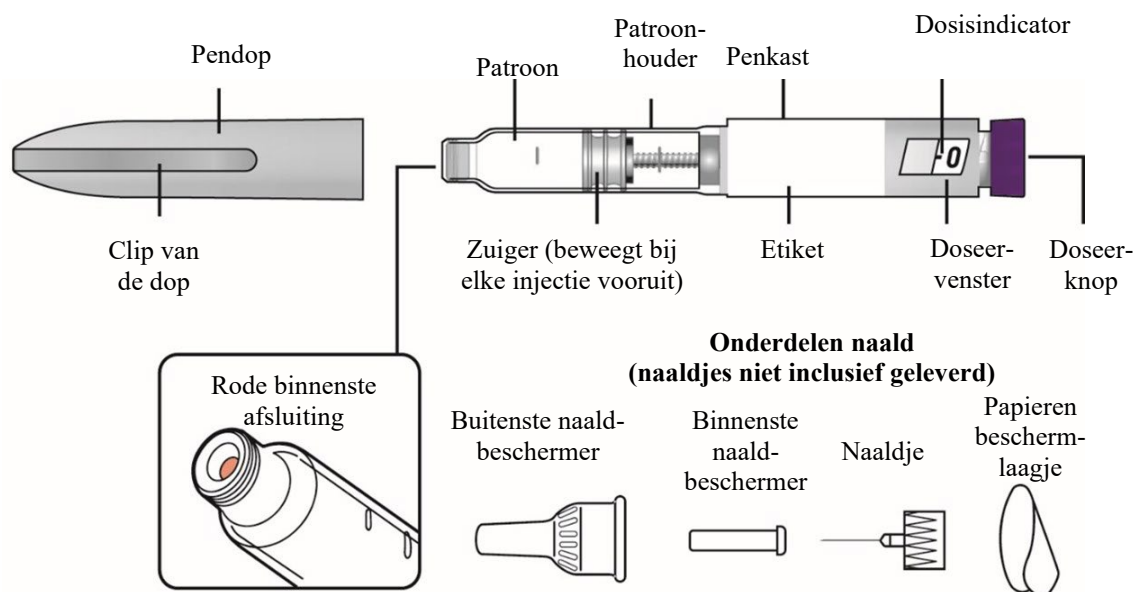


Naaldje geschikt voor de KwikPen (als u niet weet welke pennaald u moet gebruiken, neem dan contact op met uw zorgverlener)

Wat heeft u nodig om uw injectie toe te dienen


- Mounjaro KwikPen
- Naaldje geschikt voor de KwikPen (als u niet weet welke pennaald u moet gebruiken, neem dan contact op met uw zorgverlener)
- Alcoholdoekje en gaasje of wattenbolletje
- Scherpafvalcontainer of huishoudelijke container

Vorbereiden van de injectie met de Mounjaro KwikPen

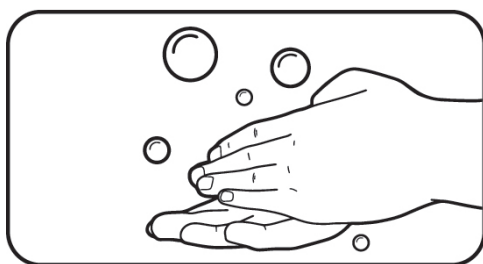


Stap 1:

- Was uw handen met zeep en water.

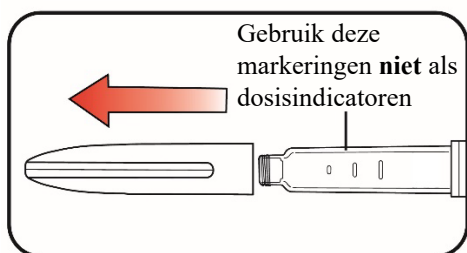


Stap 2 :

- Trek de pendop er recht af.
- Controleer de pen en het etiket. Gebruik de pen **niet** als:
 - de naam van het medicijn of de sterkte van de dosis niet overeenkomt met uw recept.
 - de pen is verlopen (EXP) of er beschadigd uit ziet.
 - het medicijn bevroren is geweest, deeltjes bevat, troebel is of verkleurd is. Mounjaro moet kleurloos tot lichtgeel zijn.

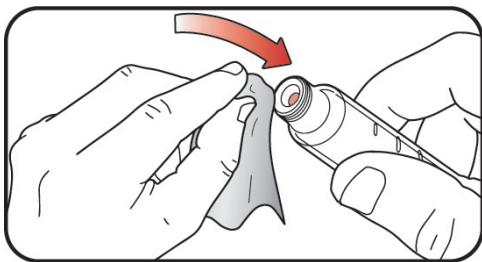


Stap 3:

- Veeg de rode binnenste afsluiting af met een alcoholdoekje.

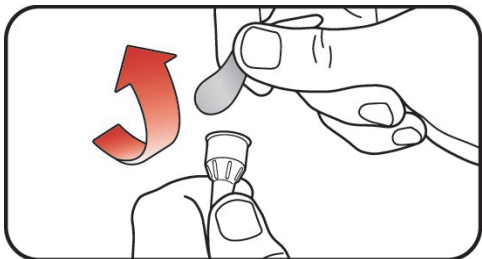


Stap 4:

- **Neem een nieuw naaldje.** Gebruik altijd een nieuwe naald voor elke injectie om infecties en verstopping van de naald te voorkomen.
- Verwijder de papieren beschermlaag van de buitenste naaldbeschermmer.

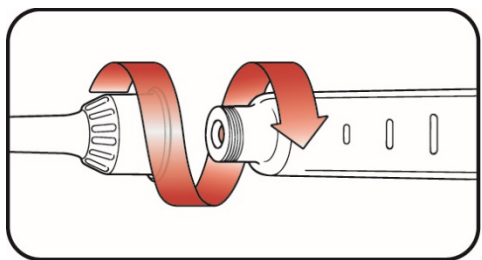


Stap 5:

- Druk het naaldje met de dop recht op de pen en draai het naaldje er stevig op.

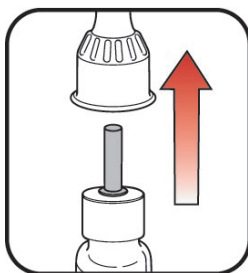


a. Buitenste naaldbeschermmer

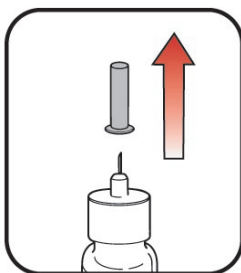

b. Binnenste naaldbeschermmer


Stap 6:

- Haal de buitenste naaldbeschermmer eraf en gooi deze niet weg. U heeft deze straks nog nodig.
- Haal de binnenste naaldbeschermmer er af en gooi deze weg.

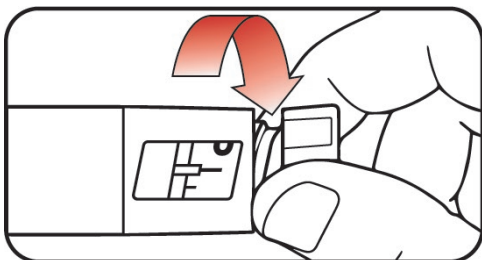


Stap 7:

- Draai de doseerknop langzaam totdat u **2 klikken** hoort en het lange streepje  zichtbaar wordt in het doseervenster. Dit is de positie om uw pen te ontluchten. Dit kan worden gecorrigeerd door de doseerknop in een willekeurige richting te draaien, tot het lange streepje precies naast de dosisindicator staat.

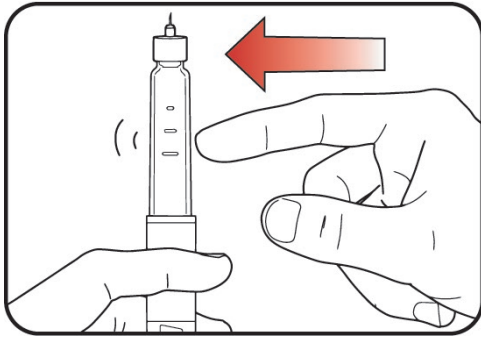

Stap 8:

- Houd de pen rechtop met de naald naar boven.
- Tik voorzichtig tegen de patroonhouder om de luchtbellens bovenin te verzamelen.

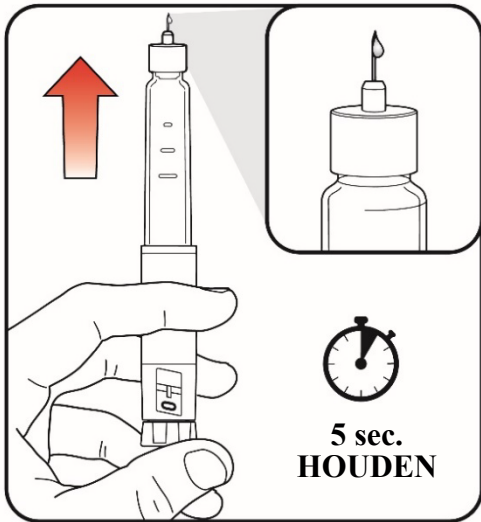


Stap 9:

- Spuit een beetje medicijn in de lucht door de **doseerknop in te drukken** totdat deze stopt. **Tel daarna langzaam tot 5 terwijl u de doseerknop ingedrukt houdt.** Het teken **0** moet zichtbaar zijn in het doseervenster. Injecteer **niet** in uw lichaam.

Door uw pen te ontluchten verwijdt u lucht uit de naald en de patroon en zorgt u ervoor dat uw pen op de juiste manier werkt. Uw pen is ontlucht als u aan de punt van de naald een beetje medicijn ziet.

- Als u geen medicijn ziet moet u de **stap 7-9** herhalen, maar niet meer dan 2 keer.
- Als u dan nog steeds geen medicijn ziet, neem dan een nieuw naaldje en herhaal **stap 7-9**, maar niet meer dan 1 keer.
- Als u nog steeds geen medicijn ziet, neem contact op met de lokale vertegenwoordiger van Lilly die in de bijsluiter staat.

Injecteren met de Mounjaro KwikPen

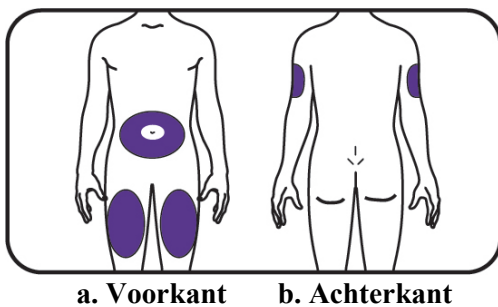


a. Voorkant

b. Achterkant


Stap 10 :

- Kies een plaats voor uw injectie.
 - a. U of iemand anders kan het medicijn in uw bovenbeen (dij) of buik op minimaal 5 cm afstand van de navel injecteren.
 - b. Iemand anders moet de injectie aan de achterkant van uw bovenarm geven.
- **Verander** uw injectieplaats elke week. U kunt hetzelfde gebied van uw lichaam gebruiken, maar zorg ervoor dat u een andere injectieplaats in dat gebied kiest.

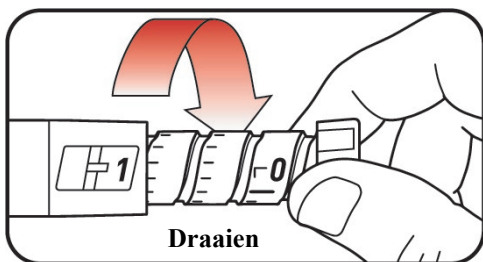


Stap 11:

- Draai aan de doseerknop tot hij stopt en het teken **1** zichtbaar is in het doseervenster. **Het teken 1 is gelijk aan een volledige dosis.**

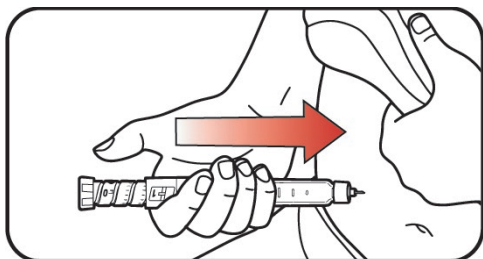


Stap 12:

- a. Zet het naaldje in uw huid.

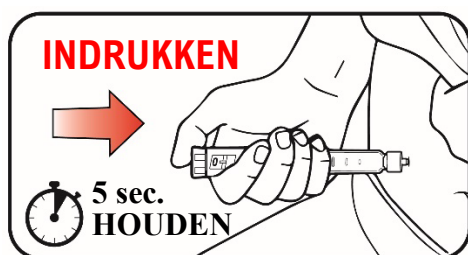

- b. Injecteer het medicijn door de doseerknop **in te drukken** totdat hij stopt. **Tel daarna langzaam tot 5 terwijl u de doseerknop ingedrukt houdt.** Het teken **0** moet zichtbaar zijn in het doseervenster voordat u de naald verwijderd.

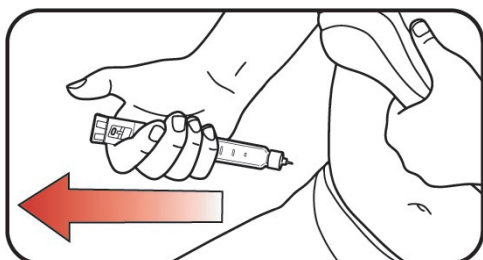

Stap 13:

- Verwijder de naald uit uw huid. Een druppel medicijn aan de punt van het naaldje is normaal. Het heeft geen invloed op uw dosis.
- Controleer het teken **0** in het doseervenster.


Als u het teken **0** in het doseervenster ziet, heeft u de volledige dosis gekregen.

Als u geen **0** in het doseervenster ziet, zet u het naaldje weer in uw huid en maakt u uw injectie af. Stel **geen** nieuwe dosis in.

Als u nog steeds denkt dat u niet de volledige dosis heeft gehad, begin dan **niet** opnieuw of herhaal uw injectie dan **niet**.


Zie rubriek 'Bewaren van uw Mounjaro KwikPen' of 'Veelgestelde vragen' voor meer informatie.

Na uw injectie met de Mounjaro KwikPen

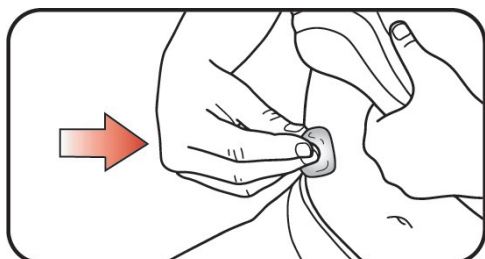


Stap 14:

- Als u een druppel bloed ziet na het verwijderen van het naaldje uit uw huid, druk dan zachtjes op de injectieplaats met een gaasje of een wattenbolletje. **Niet** wrijven over de injectieplaats.

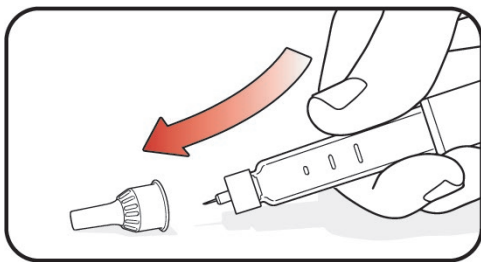

Stap 15:


- Doe de buitenste naaldbeschermer voorzichtig terug op de naald.

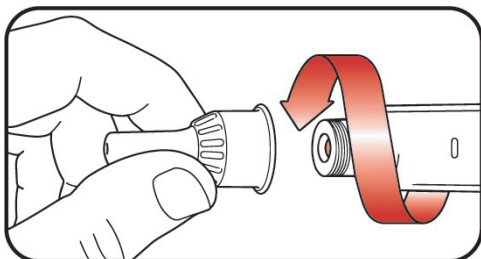

Stap 16:

- Draai de naald met dop en al eraf en gooi deze weg in een scherpafvalcontainer (zie 'Weggooiën van de Mounjaro KwikPen en pennaalden').

Bewaar de pen **niet** met het naaldje erop, om lekkage, verstopping van het naaldje en het instromen van lucht in de pen te voorkomen.

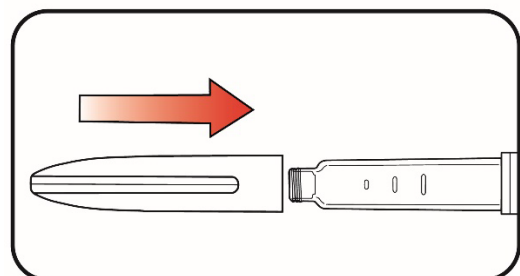

Stap 17 :

- Doe de dop terug op de pen.
Bewaar de pen **niet** zonder de pendop erop.

Bewaren van uw Mounjaro KwikPen

Ongebruikte pennen:


- Bewaar **ongebruikte pennen** in de **koelkast** bij 2°C tot 8°C.
- Pennen die in de koelkast worden bewaard en die nog niet aangebroken zijn, kunnen gebruikt worden tot de uiterste houdbaarheidsdatum, die op het etiket staat.
- De pen **niet** in de vriezer bewaren. Gooi de pen weg als de pen bevroren is geweest.

Gebruikte pennen:

- U kunt uw **gebruikte pen** na uw injectie bewaren bij **kamertemperatuur** beneden 30°C.
- Houd uw pen en naalden buiten het zicht en bereik van kinderen.
- Gooi de pen 30 dagen na het eerste gebruik weg, ook al zit er nog medicijn in de pen.
- Gooi de pen weg nadat u uw 4 wekelijkse doses heeft ontvangen. Als u probeert om het overgebleven medicijn te injecteren, kan dat resulteren in een onvolledige dosis, ook al zit er nog medicijn in de pen.

Overgebleven medicijn:

- Nadat u uw **vierde injectie** heeft voltooid, zult u nog wat overgebleven medicijn zien en dat is normaal. Dit overgebleven medicijn zorgt ervoor dat de pen correct werkt.
- Gooi de pen weg.
- Ook al zit er nog medicijn in de pen, probeer het overgebleven medicijn **niet** te injecteren. Een poging om het overgebleven medicijn te injecteren, kan resulteren in een onvolledige dosis.

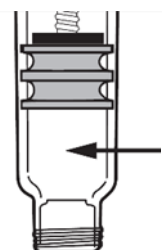

Overgebleven
medicijn
(geen dosis)

Weggooiden van de Mounjaro KwikPen en pennaalden

- Gooi gebruikte pennaalden weg in een scherpafvalcontainer of een harde plastic container met een stevige deksel.
- Gooi losse pennaalden **niet** weg bij uw huisvuil.
- Gooi de gebruikte pen weg volgens de instructies van uw zorgverlener.
- Vraag uw zorgverlener naar de mogelijkheden om de pennen en scherpafvalcontainer veilig af te voeren.
- Eenmaal gebruikt mogen scherpafvalcontainers niet opnieuw worden gebruikt.

Veelgestelde vragen

- Als het niet lukt de pendop te verwijderen, draait u de pendop voorzichtig heen en weer en trekt u de pendop er recht af.
- Als u de doseerknop niet kunt draaien totdat u het teken **1** in het doseervenster ziet:
 - gooi de pen, inclusief het ongebruikte medicijn, weg. Het kan zijn dat er niet genoeg medicijn meer in de pen zit om een volledige dosis te geven. Probeer het overgebleven medicijn **niet** te injecteren.
- Als de doseerknop moeilijk in te drukken is:
 - door de doseerknop langzamer in te drukken, wordt het injecteren gemakkelijker.
 - uw naald kan verstopt zijn. Bevestig een nieuwe naald en ontlucht de pen.
 - er kan stof, voedsel of vloeistof in de pen zitten. Gooi de pen weg en haal een nieuwe pen.
- Als u nog vragen of problemen heeft met uw Mounjaro KwikPen, neem dan contact op met Lilly of raadpleeg uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Medicijnkalender

Gebruik de Mounjaro KwikPen 1
keer per week

Ik injecteer mijn wekelijkse dosis op de onderstaande data:

Schrijf de dag van de week op die u
kiest voor de injectie. Injecteer elke
week op dezelfde dag (bijvoorbeeld:
maandag).

(dag/maand) (dag/maand) (dag/maand) (dag/maand)

--

--	--	--	--

Voor het laatst goedgekeurd in februari 2025.