

Activity Sling 25100



Activity Sling 25100 umožňuje pacientovi vzpřímený postoj a aktivitu v závislosti na jeho schopnostech. Je dodáván ve třech dětských velikostech.


Activity Sling je vyroben z polyesterové síťoviny. Má oporu hlavy a elastické bandáže po stranách pro optimální přizpůsobení.

Závěs je navržen pro dvoubodové zavěšení.

Důležité!

⚠ Zvedání a přeprava osob vždy přináší rizika. Pečlivě se seznamte s instrukcemi pro použití patientských závěsů a zvedacích zařízení před jejich použitím. Ujistěte se, že používáte zvedací zařízení vhodné pro daný účel. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout tuto manipulaci bez nebezpečí poškození zdraví. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele.

Activity Sling 25100

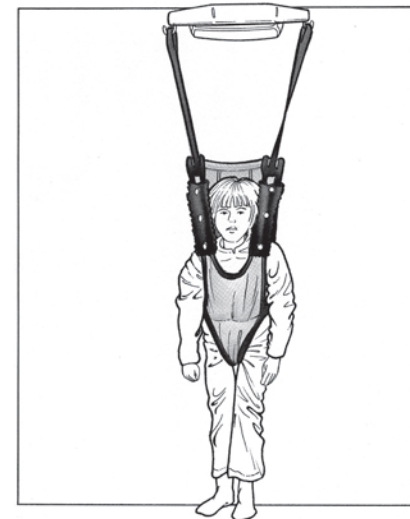

Activity Sling 25100 umožňuje pacientovi vzpřímený postoj a aktivitu v závislosti na jeho schopnostech. Je dodáván ve třech dětských velikostech.

Activity Sling je vyroben z polyesterové síťoviny. Má oporu hlavy a elastické bandáže po stranách pro optimální přizpůsobení.

Závěs je navržen pro dvoubodové zavěšení.

Důležité!


⚠ Zvedání a přeprava osob vždy přináší rizika. Pečlivě se seznamte s instrukcemi pro použití patientských závěsů a zvedacích zařízení před jejich použitím. Ujistěte se, že používáte zvedací zařízení vhodné pro daný účel. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout tuto manipulaci bez nebezpečí poškození zdraví. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele.




Activity sling na pacienta oblékněte vleže. Nejdříve provlékněte nohy pacienta spodní částí závěsu.



Prostrčte ruce pacienta otvory na bocích závěsu. Vytáhněte horní část závěsu co nejdál za krk pacienta.

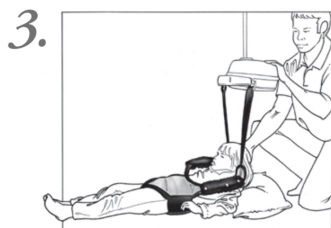

Zahákněte popruhy závěsu na háky nastavitelného ramene kazety. Zvedněte pacienta do stojící polohy. Přidržujte jednou rukou hlavu pacienta, dokud není závěs napnut. Hlava by měla být pod horním okrajem závěsu.

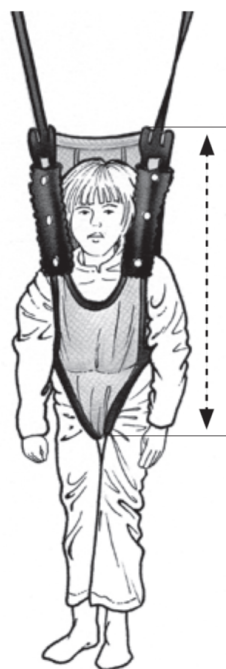

JS = 65 cm
JM = 71 cm
JL = 78 cm

Specifikace

Materiál: Polyesterová síťovina

Zakončení: Polyester

Nosnost: 250 kg

Velikost: JS, JM, JL

Praní: viz. etiketa



<http://www.erilens.cz>

ERILENS s.r.o.
Papírenská 114/5
160 00 Praha 6


Tel: 234 123 362
Fax: 234 123 360
Email: roomer@erilens.cz



Activity sling na pacienta oblékněte vleže. Nejdříve provlékněte nohy pacienta spodní částí závěsu.



Prostrčte ruce pacienta otvory na bocích závěsu. Vytáhněte horní část závěsu co nejdál za krk pacienta.

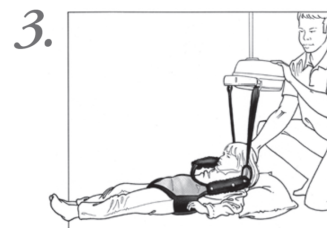

Zahákněte popruhy závěsu na háky nastavitelného ramene kazety. Zvedněte pacienta do stojící polohy. Přidržujte jednou rukou hlavu pacienta, dokud není závěs napnut. Hlava by měla být pod horním okrajem závěsu.



JS = 65 cm
JM = 71 cm
JL = 78 cm

Specifikace

Materiál: Polyesterová síťovina

Zakončení: Polyester

Nosnost: 250 kg

Velikost: JS, JM, JL

Praní: viz. etiketa



<http://www.erilens.cz>

ERILENS s.r.o.
Papírenská 114/5
160 00 Praha 6

Tel: 234 123 362
Fax: 234 123 360
Email: roomer@erilens.cz