



RehaComOnline für Klienten – Handbuch

Dokumentenversion: 2.2

Version RehaComOnline: 1.3

Ausgestellt am: 2025-03-18

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Gebrauchsanweisung | 4 |
| 1.1 | Informationen zum Produkt | 4 |
| 1.2 | Zweckbestimmung | 4 |
| 1.2.1 | Medizinischer Zweck | 4 |
| 1.3 | Vorgesehene Patientengruppe | 5 |
| 1.3.1 | Indikationen..... | 5 |
| 1.3.2 | Kontraindikationen | 5 |
| 1.3.3 | Risikofaktoren..... | 5 |
| 1.4 | Bestimmungsgemäßer Anwender | 6 |
| 1.5 | Vorhergesehene Anwendungsumgebung | 6 |
| 1.6 | Benutzungskontext..... | 6 |
| 1.7 | Weitere Hinweise zum sicheren Umgang | 6 |
| 1.7.1 | Systemvoraussetzungen | 6 |
| 1.7.2 | Installation | 6 |
| 1.7.3 | Anschlüsse an Versorgungsnetze | 7 |
| 1.7.4 | Kombination mit anderen Produkten inkl. Zubehör | 7 |
| 1.7.5 | Wartung, Reparatur..... | 7 |
| 1.7.6 | Außerbetriebnahme | 7 |
| 1.8 | Hinweise über Nebenwirkungen und Restrisiken | 7 |
| 1.9 | Hinweise und Warnungen | 7 |
| 2 | Bedienungsanleitung | 9 |
| 2.1 | Einleitung..... | 9 |
| 2.2 | Start von RehaCom..... | 9 |
| 2.2.1 | Login | 9 |
| 2.2.2 | Sicherheitsabfrage | 10 |
| 2.2.3 | Zufriedenheitsabfrage | 10 |
| 2.3 | Benutzeroberfläche | 11 |
| 2.3.1 | Allgemeines | 11 |
| 2.3.2 | Training..... | 12 |
| 2.3.3 | Ergebnisse..... | 17 |
| 2.3.4 | Nachrichten | 19 |
| 2.3.5 | Mein Profil | 20 |
| 2.3.6 | Impressum | 22 |

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 2.3.7 | Hilfe | 22 |
| 2.3.8 | Logout..... | 22 |
| 2.4 | Besonderheit: Unbetreuter Klient..... | 23 |
| 3 | Anhang | 25 |
| 3.1 | Versionshistorie..... | 25 |

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|---------------|--|----|
| Abbildung 1: | Login..... | 9 |
| Abbildung 2: | Sicherheitsabfrage | 10 |
| Abbildung 3: | Zufriedenheitsabfrage..... | 11 |
| Abbildung 4: | Ansicht Training - Heute..... | 12 |
| Abbildung 5: | Training: Keine Vorgaben vorhanden | 13 |
| Abbildung 6: | Heute - Auflistung der Trainings | 14 |
| Abbildung 7: | Training - Wochenansicht | 15 |
| Abbildung 8: | Training - Darstellung der flexiblen Trainings | 16 |
| Abbildung 9: | Training - Monat | 16 |
| Abbildung 10: | Trainings/ Monatsdarstellung - Detailinformationen | 17 |
| Abbildung 11: | Ergebnisse | 17 |
| Abbildung 12: | Export der Trainingsergebnisse..... | 18 |
| Abbildung 13: | Ergebnisse - Hinweis | 18 |
| Abbildung 14: | Nachrichten..... | 19 |
| Abbildung 15: | Mein Profil - Lizenzinformation..... | 20 |
| Abbildung 16: | Profildaten des Patienten | 20 |
| Abbildung 17: | Impressum | 22 |
| Abbildung 18: | Alle Übungen..... | 23 |
| Abbildung 19: | Parametermaske..... | 24 |

1 Gebrauchsanweisung

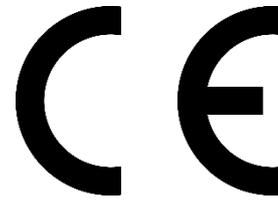
1.1 Informationen zum Produkt



RehaComOnline



HASOMED GmbH
Paul-Ecke-Straße 1
39114 Magdeburg
Deutschland
www.hasomed.de
info@hasomed.de



SRN:DE-MF-000006439
IK-Nr.581500029

Hinweise zu erlaubtem Zubehör

RehaComOnline darf in Verbindung mit dem RehaCom Keyboard verwendet werden.
Das RehaCom Keyboard ist optional erhältlich.

1.2 Zweckbestimmung

1.2.1 Medizinischer Zweck

Therapie von

- Aufmerksamkeitsstörungen
- Gedächtnisstörungen
- Störungen der Exekutivfunktionen
- Beeinträchtigungen nach Gesichtsfeldeinschränkung, Störungen der visuell-räumlichen Funktionen und Neglect

1.3 Vorgesehene Patientengruppe

1.3.1 Indikationen

Therapie von Aufmerksamkeitsstörungen, Gedächtnisstörungen und Störungen der Exekutivfunktionen

Indikationen

- Kognitive Störungen nach den folgenden Erkrankungen bzw. Verletzungen, mit Einfluss auf das zentrale Nervensystem:
 - Schlaganfall
 - Schädel-Hirn-Trauma
 - Multiple Sklerose
 - Morbus-Parkinson
 - leichte kognitive Störung/Demenz (mild)
 - Covid-19
- Kognitive Störungen im Rahmen der folgenden mentalen Störungen und Verhaltensstörungen:
 - Depression
 - Schizophrenie
 - Mentale Störungen und Verhaltensstörungen durch Einnahme psychoaktiver Substanzen

Therapie von Beeinträchtigungen nach Gesichtsfeldeinschränkung sowie Störungen der visuell-räumlichen Funktionen und Neglect

Indikationen

- Kognitive Störungen nach den folgenden Erkrankungen bzw. Verletzungen, mit Einfluss auf das zentrale Nervensystem:
 - Schlaganfall
 - Schädel-Hirn-Trauma
 - Multiple Sklerose
 - Morbus-Parkinson
 - leichte kognitive Störung/Demenz (mild)

1.3.2 Kontraindikationen

- keine

1.3.3 Risikofaktoren

Vorsicht bei Patienten mit



Verdacht auf oder Diagnose einer Epilepsie



Verdacht auf Suizidalität

1.4 Bestimmungsgemäßer Anwender

- Professionelle Anwender (medizinisch geschultes und eingewiesenes Personal)
- Nicht-professionelle Anwender (Laien) unter folgenden Bedingungen:
 - Nutzer sind psychisch, kognitiv, intellektuell und motorisch in der Lage, das Produkt zu verstehen und zu bedienen oder werden von ihren Betreuern unterstützt

1.5 Vorgesehene Anwendungsumgebung

- Professionelle Einrichtungen des Gesundheitswesens
- Häusliche Anwendungsumgebung

1.6 Benutzungskontext

RehaComOnline ist ein Therapiesystem mit verschiedenen Therapiemodulen, die zur kognitiven Therapie in den Bereichen Aufmerksamkeit, Gedächtnis, exekutive Funktionen, visuell-räumliche und visuo-motorische Funktionen eingesetzt werden. Mit RehaComOnline ist eine defizitspezifische und gezielte Therapie möglich. RehaComOnline kann sowohl zur Förderung der sozialen Teilhabe als auch der beruflichen Wiedereingliederung eingesetzt werden.

Eine Übersicht der enthaltenen Trainingsmodule kann in RehaComOnline im Bereich Hilfe > Modulbeschreibungen heruntergeladen werden.

Anwendungsdauer und -häufigkeit

- Indikationsspezifisch entsprechend den geltenden Leitlinien für kognitives Training
- Dauer des Trainings 30 – 60 Minuten, 2 – 5 Einheiten pro Woche
- Richtwerte können im Bedarfsfall je nach Belastbarkeit des Patienten und Trainingsziel über- bzw. unterschritten werden.

1.7 Weitere Hinweise zum sicheren Umgang

1.7.1 Systemvoraussetzungen

Betriebssystem:

Android (Browserversion und Hardware entscheidend)
iOS 15 bzw. macOS 10.13 oder höher
Windows 10 oder höher (x64 für GEAX)

Prozessor:

i3, i5, i7 der 6. Generation oder gleichwertig

Arbeitsspeicher:

4 GB (8 GB für GEAX) oder mehr

Grafikkarte:

DirectX10.1 tauglich
mindestens 2 GB Grafikspeicher
"Intel HD Graphics 530" oder besser
"NVIDIA GeForce" ab 600er-Serie oder besser

Monitor:

Auflösung min. 1024 x 768 Pixel für Schriftgröße 100 %
bei Schriftgröße 120 % sind 1024 Pixel in der Vertikalen notwendig

Browser:

- Google Chrome ab Version 58
- Microsoft Edge ab Version 79
- Apple Safari ab Version 15

Internet:

Breitbandverbindung mit mindestens 3 MBit/s

1.7.2 Installation

RehaComOnline ist als browserbasierte Webanwendung nach Öffnen der Website <https://reha.com.online> unmittelbar verfügbar. Download und Installation sind nicht erforderlich.

1.7.3 Anschlüsse an Versorgungsnetze

Beim Arbeiten mit einem PC, einem Laptop oder einem Tablet ist ein Anschluss an das Stromnetz erforderlich.

1.7.4 Kombination mit anderen Produkten inkl. Zubehör

RehaComOnline kann in Verbindung mit dem RehaCom Keyboard verwendet werden.

1.7.5 Wartung, Reparatur

RehaComOnline wird stets weiterentwickelt. Die jeweils aktuelle Version wird von dem verwendeten Browser automatisch geladen. So ist sichergestellt, dass jeder Anwender jederzeit mit der aktuellen Version von RehaComOnline trainieren kann.

1.7.6 Außerbetriebnahme

RehaComOnline kann vorübergehend außer Betrieb genommen (offline gestellt) werden, sofern dies aus technischen oder anderen Gründen erforderlich ist.

1.8 Hinweise über Nebenwirkungen und Restrisiken

Es sind keine Fälle von schwerwiegenden oder längerfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt. Vorübergehend kann es zu Anzeichen erhöhter Belastung kommen. Diese zeigen sich z. B. in vorübergehenden Kopfschmerzen oder einem Gefühl erhöhter körperlicher und/oder psychischer Anspannung. In diesen Fällen sollte das Training unterbrochen werden. Zur Vermeidung unerwünschter Nebenwirkungen sollten regelmäßige Pausen eingelegt werden. Bei auftretenden Nebenwirkungen wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten.

1.9 Hinweise und Warnungen



Sollten während des Trainings Kopfschmerzen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung und kontaktieren Sie Ihren Therapeuten. Achten Sie auf regelmäßige Pausen, um Überlastungssymptomen vorzubeugen.



Die ausgegebenen Informationen sind nicht vorgesehen, um für Entscheidungen zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken herangezogen zu werden.



Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller zu melden.

Im weiteren Verlauf und in der Software werden die hier genannten Patienten als Klienten bezeichnet.

2 Bedienungsanleitung

2.1 Einleitung

RehaCom ist Ihr Therapiesystem in der neurologischen Rehabilitation. Die verschiedenen Trainingsmodule des Systems dienen der kognitiven Therapie in den Bereichen Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Exekutivfunktionen, Gesichtsfeld und visuell-räumliche Funktionen.

Mit RehaCom können Sie mit verschiedenen Trainingsmodulen Ihre kognitiven Leistungen gezielt trainieren.

2.2 Start von RehaCom

2.2.1 Login

Nach Aufruf der Internetadresse reha.com.online erscheint das Login für RehaCom.


The screenshot shows the RehaCom login interface. At the top is the Hasomed RehaCom logo. Below it, the word 'Willkommen' is displayed in green. A message reads 'Bitte melden Sie sich an, um fortzufahren.' There are two input fields: 'E-Mail' and 'Passwort'. Below the password field is a checkbox labeled 'Passwort anzeigen'. At the bottom left is a link 'Passwort vergessen?' and at the bottom right is a green button with a right-pointing arrow and the text 'Anmelden'.

Abbildung 1: Login

Das Login erfolgt mit E-Mailadresse und Passwort.

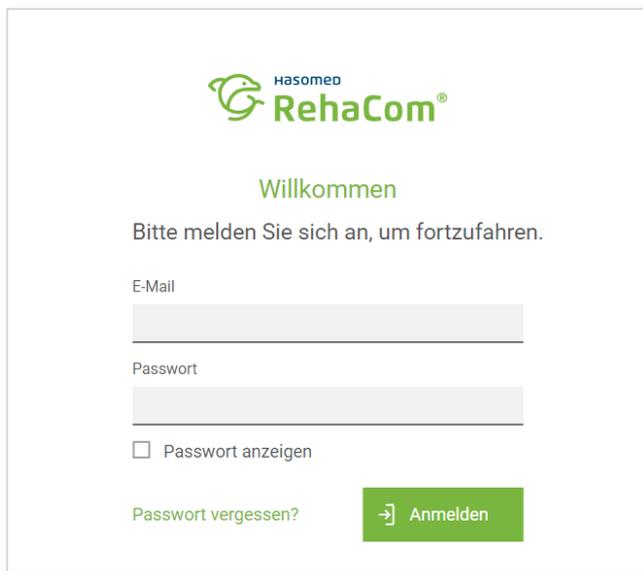2.2.2 Sicherheitsabfrage

Nach dem erfolgreichen Login des Klienten prüft **RehaCom**, ob die Anwendung in einer bereits registrierten Systemumgebung genutzt wird. Ist die nicht der Fall, wird ein Sicherheitshinweis eingeblendet.

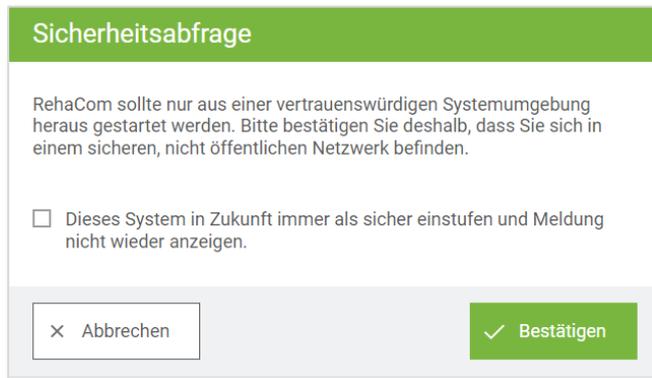


Abbildung 2: Sicherheitsabfrage

Erfolgt die Bestätigung des Dialogs durch den Klienten, speichert **RehaCom** eine Prüfsumme für die Systemumgebung für den Klienten ab.

Ziel dieser Abfrage ist es, den Klienten auf Risiken hinzuweisen, wenn er in öffentlichen Netzen (wie z.B. in einem Internetcafé) trainiert und auf öffentlichen Systemen Trainingsdaten erzeugt. Es obliegt dem Klienten, ob er das Login in **RehaCom** nach der Sicherheitsabfrage abbricht oder weitertrainiert, weil es sich um ein sichereres (aber bisher unbekanntes) System handelt.

Wird die Checkbox im Dialogfenster aktiviert, wird die Sicherheitsabfrage für die Systemumgebung nicht wiederholt.

2.2.3 Zufriedenheitsabfrage

Beim Login in **RehaCom** wird der Klient einmal innerhalb von 7 Tagen vom System gefragt, ob er mit den Trainingsvorgaben des Therapeuten zufrieden ist bzw. ob diese für ihn passen und er gut trainieren kann.

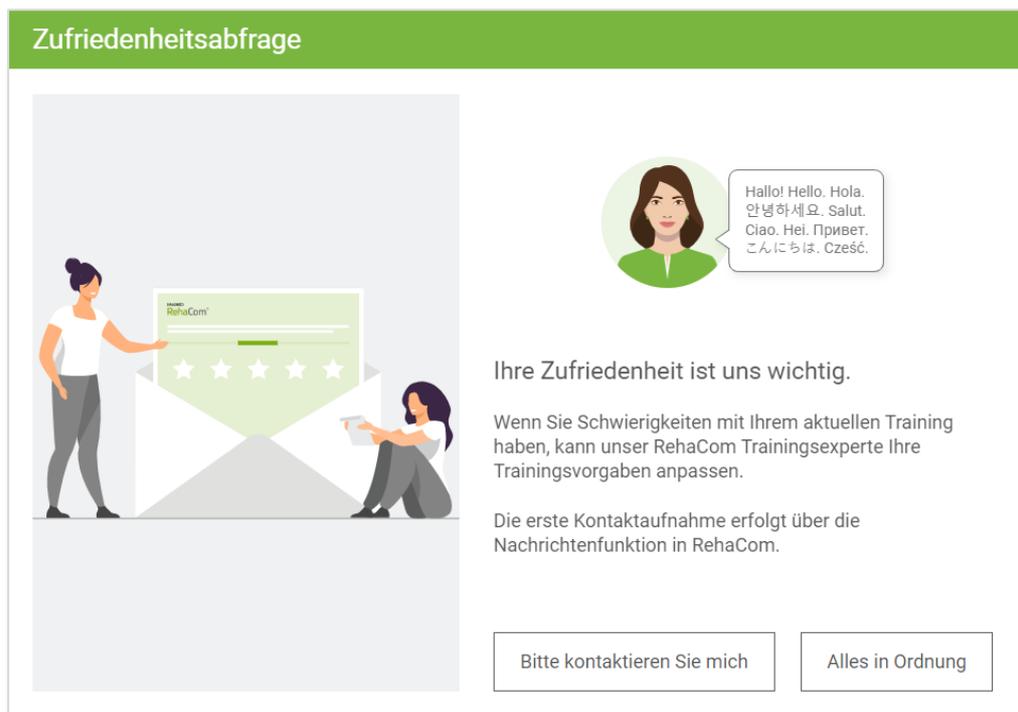


Abbildung 3: Zufriedenheitsabfrage

Die Antwort des Klienten wird als **RehaCom**-Nachricht dem Therapeuten zugestellt. Wird „Bitte kontaktieren Sie mich“ geantwortet, ist es Aufgabe des Therapeuten auf diese Anfrage zu reagieren. Auf diese Weise erhält ein Therapeut automatisch eine Information, ob das Training des Klienten gut verläuft.

2.3 Benutzeroberfläche

2.3.1 Allgemeines

Nachfolgend ist die Benutzeroberfläche von **RehaCom** für Klienten beschrieben. Informationen zu den Therapiemodulen finden Sie innerhalb der Software unter dem Menüpunkt **Hilfe**. Die Benutzeroberfläche ist klar und strukturiert aufgebaut.

Durch Anklicken der jeweiligen Menüpunkte gelangen Sie in den jeweiligen Menüpunkt.

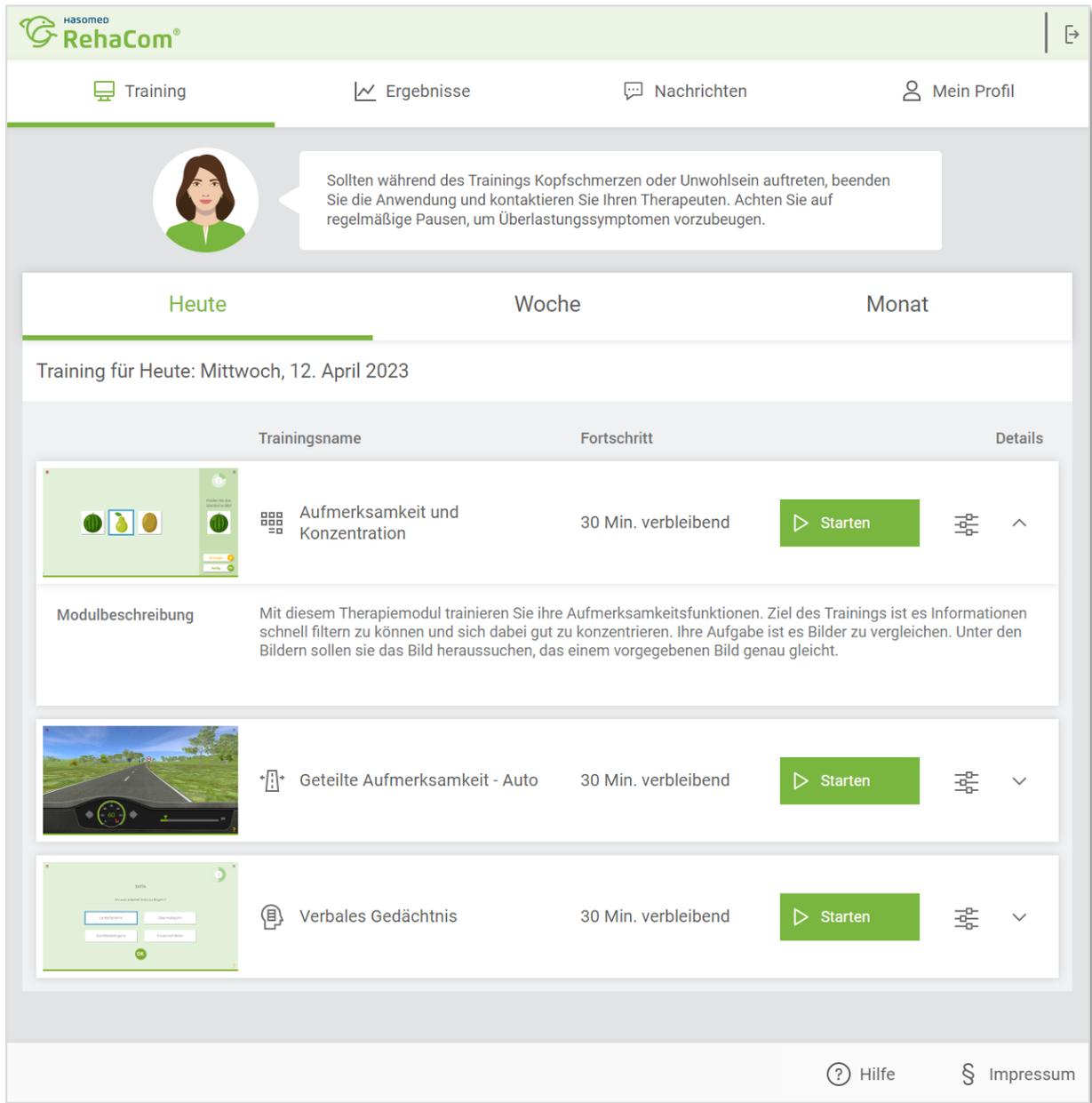
Die Menüpunkte **Training**, **Ergebnisse**, **Nachrichten**, **Mein Profil** und **Logout** sind standardmäßig im Menü enthalten.

Des Weiteren sind auf jeder Menüseite in der Fußzeile die Schaltflächen **Impressum** und **Hilfe** verfügbar.

Nachfolgend sind die einzelnen Menüpunkte im Detail beschrieben.

2.3.2 Training

Standardmäßig öffnet die Anwendung mit der Tagesansicht **Heute** des Bereichs **Training**.



The screenshot shows the RehaCom application interface. At the top, there is a navigation bar with the RehaCom logo and a menu icon. Below the navigation bar, there are four tabs: Training, Ergebnisse, Nachrichten, and Mein Profil. The Training tab is selected. A warning message is displayed: "Sollten während des Trainings Kopfschmerzen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung und kontaktieren Sie Ihren Therapeuten. Achten Sie auf regelmäßige Pausen, um Überlastungssymptomen vorzubeugen." Below the warning, there are three tabs: Heute, Woche, and Monat. The Heute tab is selected. The main content area shows "Training für Heute: Mittwoch, 12. April 2023". Below this, there is a table with columns: Trainingsname, Fortschritt, and Details. The table lists three training modules:

| Trainingsname | Fortschritt | Details |
|---|---------------------|---|
|  Aufmerksamkeits- und Konzentration | 30 Min. verbleibend | Starten   |
| Modulbeschreibung Mit diesem Therapiemodul trainieren Sie ihre Aufmerksamkeitsfunktionen. Ziel des Trainings ist es Informationen schnell filtern zu können und sich dabei gut zu konzentrieren. Ihre Aufgabe ist es Bilder zu vergleichen. Unter den Bildern sollen sie das Bild herausuchen, das einem vorgegebenen Bild genau gleicht. | | |
|  Geteilte Aufmerksamkeit - Auto | 30 Min. verbleibend | Starten   |
|  Verbales Gedächtnis | 30 Min. verbleibend | Starten   |

At the bottom of the interface, there are links for [Hilfe](#) and [Impressum](#).

Abbildung 4: Ansicht Training - Heute

Hier befindet sich eine Übersicht der zu absolvierenden Trainings.

Die Trainingsmodule können in beliebiger Reihenfolge absolviert werden.

Folgende Informationen sind verfügbar:

- Modulbezeichnung inkl. Modulbeschreibung (wenn aufgeklappt)
- die verbleibende Trainingszeit für die Vorgabe
- der Button für den Start des Trainings sowie
- der Button  für das Öffnen des Parametermenüs

Oberhalb der Trainings befindet sich eine Hinweismeldung zum Verhalten beim Auftreten von Kopfschmerzen während des Trainings. Es wird empfohlen, regelmäßige Pausen zwischen den Trainings einzuhalten.

Existieren keine offenen Trainings für den Klienten (der Therapeut hat keine Trainings vorgegeben), so kann er nicht trainieren. In diesem Falle sollte sich der Klient an seinen Therapeuten wenden.

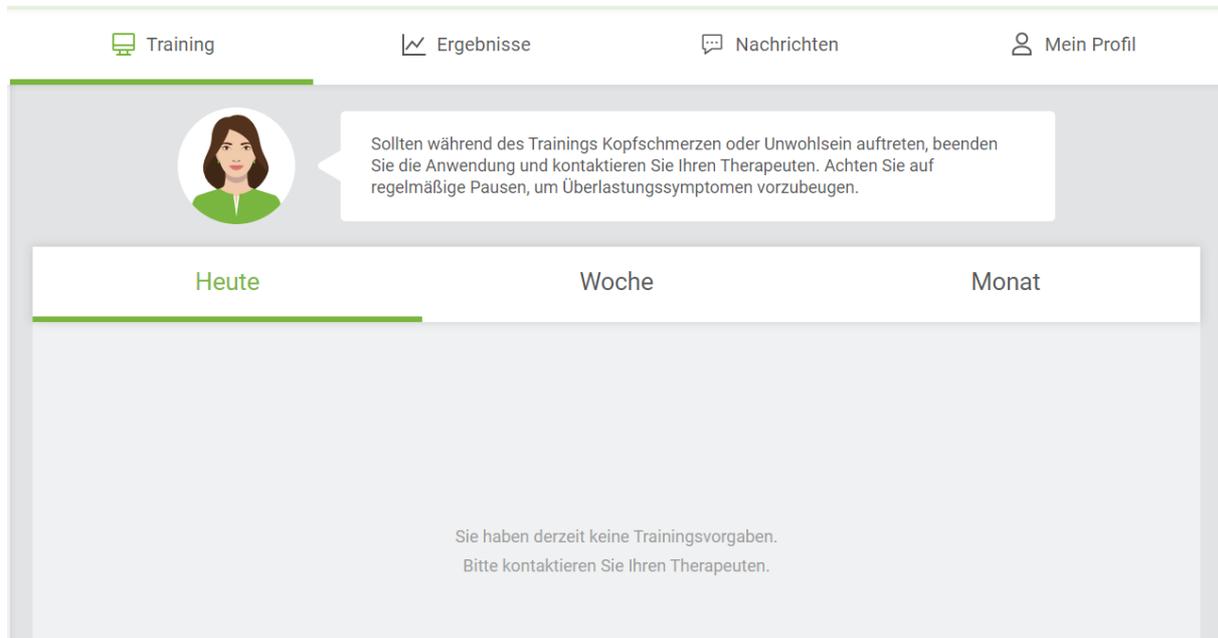


Abbildung 5: Training: Keine Vorgaben vorhanden


Auch wenn keine offenen Trainings bestehen, so kann der Klient seine bisherigen Trainingsergebnisse und alle anderen Bereiche von **RehaCom** einsehen.

In der Ansicht **Heute** werden zuoberst die Trainings für den aktuellen Tag aufgelistet. Darunter folgt die Auflistung der flexiblen Trainings für die aktuelle Woche.

| Heute | | Woche |
|---|--|-------|
| Training für Heute: Mittwoch, 12. April 2023 | | |
| Trainingsname | | Fo |
|  |  Aufmerksamkeit und Konzentration | 30 |
|  |  Geteilte Aufmerksamkeit - Auto | 30 |
|  |  Verbales Gedächtnis | 30 |
| Training für die Woche: 10. - 16. April 2023 | | |
|  |  1-2 Logisches Denken | 25 |

Abbildung 6: Heute - Auflistung der Trainings

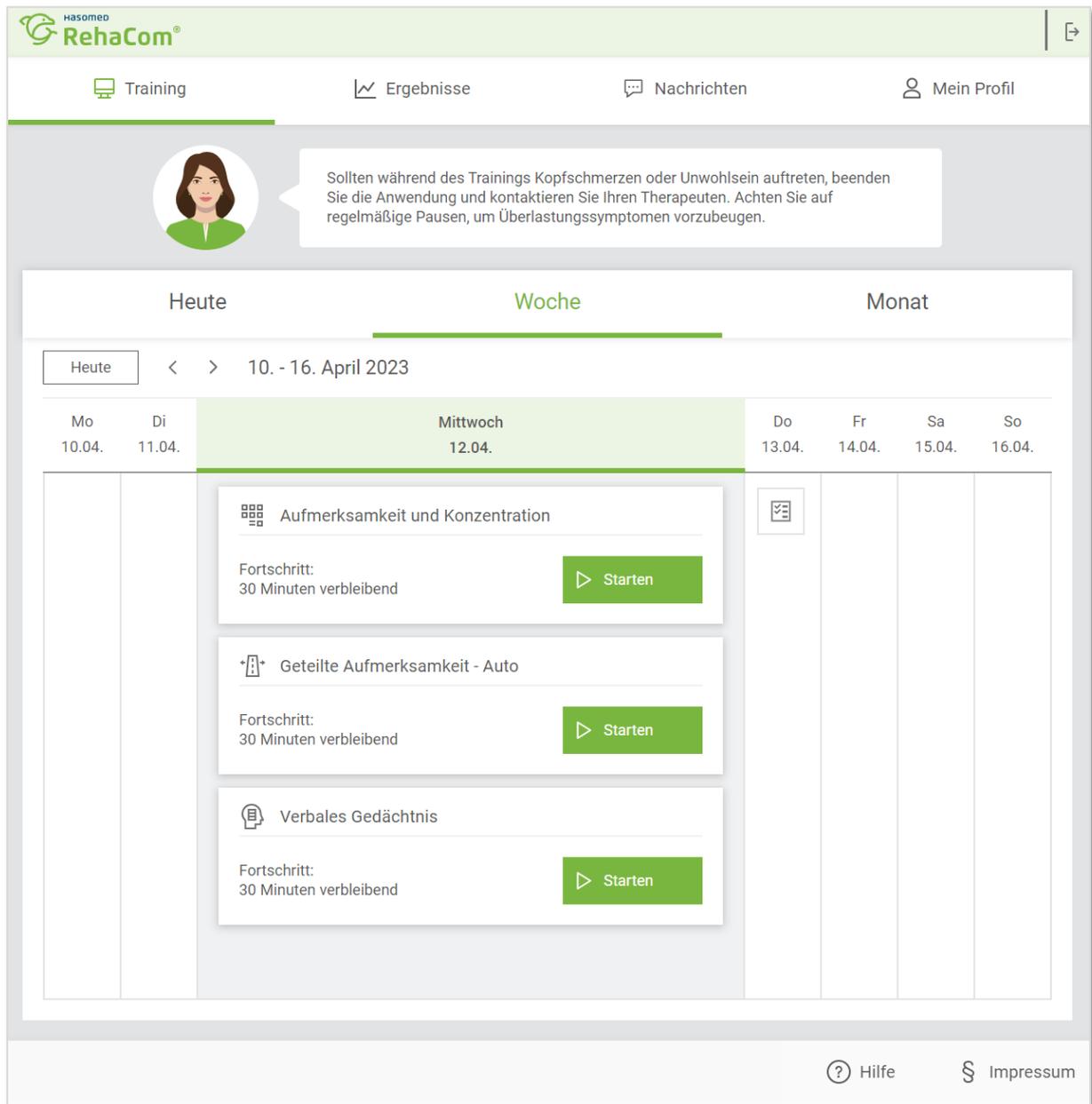Durch einen Klick auf **Woche** wechselt die Ansicht der Trainings auf eine Wochenansicht. Der aktuelle Tag mit seinen Trainings ist im Fokus.



The screenshot shows the RehaCom user interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Training, Ergebnisse, Nachrichten, and Mein Profil. Below this is a user profile section with a warning message: "Sollten während des Trainings Kopfschmerzen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung und kontaktieren Sie Ihren Therapeuten. Achten Sie auf regelmäßige Pausen, um Überlastungssymptomen vorzubeugen." The main content area is titled "Woche" and shows a calendar for the week of April 10-16, 2023. The current day, Wednesday (12.04.), is highlighted. Underneath, three training modules are listed for Wednesday, each with a "Starten" button and a progress indicator: "Aufmerksamkeit und Konzentration", "Geteilte Aufmerksamkeit - Auto", and "Verbales Gedächtnis". A fourth training module, "PLAN", is shown as an icon in the Thursday (13.04.) column. The bottom of the interface includes "Hilfe" and "Impressum" links.

Abbildung 7: Training - Wochenansicht

Trainings für andere Tage werden in den entsprechenden Spalten für die Tage als Icon dargestellt (siehe in der Abbildung 7 das Training mit PLAN  am Donnerstag, 13.04.).

Wie in der Tagesansicht werden die flexiblen Trainings für die Woche unterhalb der anderen Trainings eingeblendet.

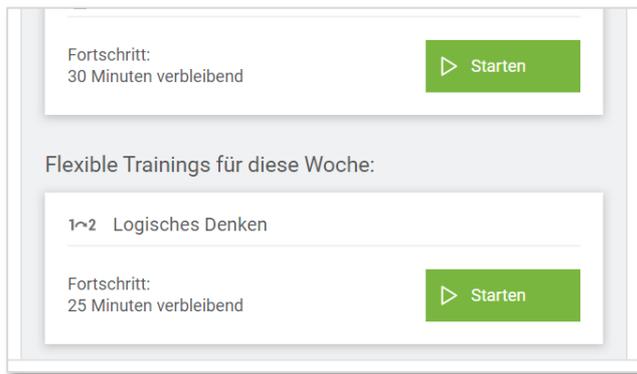


Abbildung 8: Training - Darstellung der flexiblen Trainings

Neben der Darstellung Heute und Woche gibt es auch noch die Möglichkeit, sich die Trainings für den aktuellen Monat anzeigen zu lassen.

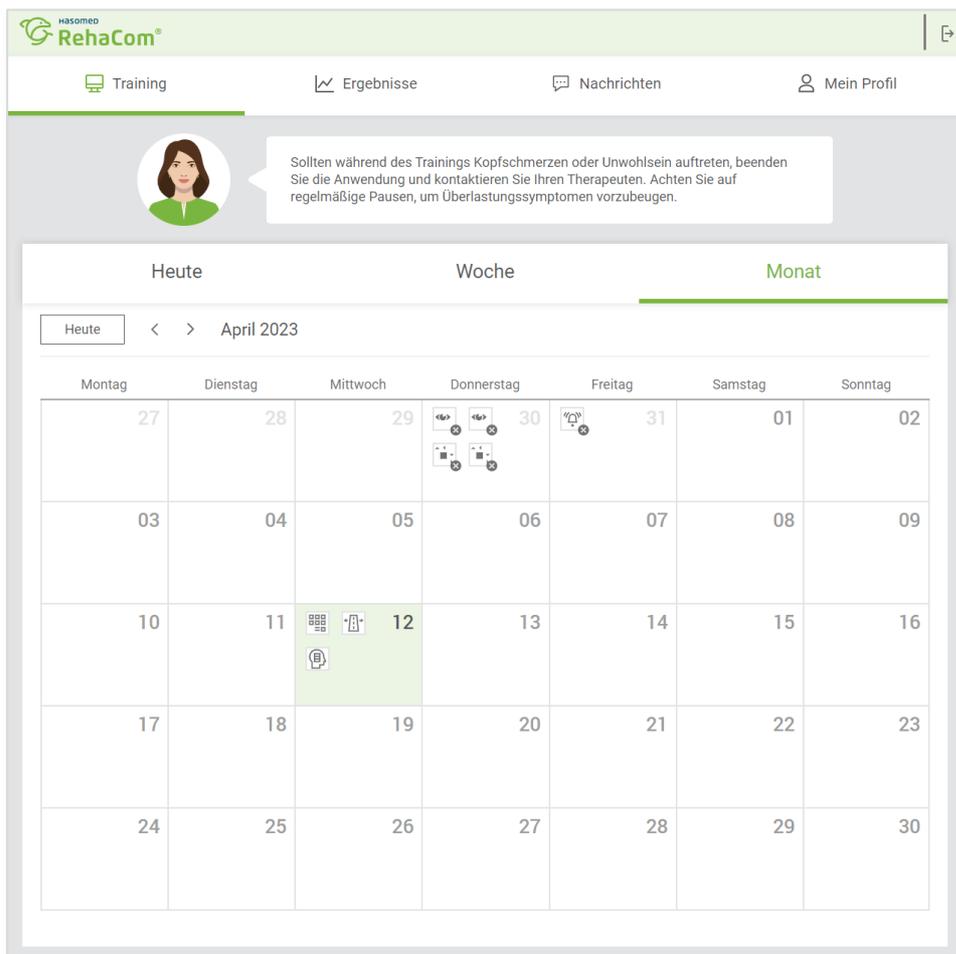


Abbildung 9: Training - Monat

Die Trainings werden mit ihren Modulicon für den entsprechenden Tag angezeigt.

Wird ein Tag angeklickt, so öffnet sich ein Fenster, in dem Detailinformationen zu den Trainings angezeigt werden. Auch hier werden die Trainings für den Tag getrennt von den flexiblen Trainings der Woche dargestellt.

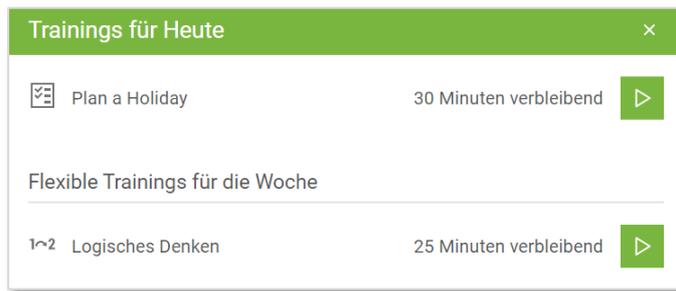


Abbildung 10: Trainings/ Monatsdarstellung - Detailinformationen

2.3.3 Ergebnisse

Der Menüpunkt **Ergebnisse** enthält Informationen zu den Trainingsergebnissen. Der Verlauf der trainierten Level je Modul wird grafisch dargestellt.

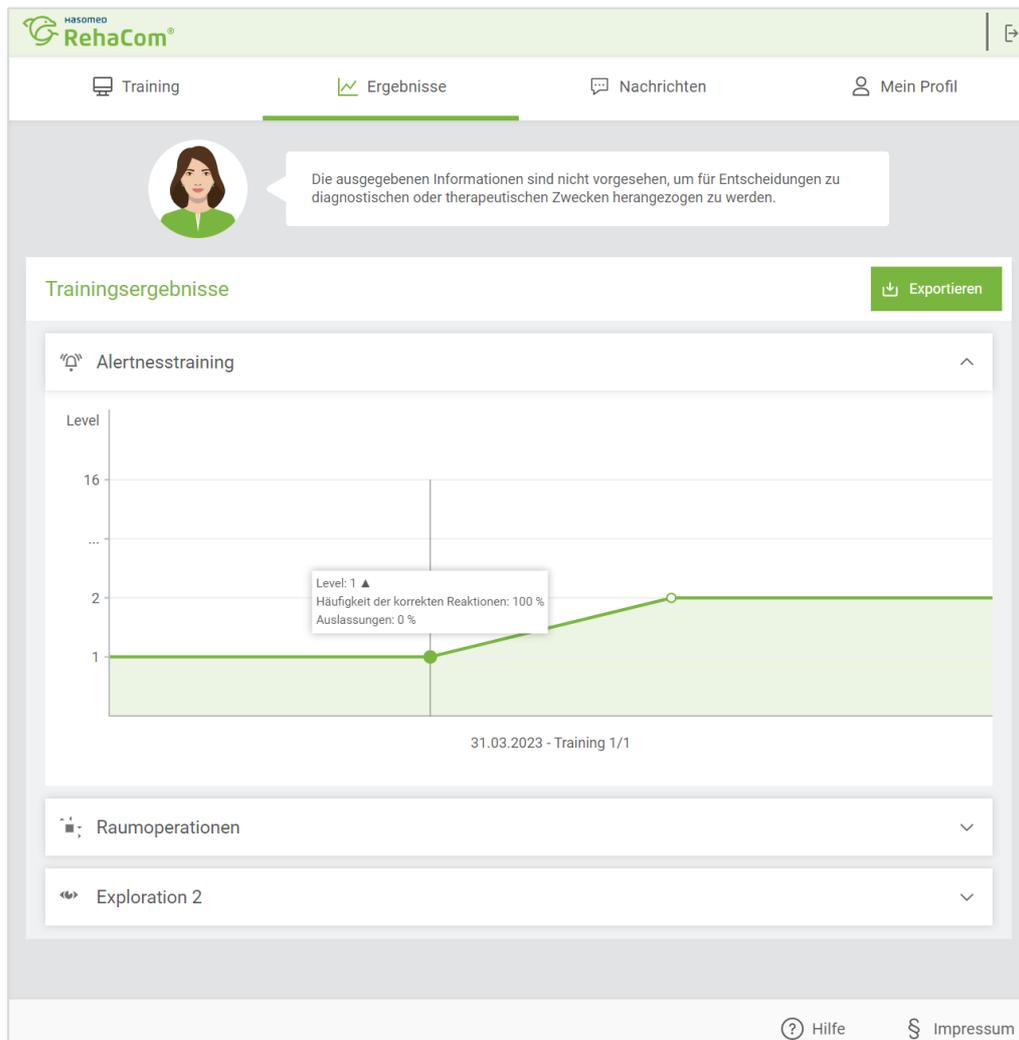


Abbildung 11: Ergebnisse

Für die einzelnen Datenpunkte der Diagramme sind Detailinformationen über die absolvierten Level des Moduls hinterlegt. Ein Dreieck zeigt den Trend an, mit dem das Training erfolgt ist (Levelauf- oder Levelabstieg).

Über den Button **Exportieren** kann ein Klient seine Trainingsdaten als csv-Datei oder per FHIR-Schnittstelle (als xml-Datei) exportieren. Ein Auswahlfenster öffnet sich.

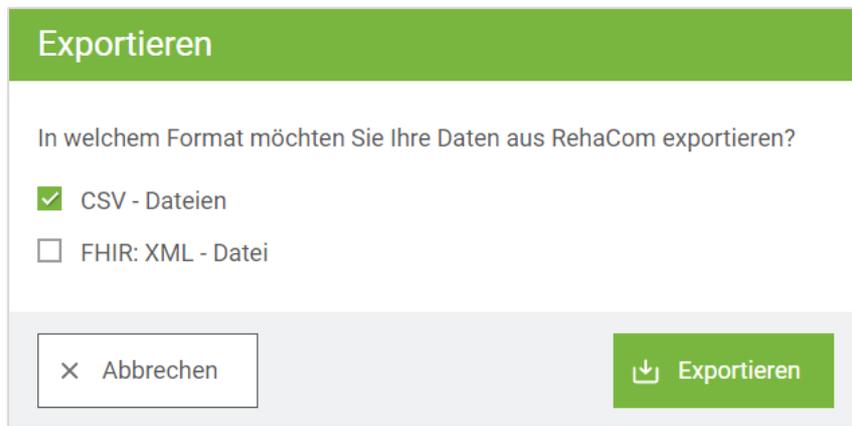


Abbildung 12: Export der Trainingsergebnisse

Oberhalb der Trainingsergebnisse wird per Avatar darauf hingewiesen, dass die Trainingsergebnisse nicht mit Diagnoseergebnissen gleichzusetzen sind.

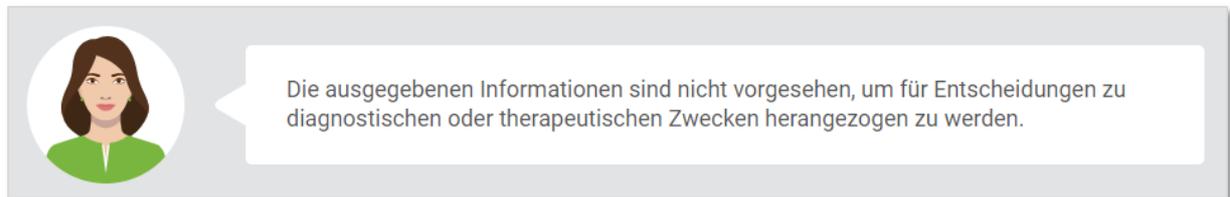


Abbildung 13: Ergebnisse - Hinweis

2.3.4 Nachrichten

Im Menüpunkt **Nachrichten** können Sie Nachrichten mit Ihrem Therapeuten austauschen.

1. Im Bereich **Kontakte** können Sie Ihren Therapeuten auswählen.
2. Im **Nachrichtenfenster** können Sie empfangene Nachrichten lesen.
3. Im **Textfeld** können Sie eine Nachricht an Ihren Therapeuten schreiben.

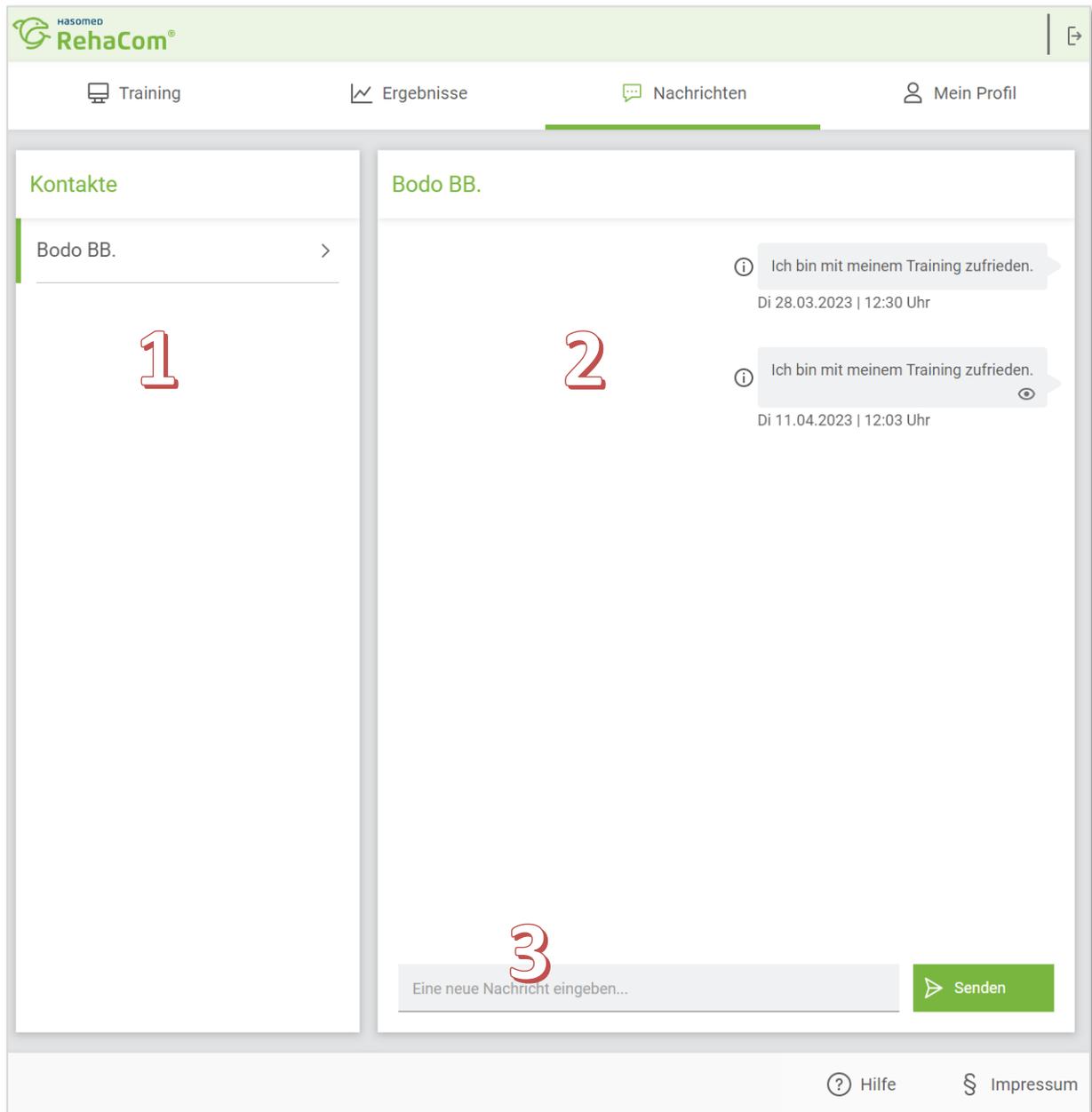


Abbildung 14: Nachrichten

2.3.5 Mein Profil

Durch Anklicken von **Mein Profil** werden die Einstellungen sowie Informationen zum Account des Klienten angezeigt.

Zuoberst steht die Information, wie lange der Klient mit der **RehaCom** trainieren kann (Ende der aktuellen Lizenz).

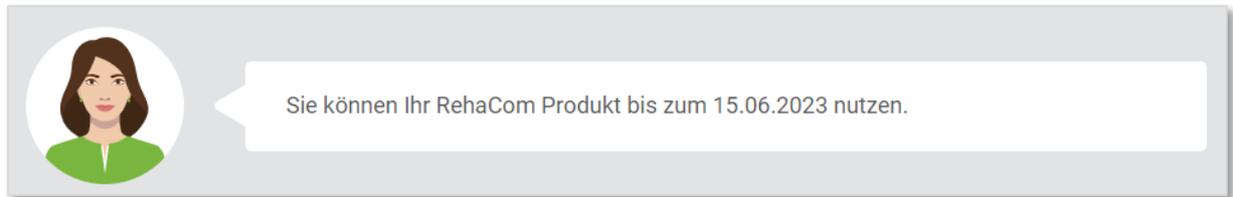


Abbildung 15: Mein Profil - Lizenzinformation

Im Bereich **Meine Daten** wird die Emailadresse des Klienten angezeigt. Es erfolgt der Hinweis, dass die Emailadresse nur durch den HASOMED Support geändert werden kann.

Weiterhin ist hier einsehbar, wann Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben. Sie können die Datenschutzerklärung einsehen oder Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung widerrufen.

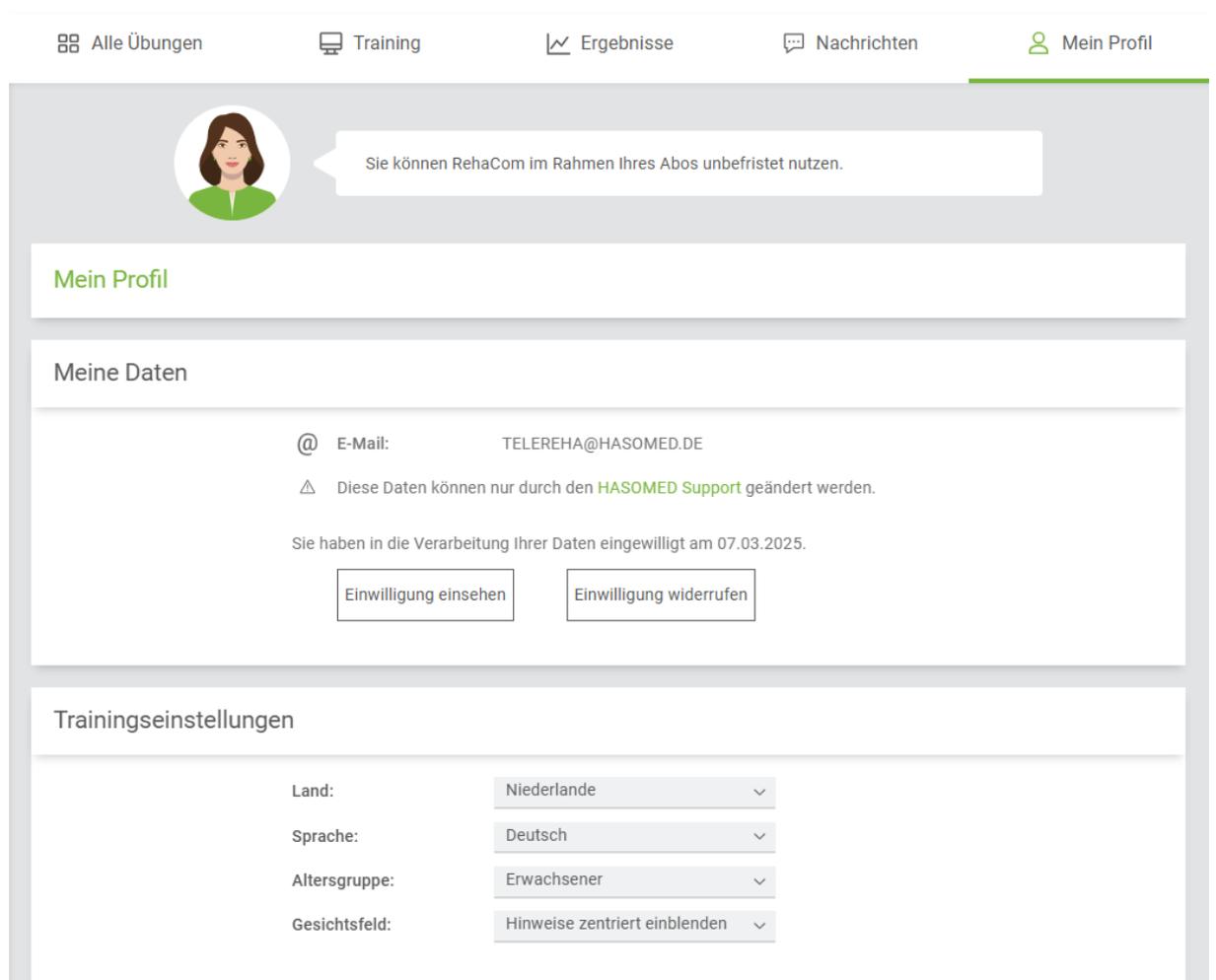


Abbildung 16: Profildaten des Patienten

Die Trainingsdaten beinhalten das **Land** und die **Sprache**. Des Weiteren kann die **Altersgruppe** eingestellt werden, der der Klient zuzuordnen ist – Kind oder Erwachsener.

Unter **Gesichtsfeld** geht es um die Option, in welchem Bildschirmbereich die Hinweise beim Training eingeblendet werden sollen: zentriert, rechts oder links.

2.3.6 Impressum

Durch Anklicken des Buttons  **Impressum** in der Fußzeile der Anwendung öffnet sich das Impressum für **RehaCom**.



Abbildung 17: Impressum

2.3.7 Hilfe

Über  **Hilfe** in der Fußzeile von **RehaCom** gelangt man auf die Hilfeseite. Hier sind Informationen zu folgenden Punkten enthalten:

- Technischer Support
- Handbuch
- Modulbeschreibungen
- Literatur und Wissenschaft
- Produktinformation

2.3.8 Logout

Durch Anklicken der Schaltfläche  oben rechts im Bildschirm melden Sie sich von Ihrer **RehaCom**-Sitzung ab.

2.4 Besonderheit: Unbetreuter Klient

Für nicht durch Therapeuten betreute Klienten (unbetreut) ergeben sich für die Nutzung von RehaCom Abweichungen zu den Beschreibungen in den vorstehenden Abschnitten.

Einem unbetreuten Klienten ist ein freies Training möglich. Für sein Training ist eine Vorgabe durch einen Therapeuten nicht erforderlich.

Die Benutzeroberfläche von RehaCom hat einen weiteren Bereich Alle Übungen.

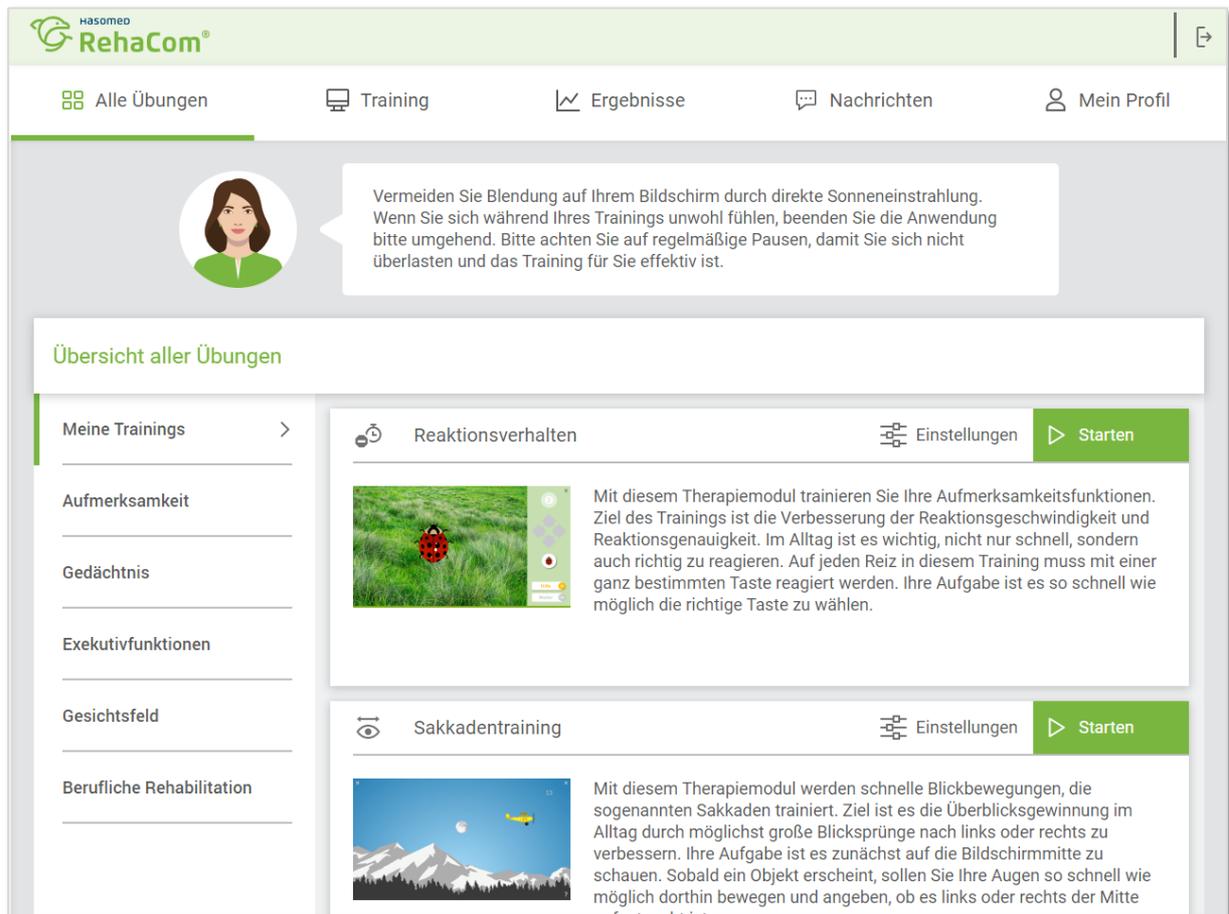


Abbildung 18: Alle Übungen

Dieser Bereich enthält eine Liste aller verfügbaren Trainingsmodule. Der Klient kann die Trainings selbstständig aussuchen und sein Training beginnen.

Über den Button  **Einstellungen** können die Parameter für das Training eingestellt werden. Es öffnet sich eine modulspezifische Parametermaske.

Einstellungen

Poststelle

Hallo! Sie können hier einige Änderungen an dem Training vornehmen.
Wenn Sie unten rechts auf "Speichern" drücken, werden alle Einstellungen für die nächsten Trainings übernommen.

Eingabemodus

Maus
 Touchscreen

Aktueller Schwierigkeitsgrad

Level

Levelwechsel

Konsultationsdauer min
Level aufwärts %
Level abwärts %
Anzahl Poststapel pro Level

Trainingsoptionen

Trainingsende nach Aufgabenstellung
 Mit Übungsaufgabe

Max. Anzeigedauer eines Briefs Level 1 s
Max. Anzeigedauer eines Briefs Level 2 s
Max. Anzeigedauer eines Briefs Level 3 s
Max. Anzeigedauer eines Briefs Level 4 s
Max. Anzeigedauer eines Briefs Level 5 s

Abbildung 19: Parametermaske

3 Anhang

3.1 Versionshistorie

| Version Dokument | Version RehaCom | Datum | Änderungsbeschreibung | Betr. Abs. |
|------------------|-----------------|------------|--|----------------|
| 1.0 | 1.0.0 | 2021-09-16 | <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung und Erstveröffentlichung | |
| 2.0 | 1.1.0 | 2023-04-20 | <ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung der Bedienungsanleitung wg. Umgestaltung des Frontends hinsichtlich Responsiveness | |
| 2.1 | 1.2.0 | 2024-10-24 | <ul style="list-style-type: none"> • Änderung von Versionsnummer und Fußzeile zum Release 1.2 | |
| 2.2 | 1.3.0 | 2024-03-18 | <ul style="list-style-type: none"> • Änderung von Versionsnummer und Fußzeile zum Release 1.2 • Aktualisierung der Systemvoraussetzungen • Änderung Screenshot und Beschreibung „Meine Daten“ | 1.7.1 2.3.5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |