

GUIDE D'UTILISATION SIMPLE

Tire-lait de location Smartpump rechargeable



EENVOUDIGE GEBRUIKSAANWIJZING

Oplaadbare dubbele elektrische borstkolf Smartpump

1 Montage / Montage


Il existe des sets d'expression classiques et des sets d'expression mains libres.
Er zijn klassieke enkelzijdige kolfset en draagbare kolfcups.

Pièces nécessaires au montage / Benodigdheden voor de montage

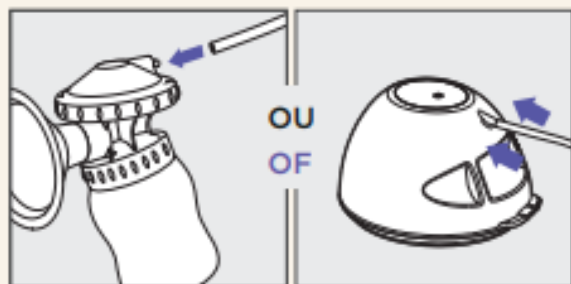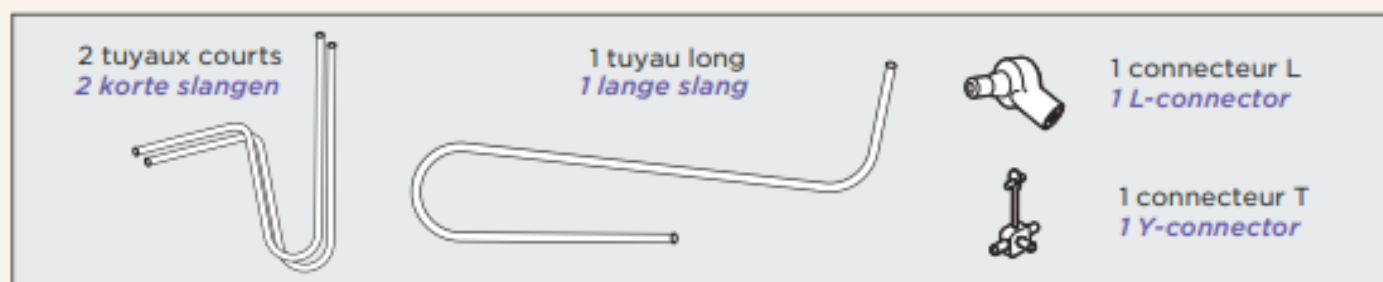

a) Branchez chaque tuyau court aux sets d'expression préalablement assemblés.

a) Bevestig elke korte slang aan de vooraf gemonteerde set.

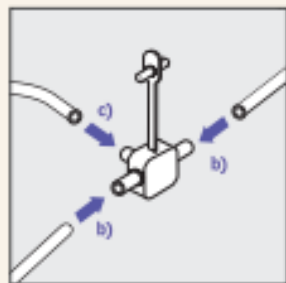


b) Raccordez chaque extrémité des 2 tuyaux courts au connecteur Y

b) Verbind de uiteinden van de 2 korte slangen aan de Y-connector.

c) Raccordez le tuyau long.

c) Bevestig de lange slang.

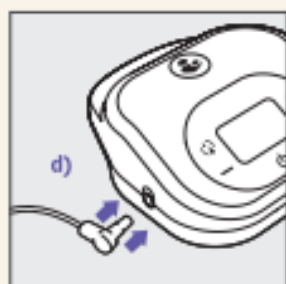


d) Branchez le connecteur L au moteur du tire-lait.

d) Sluit de L-connector aan op de motor van de kolf.

2 Utilisation / Gebruiksaanwijzing

Mise en route / Aan de slag

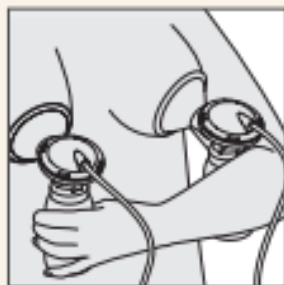

e) Branchez sur secteur ou assurez-vous que la batterie soit chargée.

e) *Sluit de stekker aan op het lichtnet of zorg ervoor dat de batterij is opgeladen.*

f) Positionnez chaque set sur vos seins légèrement dirigés vers le bas.

f) *Bevestig elke set op uw borsten en duw deze zachtjes naar beneden.*

g) Appui long / Démarrez.

g) *Lang duwen om te starten.*

Réglages / Instellingen






Votre tire-lait débute pendant 2 minutes en phase de stimulation, pour basculer à la phase d'expression appuyer sur le bouton.

Uw kolf start automatisch in de stimulatiefase, om over te schakelen naar de expressiefase duw op deze knop.



En phase d'expression, choisissez le mode en appuyant sur le bouton jusqu'à sélectionner le rythme d'expression préféré (3 choix possibles).

Tijdens de expressiefase, kan u de zuigkracht van uw voorkeur kiezen (3 mogelijkheden) door op deze knop te duwen.

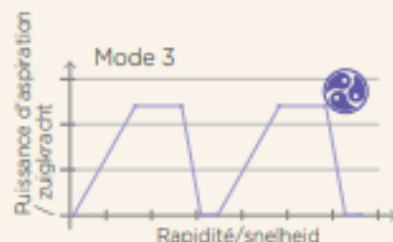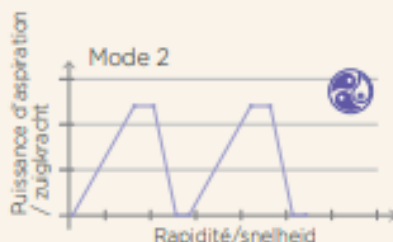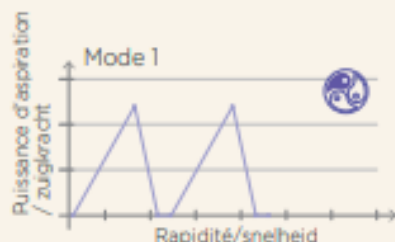

Réglez le niveau d'aspiration avec les boutons +/-.

Regel de zuigkracht met de knoppen +/-.



Terminez la session d'expression.

1 appui = mise en pause / appui long = arrêt de la session

Beëindig de kolfessie.

Merci de vous reporter au manuel d'utilisation fourni avec ce tire-lait pour toute information complémentaire ou mises en garde importantes.
Bedankt om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing te bekijken voor bijkomende informatie of belangrijke waarschuwingen.

Une question ? Merci de contacter support@lansinoh.fr

Een vraag? Gelieve dan contact op te nemen met support@lansinoh.be

Les Laboratoires Lansinoh®



www.lansinoh.fr
www.lansinoh.nl

Lansinoh France SAS | 39 rue de la République | 69600 Oullins, FRANCE
Lansinoh Laboratories, Inc. | Brambroek 23B | 9500 Geraardsbergen, BELGIUM

Réalisation : *Primo* - www.agenceprimo.com - N° 240435 - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins - © Lansinoh - Réf. 000190

