

Smartpump


LE SMARTPUMP REPRODUIT LE RYTHME NATUREL D'UNE TÉTÉE

Comme votre bébé, il fonctionne en deux temps :

- Une phase de **stimulation** avec des aspirations rapides pour déclencher le réflexe d'éjection.
- Une phase **d'expression** avec aspirations plus lentes et plus profondes pour extraire le lait en douceur.

MISE EN ROUTE

Allumez le tire lait avec le bouton **On/Off** 



Le tire lait se programme automatiquement en mode **stimulation**, représenté à gauche de l'écran par les gouttes 

Pendant cette phase, vous pouvez **varier la force d'aspiration** avec les boutons + et - selon votre confort


Cette phase de stimulation est programmée pendant 2 min.







QUAND LE LAIT COMMENCE A COULER


Lorsque le lait commence à s'écouler en plusieurs jets, vous pouvez passer en **phase d'expression** :

- Soit attendre la fin des 2 min programmées et le tire-lait passe tout seul en phase d'expression
- Soit appuyez sur le symbole  pour passer manuellement en mode expression.
- Le symbole  apparaîtra sur le côté droit de l'écran.

Pendant cette phase, vous pouvez varier :

- La **force d'aspiration** avec les boutons + et -
- La **vitesse d'aspiration** en choisissant une des 3 vitesses programmées en appuyant sur le bouton 

	Style d'expression du lait 1	
	Style d'expression du lait 2	
	Style d'expression du lait 3	

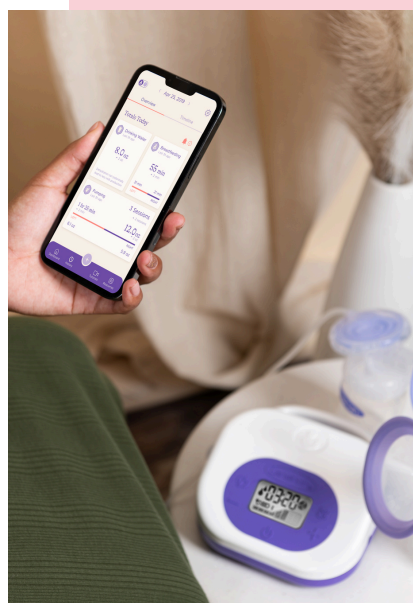

Smartpump

Au cours du tirage, si le lait semble couler plus faiblement ou plus du tout, n'hésitez à repasser en phase de stimulation quelques minutes afin de déclencher un nouveau réflexe d'éjection pour faire de nouveau couler le lait. Dès qu'il recoule, vous pouvez repasser en mode expression pour drainer votre sein.

Vous avez la possibilité de mettre en pause le tirage en appuyant rapidement sur le bouton **On/Off**.

Pour éteindre l'appareil, rester appuyer 5s sur le bouton **On/Off**.

COMMENT CHOISIR LA BONNE VITESSE

Observez la façon dont votre lait coule et les **quantités tirées** avec chacune des **vitesse**s afin de déterminer celle qui sera **la plus efficace**.

MISE EN GARDE


Le Smartpump **mémore** les réglages utilisés lors du **tirage précédent**. Pensez donc à **réduire la force d'aspiration** aussi bien en phase d'expression qu'en phase de stimulation, avant d'éteindre l'appareil, afin d'éviter toute douleur lors de la prochaine utilisation.

BIEN CHOISIR SA TÉTERELLE

Une tétérelle bien ajustée, c'est **plus de confort**, **plus de lait** et **pas de douleurs**.

N'hésitez pas à remesurer régulièrement afin d'ajuster au mieux votre taille de tétérelle.

Téléchargez notre réglette sur la page "[Tout savoir sur les tétérelles](#)".

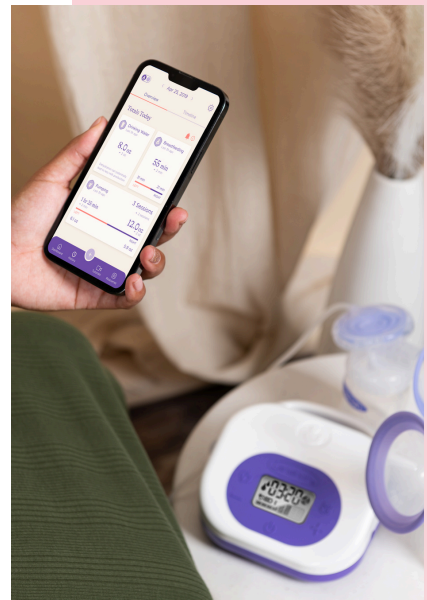

Smartpump

A RETENIR

Un tirage ne doit jamais faire mal.
Adaptez les réglages, changez de taille de tétérrelle si nécessaire et faites confiance à vos sensations. Vous êtes la mieux placée pour déterminer ce qui vous convient le mieux.

CONTACT

Pour toute question, demande d'assistance ou information complémentaire concernant votre tire-lait Smartpump, notre équipe est à votre écoute :

✉ contact@allaitement.fr

🌐 [Réservez un rendez-vous](#)

