



FORMATION

CRYOLIPOLYSE CORPS

ÆSTHETEC

Module 3

EVALUATION ET
SÉLECTION DU CLIENT

ÆSTHETEC

Sommaire du contenu

1. Evaluation préliminaire du client

2. Qualification du client

3. Les zones qui peuvent être traitées
avec la cryolipolyse


4. Les contre-indications et les
facteurs de risque

ÆSTHETEC

A hand holding a pink flower against a dark blue background. The text is overlaid on a semi-transparent white rounded rectangle.

EVALUATION
PRÉLIMINAIRE DU CLIENT

ÆSTHETEC



En réalisant une évaluation préliminaire approfondie, vous serez **en mesure de déterminer si le patient est un bon candidat** pour la Cryolipolyse, de personnaliser le traitement en fonction de **ses besoins et de minimiser les risques potentiels.**

Cette étape est également cruciale pour **établir une relation de confiance** avec le patient et pour offrir **des résultats satisfaisants et cohérents.**


AESTHETEC



Historique médical

Antécédents médicaux : Commencez par obtenir une liste complète des antécédents médicaux du patient, y compris les conditions médicales actuelles et passées, les interventions chirurgicales, les maladies chroniques, les allergies et les traitements médicaux en cours.

ÆSTHETEC




Problèmes de santé spécifiques : Identifiez les problèmes de santé qui pourraient être des contre-indications pour la Cryolipolyse, tels que les maladies auto-immunes, les troubles de coagulation, les problèmes de circulation, les troubles cardiaques, le diabète, etc.

ÆSTHETEC



Médicaments : Demandez au patient s'il prend des médicaments, des suppléments ou des produits à base de plantes. Certains médicaments peuvent influencer la réponse de l'organisme au traitement.

AESTHETEC



Histoire de la peau : Si le traitement est prévu pour une zone spécifique de la peau, demandez au patient s'il a des antécédents de problèmes cutanés, comme des cicatrices, des brûlures, des tatouages, etc.


ÆSTHETEC



Habitudes de vie :


Mode de vie actif : Discutez des habitudes d'exercice et du niveau d'activité physique du patient. Cela peut influencer les résultats de la Cryolipolyse et aider à établir des attentes réalistes.

ÆSTHETEC



Alimentation : Évaluez les habitudes alimentaires du patient, y compris les régimes spéciaux ou les restrictions alimentaires. Discutez des habitudes alimentaires qui peuvent influencer la composition corporelle.

ÆSTHETEC



Consommation d'alcool et de tabac : Demandez au patient s'il consomme de l'alcool ou s'il fume. Cela peut avoir un impact sur la réponse de l'organisme au traitement et sur la guérison.

ÆSTHETEC

**Devis et consentement
éclairé en PDF**



ÆSTHETEC

Module 3

, EVALUATION ET
SÉLECTION DU CLIENT

ÆSTHETEC

A person's back is shown from the shoulders down to the waist, with a pink flower resting on their right shoulder. The background is a soft, out-of-focus light blue. A semi-transparent white rounded rectangle is centered over the image, containing the text.

QUALIFICATION DU CLIENT

ÆSTHETEC

Rappel

La cryolipolyse **ne traite que la graisse sous-cutanée**, et donc **ne peut pas s'attaquer à la graisse viscérale** présente en cas d'obésité.

ÆSTHETEC

Rappel IMC = indice de masse corporelle = poids / taille x taille

Moins de 18,5 = insuffisance pondérale (maigreur)

Entre 18,5 et 25 = corpulence normale

Entre 25 et 30 = surpoids

Entre 30 et 35 = obésité modérée

Entre 35 et 40 = obésité sévère

Plus de 40 = obésité morbide ou massive

ÆSTHETEC



Si IMC supérieur à 25 : il faut conseiller un suivi diététique + cryolipolyse

Si IMC supérieur à 30 = contre-indication

ÆSTHETEC



Il est important de noter que **la cryolipolyse n'est pas une méthode de perte de poids globale**, mais plutôt **une technique de remodelage corporel** pour cibler les zones spécifiques de graisse tenace.

ÆSTHETEC

Module 3

EVALUATION ET
SÉLECTION DU CLIENT

ÆSTHETEC



LES ZONES QUI PEUVENT
ÊTRE TRAITÉES AVEC LA
CRYOLIPOLYSE

ÆSTHETEC

Les zones de traitement :

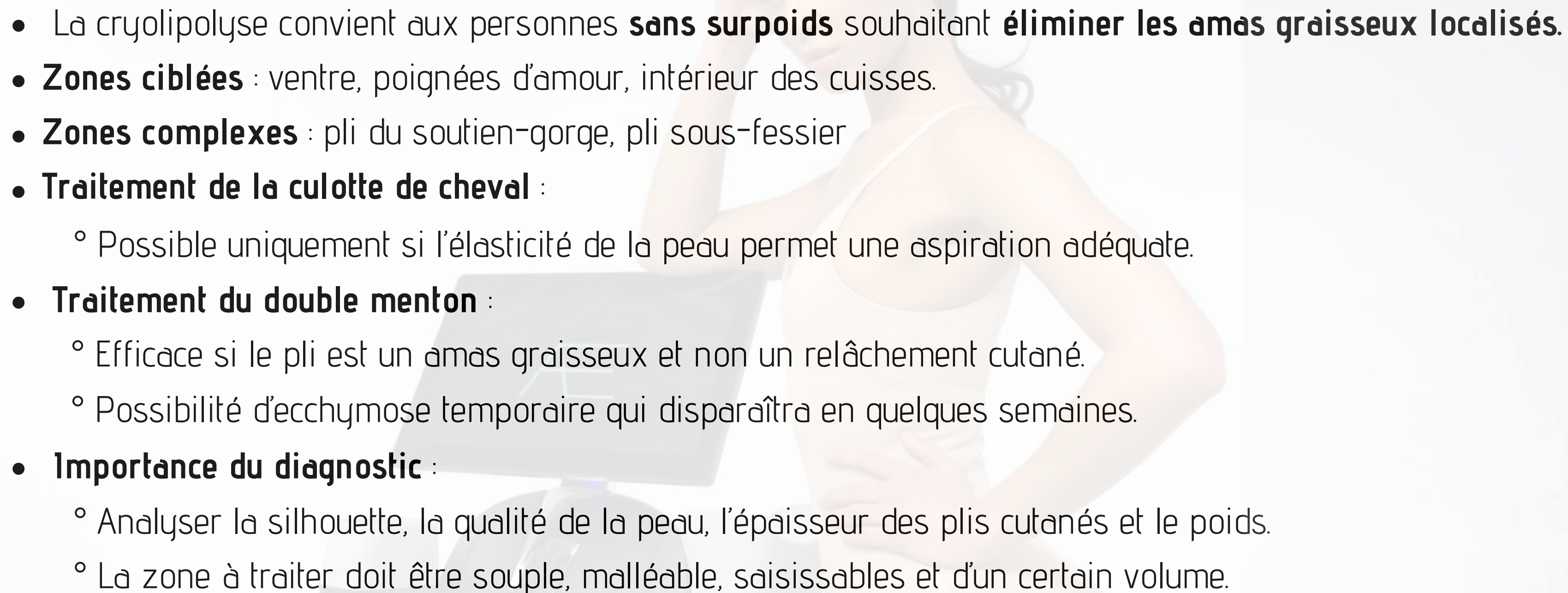
- Le ventre
- Les poignées d'amour
- L'intérieur des cuisses
- L'extérieur des cuisses « Culotte de cheval »
- L'avant et l'arrière des cuisses
- Les fesses
- Les bras
- Les genoux
- Le double menton

ÆSTHETEC



- Menton
- Pli axillaire
- Bras
- Taille
- Ventre & Dos
- Culotte de Cheval
- Intérieur des cuisses
- Genoux

ÆSTHETEC

- 
- La cryolipolyse convient aux personnes **sans surpoids** souhaitant **éliminer les amas graisseux localisés**.
 - **Zones ciblées** : ventre, poignées d'amour, intérieur des cuisses.
 - **Zones complexes** : pli du soutien-gorge, pli sous-fessier
 - **Traitement de la culotte de cheval** :
 - Possible uniquement si l'élasticité de la peau permet une aspiration adéquate.
 - **Traitement du double menton** :
 - Efficace si le pli est un amas graisseux et non un relâchement cutané.
 - Possibilité d'ecchymose temporaire qui disparaîtra en quelques semaines.
 - **Importance du diagnostic** :
 - Analyser la silhouette, la qualité de la peau, l'épaisseur des plis cutanés et le poids.
 - La zone à traiter doit être souple, malléable, saisissables et d'un certain volume.

Module 3

EVALUATION ET
SÉLECTION DU PATIENT

ÆSTHETEC

A person's back is shown with a tattoo on the lower left side. A semi-transparent purple box is overlaid on the upper part of the back, containing the text 'LES CONTRE-INDICATIONS ET LES FACTEURS DE RISQUE'.

LES CONTRE-
INDICATIONS ET LES
FACTEURS DE RISQUE

ÆSTHETEC



Contre-indications

Grossesse et allaitement : La Cryolipolyse n'est pas recommandée pour les femmes enceintes ou qui allaitent en raison de l'incertitude sur les effets potentiels du froid sur le fœtus ou le lait maternel.

ÆSTHETEC

A woman with dark hair tied back, wearing a white tank top, stands next to a piece of medical equipment. The equipment has a large screen and various control panels. The background is a plain, light color.

Troubles de la coagulation : Les personnes atteintes de troubles de la coagulation, comme l'hémophilie, courent un risque accru de saignement et d'ecchymoses après le traitement.

ÆSTHETEC



Maladies auto-immunes : Certaines maladies auto-immunes peuvent affecter la réponse de l'organisme au traitement et augmenter les risques de complications.

ÆSTHETEC



Cryobulinémie : ce sont des protéines présentes dans le sang ayant des fonctions d'anticorps, ces dernières ont la propriété de mourir lorsque la température est inférieure à 37°.

ÆSTHETEC

A woman in a white tank top is standing next to a piece of aesthetic equipment. The equipment has a screen displaying the 'AE' logo. The woman is looking towards the camera with her hand on her hip. The background is a plain, light color.

Syndrome de Raynaud : trouble de la circulation sanguine.

ÆSTHETEC

A woman with dark hair tied back, wearing a white tank top, stands next to a piece of medical equipment. She has her right hand on her hip and her left hand near her head. The equipment has a screen displaying the 'AE' logo. The background is a plain, light color.


Urticaire dû au froid

ÆSTHETEC

A woman in a white bikini is standing next to a piece of medical equipment. The equipment has a monitor displaying the 'AESTHETEC' logo. The woman is looking towards the camera with her hand on her hip. The background is a plain, light color.

Infections actives : La présence d'infections cutanées actives dans la zone de traitement peut augmenter le risque d'infections supplémentaires ou de complications**ons**.

AESTHETEC



Dispositifs implantés : Les stimulateurs cardiaques et autres dispositifs électroniques implantés pourraient être affectés par la Cryolipolyse, ce qui nécessite une évaluation individuelle.

AESTHETEC



Facteurs de risque :

Sensibilité au froid : Certaines personnes peuvent être plus sensibles au froid que d'autres. Il est important d'évaluer la réaction du patient au froid avant de procéder au traitement.

ÆSTHETEC




Réactions cutanées préexistantes : Les patients ayant des problèmes de peau préexistants, comme l'eczéma ou la dermatite, peuvent être plus sujets à des réactions cutanées après la Cryolipolyse.

AESTHETEC



Allergies : Les allergies aux matériaux utilisés dans les appareils de Cryolipolyse doivent être prises en compte pour minimiser les risques de réactions allergiques.

AESTHETEC




Problèmes circulatoires : Les patients souffrant de problèmes circulatoires, tels que les troubles de la circulation sanguine, peuvent avoir un risque accru de complications.

ÆSTHETEC



Niveau de tolérance à la douleur : La Cryolipolyse peut provoquer une sensation intense de froid et d'aspiration. Les patients ayant une faible tolérance à la douleur peuvent trouver le traitement inconfortable.

ÆSTHETEC



Âge : L'âge peut influencer la capacité de la peau à récupérer après le traitement. Les patients plus âgés peuvent avoir une élasticité cutanée réduite, ce qui pourrait influencer les résultats.

ÆSTHETEC