

Surgislip®

Item No. 34571

Surgislip 專門用於潤滑、防鏽及保養手術器械。經臨床測試可被蒸汽完全穿透，適用於蒸氣滅菌、環氧乙烷（EO）氣體滅菌。

Surgislip 是一款無油性、無黏性、無毒性、不含矽油的水溶性礦物油潤滑劑。通過在金屬器械上的鎖合、接縫、切面周緣處形成保護薄膜，防止器械生鏽、腐蝕、和關節卡死。

產品特色

- 適用於機洗、手洗。
- 防止生鏽、腐蝕，延長器械使用壽命。
- 防止器械因生鏽或腐蝕造成不靈活、卡死而對病人造成傷害。
- 保養後器械觸感不油膩，使用更順暢。
- 浸泡可去除非蒸餾水留在器械上的礦物質、殘垢。
- 不影響後續蒸氣或EO氣體滅菌。
- 可防止細菌在潤滑槽中增生，符合感染控制原則。
- 日常固定使用可大幅降低維修和更換器械的費用。
- 使用簡便，經濟實惠。



使用說明

1. 必須在消毒滅菌前使用。
2. 稀釋比例【手洗】1：10（每1000ml水加入100ml本產品）
【機洗】1：200（每1000ml水加入5ml本產品）
3. 充分浸泡，無須沖洗，進行後續消毒程序。

注意事項

1. 避免長時間接觸皮膚。
2. 不可食用。
3. 遠離兒童。

包裝規格：4L/桶、4桶/箱
MADE IN THE USA