

內視鏡床側預處理清洗包

床側預處理清洗包是一款用於去除內視鏡外管及內管腔上的合成脂肪和大塊污染物的拋棄式袋裝產品。

Item No. 345EBK - 250ml

Item No. 345EBK500 - 500ml



床側預處理清洗包內含內視鏡外管清洗海綿和酵素多酶清潔劑溶液。清洗海綿貼合內視鏡外管，便於去除大塊污染物；酵素多酶清潔劑溶液含生物膜清潔技術，用於抽吸管腔，在去除合成脂肪的同時，作用於包裹生物膜的不溶性多醣，使得高效力的消毒劑或液體化學滅菌劑能夠有效去除所有生物負荷和生物膜。

內視鏡床側預處理清洗包使得清潔更加容易，可以有效避免內視鏡表面污染物在運輸至再處理區域之前乾涸。

產品特點：

- 接觸立刻起效，避免污染物在內視鏡表面乾涸
- 去除大塊污染物，包括合成脂肪
- 酵素多酶清潔劑溶液採用蛋白酶、澱粉酶、脂肪酶和專利酶等增效配方
- 設計獨特，適用於所有內視鏡：軟/硬式
- 不會損壞金屬、塑膠、橡膠螺旋管、玻璃或鏡子
- pH中性、非研磨材料、100%可生物降解和易於沖洗
- 獨立包裝，一次性使用，避免交叉污染的風險
- 包裝袋底部寬大、穩定，預防傾斜

使用說明：

1. 內視鏡診療結束之後，立即使用內視鏡外管清洗泡綿擦拭插入管外表面。
2. 將內視鏡的末端放入預處理清洗包裝中，通過器械處置/吸引通道吸取多酶清潔劑溶液，持續30秒。
3. 根據內視鏡製造廠商的說明，向空氣/水通道內注入水和空氣。
4. 使用後的清洗泡綿和空的包裝袋應丟棄在醫療廢棄物箱或進行回收。不能將空的包裝袋用於其它用途。
5. 將內視鏡放置在標示為“污染”的內視鏡袋/容器內，運輸至再處理區域。

