

Endozyme® AW Triple Plus® with A.P.A.

Item No. 34521-29

含有蛋白酶、澱粉酶、脂肪酶、糖酶和專有酶與 A.P.A. 的獨特配方。A.P.A. 是 Ruhof Healthcare 開發的最新酶學突破，可大幅提高蛋白酶活性，從而更快、更徹底地滲透到手術器械和內視鏡上難以到達的地方。推薦用於所有儀器的再處理——從最難清潔的儀器到最精細的儀器。



特徵

- 高級蛋白水解作用—增加蛋白酶活性。
- 專有的酵素混合物，旨在去除所有生物負荷—血液、碳水化合物、蛋白質、多糖、脂肪、油、尿酸和其他含氮化合物。
- 可有效預防生物膜形成，具有防鏽效能。
- 生物活性添加劑加速液化和溶解過程。
- 可安全用於所有手術器械和內視鏡/不會傷害任何金屬、塑膠、橡膠或波紋管。
- 低泡、中性 pH 值、無磨損、100% 可生物降解。

使用說明

1. 稀釋比例為 1：250（每 1000ml 水加入 4ml 本產品）。
2. 將器械拆卸至最小單位，管腔類器械需先清洗外部，再以管道抽吸方式沖洗內部。
3. 充分浸泡至少 2 分鐘以去除所有有機污垢。
4. 用自來水、蒸餾水或無菌水徹底沖洗。

注意事項

1. 避免長時間接觸皮膚。
2. 未使用的產品放置在乾燥處。
3. 避免高溫潮濕的環境。
4. 不可食用。
5. 遠離兒童。

包裝規格：4L/桶、4桶/箱
MADE IN THE USA