

Making the improbable possible.

Câble d'entrée du moniteur TC-510

Mode d'emploi

	Définition des symboles
Λ	Attention, consulter les documents d'accompagnement
쎈	Date de fabrication
REF	Numéro de référence
SN	Numéro de série
LOT	Code de lot
C€	Déclaration de conformité de l'UE
UK	Marquage UK Conformity Assessed
X	Déchets d'équipements électriques et électroniques

Description du dispositif

Millar, LLC. propose un éventail de câbles de sortie TC-510 pour l'unité de contrôle de pression qui sont compatibles avec divers moniteurs et enregistreurs. Un câble à extrémité libre (N° réf. M.I. : 850-3008) est disponible pour les utilisateurs souhaitant câbler le connecteur d'entrée correspondant à leur moniteur.


Nettoyage

Essuyer le câble et les connecteurs avec de la gaze ou une serviette en papier douce humidifiée. Si les surfaces sont très sales, le câble peut être trempé dans une solution d'Alconox® ou tout autre détergent doux.

ATTENTION: Ne pas immerger les connecteurs électriques dans un liquide.

Contrôle de routine

La présence de liquide conducteur dans les connecteurs de câbles peut provoquer un fonctionnement erratique et une éventuelle corrosion des fils à l'intérieur des connecteurs. Les broches des connecteurs doivent être inspectées régulièrement pour détecter tout signe de corrosion.

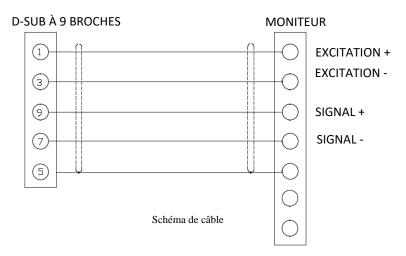

Garantie limitée Millar

Millar, LLC garantit que tous ses câbles sont exempts de défauts de fabrication et de matériau au moment de l'expédition à l'acheteur d'origine.

Millar exclut par les présentes toutes les garanties non stipulées dans le présent document, expresses ou implicites, découlant notamment de l'application de la loi, de la conduite habituelle ou de la pratique commerciale, y compris, sans toutefois s'y limiter, toute garantie implicite de conformité ou de qualité marchande.

Étant donné que la manipulation, le stockage, le nettoyage et la stérilisation du produit, ainsi que les facteurs relatifs au diagnostic du patient, au traitement, aux procédures de cathétérisme et toutes les autres questions hors du contrôle de Millar affectent directement le produit et les résultats obtenus par son utilisation, Millar ne saurait être tenue responsable des pertes, dommages ou dépenses accessoires ou consécutifs résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Siège mondial

Millar, LLC.

11950 N. Spectrum Blvd.

Pearland, Texas 77047 États-Unis

Tél.: +1 832-667-7000 ou 800-669-2343 (aux États-Unis)

Fax: +1 713-714-8498
E-mail: info@millar.com
Site Web: millar.com

Distribution des produits Millar dans le monde

Millar, LLC a un réseau de distributeurs agréés dans la plupart des pays du monde. Pour de plus amples informations sur le distributeur Millar dans votre pays, contacter le service à la clientèle Millar à notre siège social de Houston, au Texas.

EC REP

Emergo Europe Westervoortsedijk 60 6827 AT Arnhem Pays-Bas

Promoteur en Australie

Emergo Australia Level 20 Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000

Australie

Personne responsable au R.-U.

Emergo Consulting (UK) Limited c/o

Cr360 – UL International Compass House, Vision Park

Histon

Cambridge CB24 9BZ

Royaume-Uni

Pour des raisons pratiques, Millar propose des modes d'emploi traduits dans d'autres langues. Se rendre sur notre site Web eifu.millar.com (aller à la rubrique « Manuals and Guides » [Manuels et guides]) pour créer un compte et suivre les étapes d'inscription pour consulter les modes d'emploi dans d'autres langues. Les documents sont au format PDF et peuvent être téléchargés à l'aide du logiciel Adobe Acrobat Reader gratuit. La configuration minimale requise pour le logiciel Adobe Acrobat Reader est un système d'exploitation Windows (Windows 8 ou versions ultérieures) ou macOS (v10.14 ou versions ultérieures).





© 2025 Millar, LLC. Tous droits réservés.

Millar est une marque déposée de Millar, LLC.

Les noms de produits et de sociétés utilisés sont des marques ou des noms commerciaux de leurs sociétés respectives.

N° réf. M.I.: 004-1340 Rév. M