



Making the
improbable possible.

TC-510-Monitor-Eingangskabel

Gebrauchsanweisung

Definition der Symbole



Achtung, Begleitdokumente beachten



Herstellungsdatum

REF

Bestellnummer

SN

Seriennummer



Chargennummer



EU-Konformitätserklärung



UK-Konformität geprüft



Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Produktbeschreibung

Millar, LLC bietet ein Sortiment von Ausgangskabeln für den Anschluss der Druck-Kontrolleinheit TC-510 an unterschiedliche Monitore und Aufzeichnungsgeräte an. Ein nicht terminiertes Kabel (M.I.-T/N: 850-3008) wird angeboten, damit der Benutzer seinen Steckverbinder dem jeweiligen Monitoreingang entsprechend verdrahten kann.


Reinigung

Wischen Sie das Kabel und die Steckverbinder mit weichem, feuchtem Mull oder einem feuchten Tuch ab. Bei starker Verschmutzung kann das Kabel in einer Lösung mit Alconox® oder einem sonstigen milden Reinigungsmittel eingeweicht werden.

ACHTUNG: Den elektrischen Steckverbinder nicht untertauchen.

Routinemäßige Inspektion

Bei Eindringen von leitfähiger Flüssigkeit in die Kabel-Steckverbinder kann es zu Unregelmäßigkeiten beim Betrieb und potenziell zu Korrosion der Drähte in den Steckverbindern kommen. Die Stifte der Steckverbinder müssen routinemäßig auf Korrosion überprüft werden.

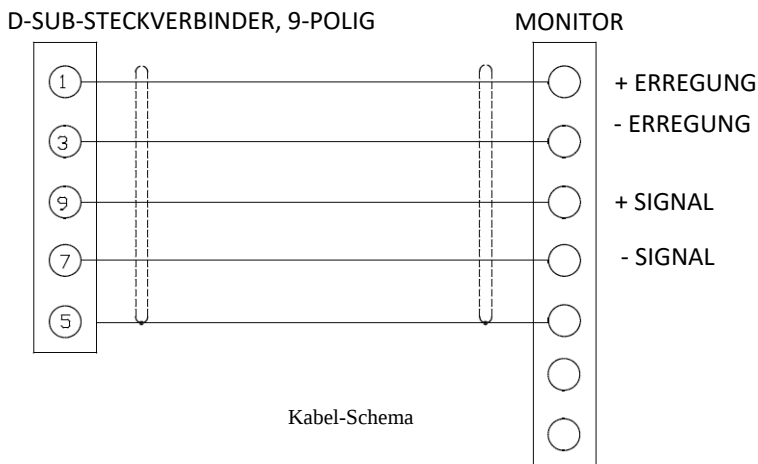

Eingeschränkte Garantie von Millar

Millar, LLC gewährleistet, dass sämtliche Kabel des Unternehmens zum Zeitpunkt des Versands an den Erstkäufer frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind.

Millar schließt hiermit ausdrücklich jegliche weitere hier nicht angegebene Gewährleistung aus, ob ausdrücklich, stillschweigend oder kraft Gesetzes oder im Zusammenhang mit Handelsbrauch oder aus anderen Gründen, einschließlich jeglicher stillschweigender Gewährleistungen der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Marktgängigkeit.

Da die Handhabung, Lagerung, Reinigung und Sterilisierung des Produkts sowie Faktoren im Zusammenhang mit der Diagnose von Patienten, Behandlungsmaßnahmen, Katheterisierungsverfahren und anderen Aspekten, die außerhalb der Kontrolle von Millar liegen, direkte Auswirkungen auf das Produkt und die damit erzielten Ergebnisse haben können, übernimmt Millar keine Haftung für zufällige oder sich in Folge ergebende Verluste, Schäden oder Kosten, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.

Weltweiter Hauptsitz



Millar, LLC.

11950 N. Spectrum Blvd.

Pearland, Texas 77047 USA

Telefon: +1 832-667-7000 oder 800-669-2343 (in den USA)

Fax: +1 713-714-8498

E-Mail: info@millar.com

Website: millar.com

Weltweiter Vertrieb von Millar

Millar, LLC verfügt in den meisten Ländern der Welt über ein Netzwerk autorisierter Vertriebshändler. Informationen über den Vertriebshändler für Ihr Land erhalten Sie von der Millar-Kundendienstabteilung an unserem Hauptsitz in Houston, Texas, USA.



Emergo Europe

Westervoortsedijk 60

6827 AT Arnhem

Niederlande

Australischer Sponsor

Emergo Australia

Level 20 Tower II

Darling Park

201 Sussex Street

Sydney, NSW 2000

Australien

Bevollmächtigter für das Vereinigtes Königreich

Emergo Consulting (UK)

Limited c/o

Cr360 – UL International

Compass House, Vision Park

Histon

Cambridge CB24 9BZ

Vereinigtes Königreich

Millar stellt auch übersetzte Gebrauchsanweisungen in verschiedenen Sprachen bereit. Besuchen Sie unsere Website unter eifu.millar.com (gehen Sie zu 'Manuals and Guides'), um sich für ein Konto anzumelden, und folgen Sie dem Registrierungsprozess, um Zugang zu Gebrauchsanweisungen in weiteren Sprachen zu erhalten. Die Unterlagen liegen im PDF-Format vor und können mit dem kostenlos herunterladbaren Adobe Acrobat Reader gelesen werden. Die Systemanforderungen für Adobe Acrobat Reader sind das Windows-Betriebssystem (Windows 8 oder höher) oder macOS (v10.14 oder höher).



© 2025 Millar, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Millar ist eine eingetragene Marke von Millar, LLC.

Die Namen von Produkten und Unternehmen sind Marken- oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen.

M.I.-T/N: 004-1340 Rev. M