

SKEMA®FORM

CARRELLI POLIFUNZIONALI COMPONIBILI "EOLO"

MANUALE DI ISTRUZIONI

INDICE

1. CODICI.....	PAG.3
2. INTRODUZIONE.....	PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO	PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.3
5. AVVERTENZE GENERALI	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.4
7. DESCRIZIONE GENERALE	PAG.5
7.1 Vista e descrizione delle parti CI100B-CI105B-CI110B-CI115B-CI122B-CI123B ..	pag. 5
7.2 Vista e descrizione delle parti CI120B-CI125B-CI130B.....	pag. 6
8. MONTAGGIO	PAG.6
8.1 Istruzioni di montaggio CI100B-CI105B-CI110B-CI115B-CI122B-CI123B.....	pag. 6
8.2 Istruzioni di montaggio CI120B-CI125B-CI130B	pag. 8
9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....	PAG.10
10. PULIZIA E DISINFEZIONE	PAG.10
10.1 Pulizia.....	pag. 10
10.2 Disinfezione	pag. 10
11. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	PAG.10
12. ACCESSORI	PAG.10
13. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.11
13.1 Dimensioni e peso carrelli CI100B-CI105B-CI110B-CI115B-CI122B-CI123B ...	pag. 11
13.2 Dimensioni e peso carrelli CI120B-CI125B-CI130B	pag. 12
13.3 Specifiche tecniche.....	pag. 12
14. GARANZIA.....	PAG.13
15. RIPARAZIONI	PAG.13
15.1 Riparazione in garanzia.....	pag. 13
15.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag. 13
15.3 Prodotti non difettosi	pag. 13
16. RICAMBI.....	PAG.13
17. CLAUSOLE ESONERATIVE	PAG.13

CE Dispositivo medico di classe I

REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CODICI

- CI100B** Carrello con 1 colonna H705mm, 1 maniglia ed 1 ripiano 300x400mm-Portata Max 20kg
CI105B Carrello con 1 colonna H705mm, 1 maniglia ed 1 ripiano 350x400mm-Portata Max 20kg
CI110B Carrello con 1 colonna H705mm, 1 maniglia ed 1 ripiano 300x400mm-Portata Max 20kg
CI115B Carrello con 1 colonna H705mm, 1 maniglia ed 1 ripiano 350x400mm-Portata Max 20kg
CI120B Carrello con 2 colonne H705mm, 2 maniglie e 2 ripiani 350x400mm-Portata Max 30kg
CI122B Carrello con 1 colonna H705mm, 1 maniglia ed 1 ripiano 350x400mm-Portata Max 20kg
CI123B Carrello con 1 colonna H905mm, 1 maniglia ed 1 ripiano 350x400mm-Portata Max 20kg
CI125B Carrello con 2 colonne H905mm, 2 maniglie e 2 ripiani 350x400mm -Portata Max 30kg
CI130B Carrello con 2 colonne H905mm, 2 maniglie e 2 ripiani 350x400mm -Portata Max 30kg

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il carrello polifunzionale componibile "EOLO" della linea SKEMAFORM by Moretti. Il loro design e la loro qualità garantiscono il massimo comfort, la massima sicurezza ed affidabilità. I carrelli polifunzionali componibili "EOLO" della linea SKEMAFORM by Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze. Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'ausilio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente. Il presente manuale fa riferimento a tutti i modelli di carrelli polifunzionali componibili "EOLO" della linea SKEMAFORM. Consultare solo le istruzioni relative al modello da voi scelto.

3. DESTINAZIONE D'USO

Il carrello polifunzionale componibile "EOLO" della linea SKEMAFORM è un dispositivo destinato al supporto ed alla movimentazione di attrezzature mediche ed elettromedicali.

**ATTENZIONE!**

- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA, e facenti parte della famiglia CARRELLI MEDICALI sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017.

A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.

6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE GENERALI

Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale


- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili e comunque non superiori a 10 anni
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini
- Non superare il carico sui ripiani indicato nel presente manuale per evitare deformazioni e rotture degli stessi
- Prima di utilizzare il dispositivo, controllare sempre che le viti di montaggio siano ben strette
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Codice prodotto
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marchio CE
	Fabbricante
	Lotto di produzione
	Leggere il manuale per le istruzioni
	Dispositivo Medico
	Condizioni di smaltimento

7. DESCRIZIONE GENERALE


7.1 Vista e descrizione delle parti CI100B-CI105B-CI110B-CI115B-CI122B-CI123B
(Carrelli polifunzionali ad 1 colonna, 1 ripiano ed 1 maniglia)

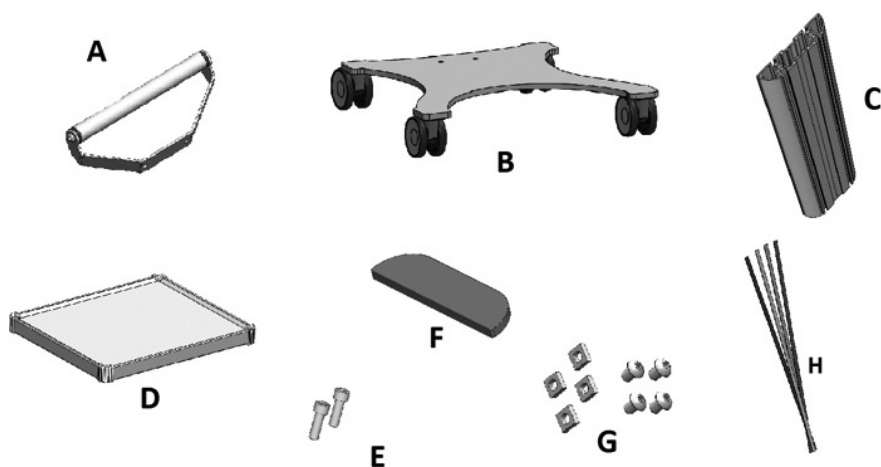

Elenco delle parti

- A. Maniglia di spinta (1 pz)
- B. Base con ruote piroettanti (1 pz)
- C. Colonna in alluminio (1 pz)
- D. Ripiano con paracolpi angolari (1pz)
- E. Viti per fissaggio colonna (2 pz)
- F. Tappo in plastica per colonna (1 pz)
- G. Viti e dadi per montaggio accessori (4 pz)
- H. Strisce colorate per personalizzazione carrello (8pz)

7.2 Vista e descrizione delle parti CI120B-CI125B-CI130B (Carrelli polifunzionali a 2 colonne, 2 ripiani e 2 maniglie)

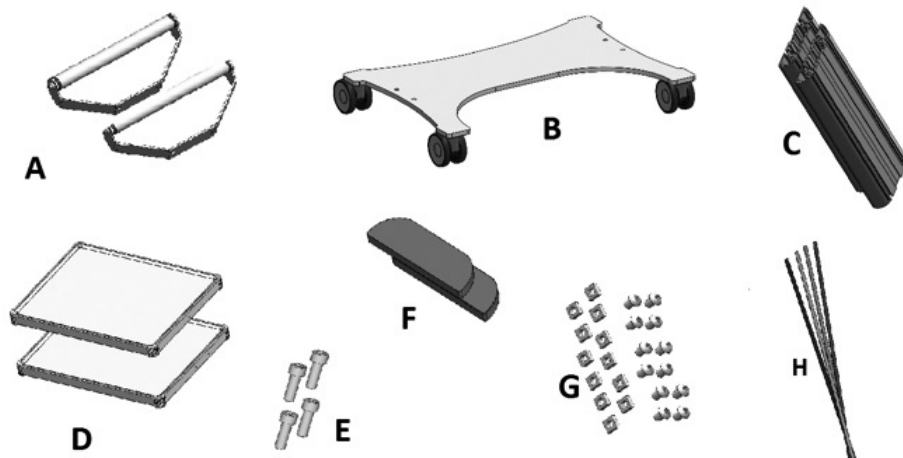

Elenco delle parti

- A. Maniglie di spinta (2 pz)
- B. Base con ruote piroettanti (1 pz)
- C. Colonne in alluminio (2 pz)
- D. Ripiani con paracolpi angolari (2pz)
- E. Viti per fissaggio colonna su base (4 pz)
- F. Tappi in plastica per colonna (2 pz)
- G. Viti e dadi per montaggio accessori (12 pz)
- H. Strisce colorate per personalizzazione carrelli (16 pz)


8. MONTAGGIO




ATTENZIONE!

Eseguire queste operazioni con l'ausilio di un altro operatore, prestando molta attenzione ad evitare lesioni fisiche e/o danni alle cose durante il montaggio


8.1 Istruzioni di montaggio CI100B-CI105B-CI110B-CI115B-CI122B-CI123B (Carrelli polifunzionali ad 1 colonna, 1 ripiano ed 1 maniglia)

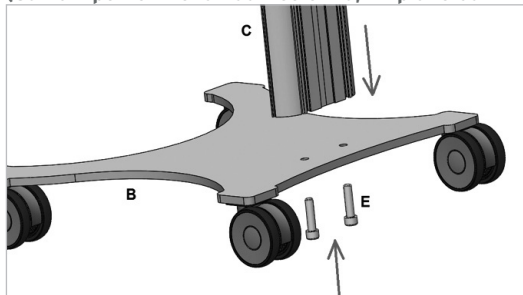


1. Disporre la base del carrello (rif.B) su un piano orizzontale e posizionare la colonna (rif.C) come in figura;
2. Utilizzare le viti (rif.E-2pz) per avvitare saldamente la colonna alla base;

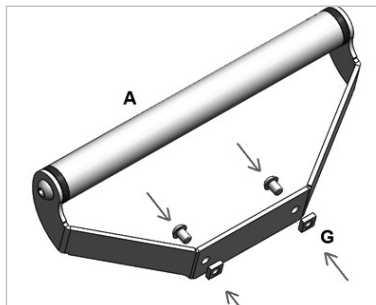


3. Preparare la maniglia (rif.A) per il montaggio alla colonna con viti e dadi (rif.G-2pz), avvitare senza stringere fino a circa metà del gambo della vite;

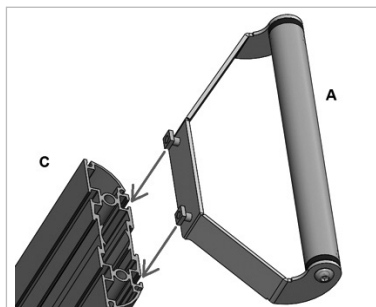


4. Inserire la maniglia così preparata nelle apposite scanalature della colonna (rif.C);
5. Posizionare la maniglia e stringere le viti (rif. G) per un saldo posizionamento all'altezza desiderata;

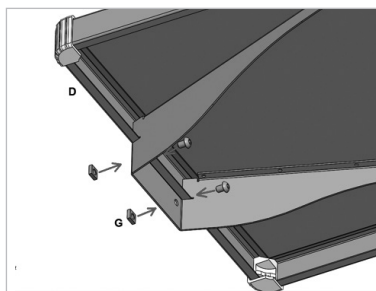


6. Preparare il ripiano (rif.D) per il montaggio alla colonna con viti e dadi (rif G-2pz), avvitare senza stringere fino a circa metà del gambo della vite;

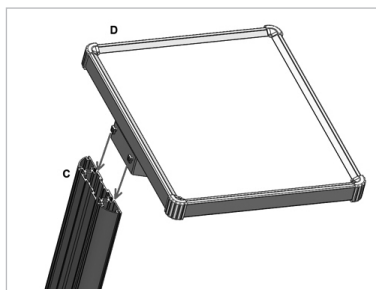

7. Inserire il ripiano così preparato nelle apposite scanalature della colonna (rif.C);
8. Posizionare il ripiano e stringere le viti (rif. G) per un saldo posizionamento all'altezza desiderata;

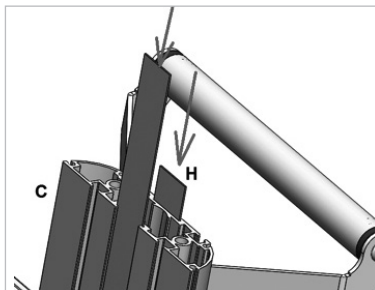


9. A questo punto è possibile personalizzare il proprio carrello inserendo le strisce colorate (rif. H) nelle scanalature centrali delle colonne (rif C)

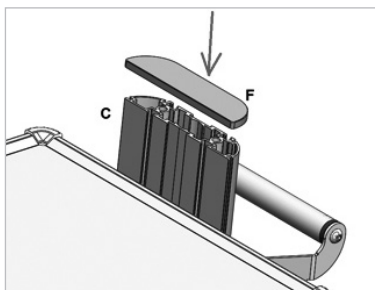


10. Con una leggera pressione, inserire il tappo (rif.F) nella estremità libera della colonna (rif.C)
11. A questo punto il vostro carrello polifunzionale "EOLO" è montato e pronto all'uso.


8.2 Istruzioni di montaggio CI120B-CI125B-CI130B (Carrelli polifunzionali a 2 colonne, 2 ripiani e 2 maniglie)

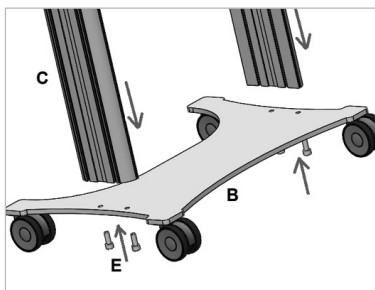


1. Disporre la base del carrello (rif.B) su un piano orizzontale e posizionare la colonna (rif.C) come in figura;
2. Utilizzare le viti (rif.E-2pz) per avvitare saldamente la colonna alla base;

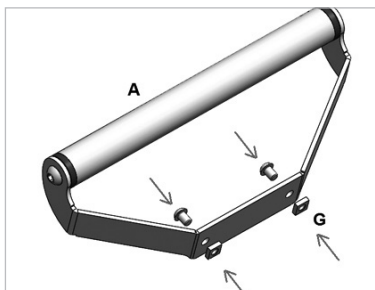


3. Preparare la maniglia (rif.A) per il montaggio alla colonna con viti e dadi (rif.G-2pz), avvitare senza stringere fino a circa metà del gambo della vite;

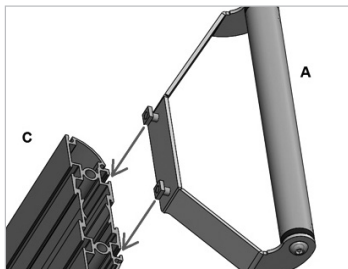


4. Inserire la maniglia così preparata nelle apposite scanalature della colonna (rif.C);
5. Posizionare la maniglia e stringere le viti (rif. G) per un saldo posizionamento all'altezza desiderata;

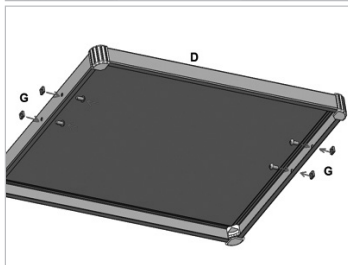


6. Preparare il ripiano (rif.D-2pz) per il montaggio alla colonna con viti e dadi (rif G-4pz), avvitare senza stringere fino a circa metà del gambo della vite;

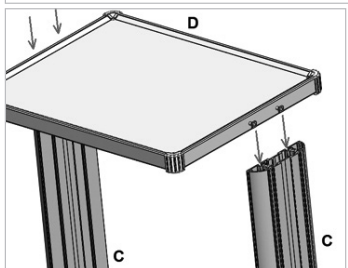

7. Inserire il ripiano così preparato nelle apposite scanalature della colonna (rif.C-2pz);
8. Posizionare il ripiano e stringere le viti (rif. G) per un saldo posizionamento all'altezza desiderata;

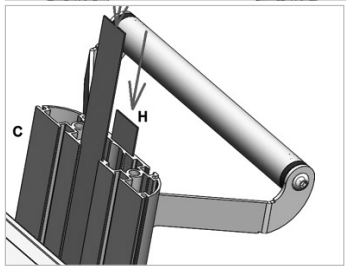

9. A questo punto è possibile personalizzare il proprio carrello inserendo le strisce colorate (rif. H) nelle scanalature centrali delle colonne (rif C)

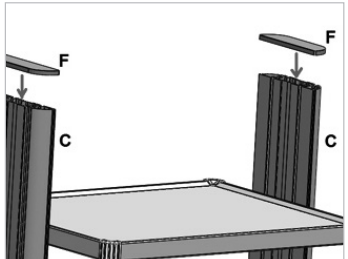

10. Con una leggera pressione, inserire i tappi (rif.F-2pz) nelle estremità libere delle colonne (rif.C-2pz)
11. A questo punto il vostro carrello polifunzionale "EOLO" è montato e pronto all'uso.

9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Prima di ogni uso verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose
- Prima di ogni uso verificare il corretto assemblaggio del dispositivo, con particolare attenzione alle viti di collegamento della/e colonna/e alla base e di quelle tra ripiani/accessori e colonna/e
- Per la movimentazione del carrello utilizzare esclusivamente l'apposita maniglia di spinta fornita
- Non superare mai il carico per ripiano indicato nel presente manuale
- Quando il carrello non è in movimento, assicurarsi che i freni di stazionamento siano azionati correttamente

10. PULIZIA E DISINFEZIONE

10.1 Pulizia

Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto, o con acqua tiepida e sapone neutro.



ATTENZIONE!

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcol, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

10.2 Disinfezione

Se necessario, effettuare la disinfezione del prodotto utilizzando un delicato detergente disinfettante.

11. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO




In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati

12. ACCESSORI

- CIA100** Ripiano carrelli Moretti 400x300mm con attacco a sbalzo, per CI100B-CI105B-CI110B-CI115B-CI122B-CI123B
- CIA102** Ripiano carrelli Moretti 400x350mm con attacco a sbalzo, per CI100B-CI105B-CI110B-CI115B-CI122B-CI123B
- CIA104** Ripiano carrelli Moretti 400x350mm con attacco laterale, per CI120B
- CIA106** Ripiano carrelli Moretti 500x400mm con attacco laterale, per CI125B-CI130B
- CIA110** Cassetto per carrelli Moretti medio, per CI100B-CI105B-CI110B-CI115B-CI122B-CI123B
- CIA120** Ripiano Cassetto per carrelli Moretti grande, per CI120B-CI125B-CI130B
- CIA150** Cestello in filo per carrelli Moretti, per tutta la gamma CI1XXX
- CIA152** Asta da flebo in alluminio, per tutta la gamma CI1XXX
- CIA154** Asta da flebo in acciaio inox, per tutta la gamma CI1XXX
- CIA156** Portabombole per carrelli moretti; per tutta la gamma CI1XXX
- CIA158** Supporto monitor per carrelli Moretti, per tutta la gamma CI1XXX

13. CARATTERISTICHE TECNICHE


13.1 Dimensioni e peso carrelli CI100B-CI105B-CI110B-CI115B-CI122B-CI123B

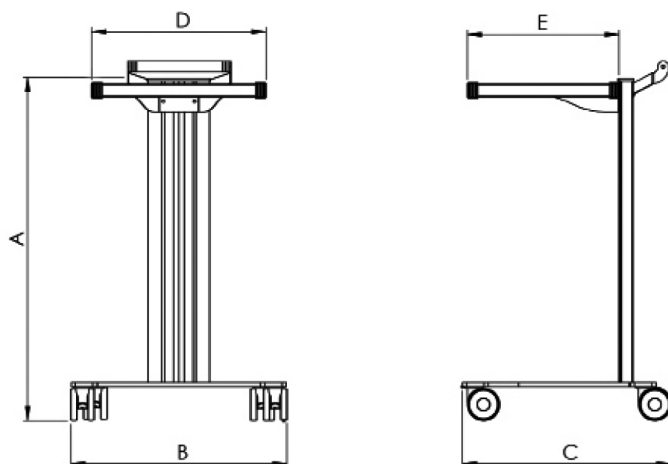

Immagini a scopo ILLUSTRATIVO

Misure in mm							
Codici prodotto	A	B	C	D	E	Peso prodotto (kg)	Portata massima (kg)
CI100B	800	500	500	400	300	14	20 kg
CI105B					350	14,5	
CI110B	820	480	500	400	300	10	
CI115B					350	10,5	
CI122B	800	630	500	400	350	20	
CI123B	1000					21	

13.2 Dimensioni e peso carrelli CI120B-CI125B-CI130B

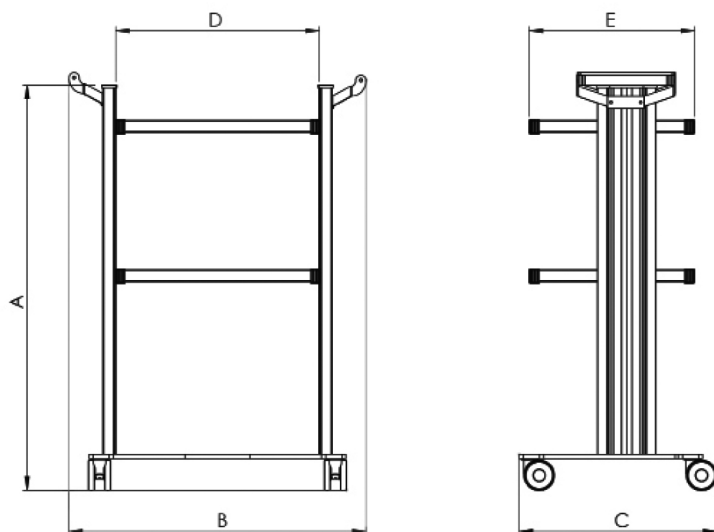

Immagini a scopo ILLUSTRATIVO

Misure in mm							
Codici prodotto	A	B	C	D	E	Peso prodotto (kg)	Portata massima (kg)
CI120B	800	630	500	400	350	23,5	30 kg
CI125B	1000	730	500	500	400	25	
CI130B	1020	730	550	500	400	18	

13.3 Specifiche tecniche

Colonna	Alluminio verniciato
Base e ripiano	Acciaio verniciato a polveri
Maniglia	Acciaio verniciato a polvere e tubo in alluminio anodizzato
Ruote	Ø 75mm piroettanti (2pz) e con freno (2pz)
Angolari	PLA
Strisce colorate	Blu, gialla, rossa, verde per personalizzare il carrello

Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni altezza

14. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

15. RIPARAZIONI

15.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

15.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

15.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

16. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

17. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**CERTIFICATO DI GARANZIA****Prodotto** _____**Acquistato in data** _____**Rivenditore** _____**Via** _____ **Località** _____**Venduto a** _____**Via** _____ **Località** _____

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**MADE IN ITALY**