

leep

RING 1

Deutsch

LEEP RING 1 PRODUKTINFORMATIONEN (DE)

Vielen Dank, dass Sie sich für Leep Ring 1 entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch und die Sicherheitshinweise, um das Beste aus Ihrem neuen Smart Ring herauszuholen.

TECHNISCHE DATEN

- BETRIEBSTEMPERATURBEREICH: -20 -- 50°C / 4--122°F
- BATTERIETYP: Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- BATTERIELAUFZEIT: 10 Tage (die Batterielaufzeit kann je nach Nutzung variieren)
- LADEZEIT: 1,5 Stunden (Ring)
- LADEZEIT: 2,5 Stunden (Etui)
- LADETEMPERATUR: min 0°C / 32°F - max 45°C / 113°F
- BATTERIEKAPAZITÄT: 21,5 mAh, 0,079Wh (Ring)
- BATTERIEKAPAZITÄT: 500 mAh, 1,85Wh (Etui)
- EINGANG: 5V/1A, AUSGANG: 5V/16mA
- BLUETOOTH-VERSION: 5.4
- BLUETOOTH-REICHWEITE: ≤10 m
- HF-SCHNITTSTELLENFREQUENZBEREICH: 2402-2480 GHz
- MAX. AUSGANGSLEISTUNG: 2,5mW

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produkt: Wellness-Ring

Marke: Leep

Modellnummer: Leep Ring 1

Hersteller: Leep Health Ltd., 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,
Vereinigtes Königreich, WC2H 9JQ

Website: www.leephealth.com

E-Mail: support@leephealth.com

LEEP RING 1 VERWENDUNG (DE)

Leep Ring 1 ist für Ihre täglichen Aktivitäten konzipiert. Leep Ring 1 ist wasserbeständig (IP68) bis zu 50m / 164ft.

Wir empfehlen, den Ring regelmäßig zu reinigen und trocken zu halten, um eine gute Funktionalität des Rings zu gewährleisten und potenzielle Hautreizungen zu reduzieren. Sie können den Ring mit einem feuchten Tuch abwischen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Ring vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Das Leep Ring 1 Ladeetui ist nicht wasserbeständig. Verwenden oder lagern Sie das Ladeetui nicht für längere Zeit in feuchten Umgebungen wie einem Badezimmer.

Der Leep Ring 1 kann bei normalem Gebrauch zerkratzt werden und kann bei direktem Kontakt mit weichen Materialien (Metall, Schmuck oder anderen Gegenständen) selbst Kratzer verursachen, wenn er in engen Kontakt kommt.

Die Leuchtdioden (LED) im Produkt befinden sich im sichtbaren Farbbereich. Sie sind sicher für die Person, die das Produkt trägt, und andere Personen in der Umgebung.

LEEP APP

Die Leep App ist im App Store und bei Google Play verfügbar. Der Leep Ring ist kompatibel mit iPhones mit iOS 14 oder höher und Android-Geräten mit Android 6 oder höher.

SICHERHEIT

Verschlüsselte Bluetooth-Kommunikation zwischen Leep Ring 1 und Leep App.

WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN:

Anweisungen finden Sie unter leephealth.com/support. Führen Sie immer ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durch, bevor Sie den Ring entsorgen.

GARANTIEAUSSCHLUSS:

leephealth.com/terms-of-use

SUPPORT UND HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:


Wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihres Leep Ring 1, unserer Leep App oder unserer Online-Dienste haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Unsere häufig gestellten Fragen (FAQs) finden Sie unter leephealth.com/support.

Für Unterstützung können Sie uns auf leephealth.com/support oder über die Leep App kontaktieren.

Sie können auf die Datenschutzrichtlinien von Leep unter leephealth.com/privacy-policy zugreifen.


LEEP RING 1 LADEANLEITUNG (DE)

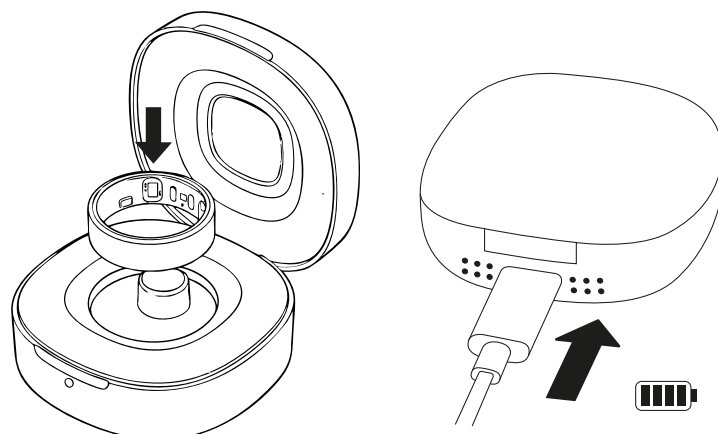

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Ladekabel oder ein anderes zertifiziertes USB-Typ-C-Stromkabel mit dem Ladeetui.
2. Verbinden Sie das USB-Typ-C-Ladekabel mit einer externen 5V/1A-Stromquelle. Vermeiden Sie das Laden des Ladeetuis mit Schnellladegeräten, da diese die Batterielebensdauer beeinträchtigen können.
3. Wenn die Stromversorgung angeschlossen ist und das Ladeetui vollständig geladen ist, leuchtet die grüne Anzeige an der Vorderseite des Etuis dauerhaft.
4. Wenn das Ladeetui einen niedrigen Batteriestand hat, blinkt die grüne Anzeige schnell. Wenn das Ladeetui geladen wird, blinkt die grüne Anzeige langsam.
5. Um den Leep Ring 1 zu laden, legen Sie den Ring in das Ladeetui und stellen Sie sicher, dass die Kontakte auf der gravierten „L“-Seite des Rings mit den Ladekontakten im Ladeetui übereinstimmen.
6. Wenn der Ring geladen wird, blinkt die grüne Anzeige im Inneren des Rings langsam und die Anzeige an der Vorderseite des Ladeetuis leuchtet dauerhaft. Sie können das Ladeetui bei geöffnetem oder geschlossenem Deckel laden.

Hinweis: Das Ladeetui ist nicht wasserdicht. Nur für den Innenbereich.

WIE MAN DEN LEEP RING 1 TRÄGT

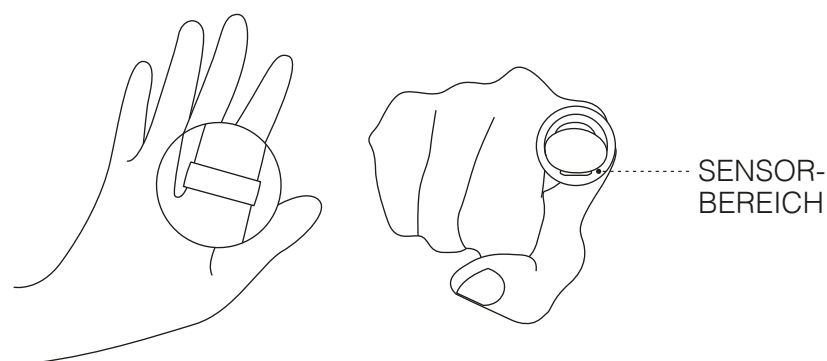

1. Wählen Sie eine Ringgröße, die zu Ihrem Finger passt, um zu vermeiden, dass Sie ihn zu fest oder zu locker tragen.
 2. Für beste Leistung und Genauigkeit wird empfohlen, den Ring am Zeigefinger der nicht-dominanten Hand zu tragen. Er kann auch an jedem anderen Finger getragen werden, solange der Ring sicher und bequem sitzt.
 3. Stellen Sie beim Tragen des Rings sicher, dass der Ringsensor (die Seite mit dem gravierten "L") zur Handflächenseite Ihres Fingers zeigt, um eine genauere Messung zu erhalten.
-

LEEP RING 1 FEHLERBEHEBUNG (DE)

Wenn sich der Ring nicht mit Ihrem Smartphone koppelt:

1. Stellen Sie sicher, dass der Ring geladen ist.
2. Überprüfen Sie Ihr Smartphone, um sicherzustellen, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Dies sollte in Ihren Bluetooth-Einstellungen sein.
3. Starten Sie die Leep App neu und versuchen Sie erneut zu koppeln.

Wenn der Ring keine Daten misst:


Bitte kontaktieren Sie unser Support-Team unter support@leephealth.com

Wenn sich die Ringbatterie zu schnell entlädt:

1. Kalibrieren Sie Ihre Batterie, indem Sie sie mindestens 3 Stunden lang aufladen.
2. Beginnen Sie, Ihren Ring wieder wie gewohnt zu verwenden.
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter support@leephealth.com

Wenn Sie ein hier nicht erwähntes Problem haben, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter support@leephealth.com und melden Sie das Problem ausführlich.

LEEP RING 1 SICHERHEIT (DE)

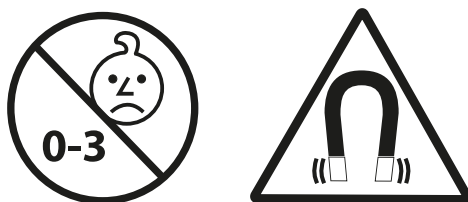

ALLGEMEINE SICHERHEIT

Zerlegen, modifizieren oder setzen Sie den Leep Ring 1 nicht Flüssigkeiten, extremer Hitze oder offenen Flammen aus. Nicht durchstechen, verbrennen oder verbrennen. Vermeiden Sie den Umgang mit Batterien, die Arbeit an Maschinen, die Batterien enthalten, oder Situationen, in denen die Gefahr eines Stromschlags besteht.

WARNHINWEISE FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE

Leep Ring 1 ist kein medizinisches Gerät. Es ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder Zustände zu lindern, zu verhindern, zu behandeln, zu heilen oder zu diagnostizieren. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, sollten Sie immer einen zugelassenen Arzt konsultieren. Wenn Sie Änderungen an Ihrem Verhalten aufgrund von Daten Ihres Leep Ring 1 vornehmen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie dies auf eigenes Risiko tun.

Die Oberflächenmaterialien des Leep Ring 1 sind gemäß der ISO 10993-Norm für den Hautkontakt sicher. Wenn Sie aufgrund des Leep Ring 1 eine Hautreizung verspüren, entfernen Sie den Ring. Bitte kontaktieren Sie einen Arzt, wenn die Hautreizung nach dem Nichtgebrauch von Leep Ring 1 anhält.

Bitte seien Sie vorsichtig, damit der Leep Ring 1 nicht an festen Strukturen oder schweren Gegenständen hängen bleibt.

Wenn Sie einen Notfall oder Unbehagen verspüren oder wenn Sie Ihren Leep Ring 1 nicht selbst entfernen können, empfehlen wir Ihnen, sofort medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Dieses Produkt enthält magnetische Komponenten. Wenn Sie ein implantierbares medizinisches Gerät haben, konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen Ring, Ladeetui und Ihrem medizinischen Implantat ein.

KINDERSICHERHEITSWARNUNGEN

Dieses Produkt enthält Kleinteile und Magnete, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Halten Sie Ring und Ladeetui außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt.

BATTERIEWARNUNG

Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, die Batterien auszutauschen. Unsachgemäße Handhabung kann zu Brand oder Explosion führen. Entsorgen Sie das Produkt bei zertifizierten Elektronik-Recycling-Einrichtungen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Setzen Sie Leep Ring 1 oder das Ladeetui nicht Hitze aus, beispielsweise in einem Fahrzeug oder direkt in der Sonne. Laden Sie den Leep Ring 1 nicht in solchen Umgebungen.

Vermeiden Sie den Umgang mit Batterien, die Arbeit an Geräten mit Maschinen, die Batterien enthalten, oder Situationen, in denen die Gefahr eines Stromschlags besteht.

LEEP RING 1 RECHTLICHES UND REGULATORISCHES

GARANTIEAUSSCHLUSS

DIE DIENSTE WERDEN IHNEN "WIE BESEHEN MIT ALLEN FEHLERN" UND "WIE VERFÜGBAR" OHNE JEGLICHE GARANTIE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UND LEEP UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRETER, AGENTEN, PARTNER UND LIZENZGEBER LEHNEN HIERMIT ALLE GARANTIEEN UND BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIE DIENSTE AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND LEHNEN AUSDRÜCKLICH JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN FÜR EIGENTUM, MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT UND NICHTVERLETZUNG AB. LEEP GARANTIEREN NICHT GEGEN STÖRUNGEN IHRES GENUSSES DER DIENSTE, DIE VERFÜGBARKEIT VON INHALTEN, DASS DIE IN DEN DIENSTEN ENTHALTENEN FUNKTIONEN IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN, DASS DIE DIENSTE FREI VON VIREN ODER ANDEREN SCHÄDLICHEN KOMPONENTEN SIND, DASS DER BETRIEB DER DIENSTE UNUNTERBROCHEN ODER FEHLERFREI SEIN WIRD, DASS MÄNGEL IN DEN DIENSTEN BEHOBEN WERDEN ODER DASS DIE IN DEN DIENSTEN ENTHALTENEN FUNKTIONEN MIT ANDEREN MOBILEN APPS ODER HARDWARE ODER INNERHALB EINES SYSTEMS FUNKTIONIEREN. KEINE MÜNDLICHEN ODER SCHRIFTLICHEN INFORMATIONEN ODER RATSCHLÄGE VON LEEP ODER EINEM VON LEEP AUTORISIERTEN VERTRETER SCHAFFEN EINE GARANTIE. EINIGE RICHTSCHRÄNKUNGEN ERLAUBEN NICHT DEN AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN ODER EINSCHRÄNKUNGEN DER GESETZLICHEN RECHTE EINES VERBRAUCHERS, SODASS DER OBIGE AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT GILT.

UNGEACHTET DES VORSTEHENDEN GARANTIEREN LEEP DEM URSPRÜNGLICHEN ENDBENUTZER-KÄUFER, DASS DAS PRODUKT FÜR EIN (1) JAHR AB KAUFdatum FREI VON MATERIAL- UND VERARBEITUNGSFEHLERN IST.

Wenn Ihr zum Zeitpunkt des Kaufs geltendes lokales Recht eine Garantiezeit von mehr als einem (1) Jahr erfordert, wird diese Garantie in dem durch ein solches Gesetz erforderlichen Umfang verlängert. Innerhalb der Garantiezeit wird Leep alle Komponenten des Produkts, die die eingeschränkte Garantie nicht erfüllen, kostenlos reparieren oder ersetzen. Sie sind für alle damit verbundenen Transportkosten verantwortlich. Ersatzprodukte können nach unserem Ermessen neu oder generalüberholt sein. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für (i) normale Abnutzung, einschließlich Kratzer und

Beulen; (ii) Verbrauchsteile, die im Produkt enthalten sind, wie z. B. Batterien, es sei denn, Produktschäden sind aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers aufgetreten; (iii) Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Sie das Produkt nicht gemäß den dem Leep-Produkt beigelegten oder auf der Website verfügbaren Anweisungen verwendet haben; (iv) Schäden durch Unfall, Überschwemmung, Feuer, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung; (v) Schäden durch von einer nicht von Leep autorisierten Person durchgeführte Wartungsarbeiten oder durch Manipulationen oder Änderungen am Produkt; oder (vi) Verwendung des Produkts mit einer anderen Anwendung oder Software als der Leep Mobile App.

Leep behält sich das ausschließliche Recht vor, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen oder nach eigenem Ermessen eine vollständige Rückerstattung anzubieten. Ein solches Rechtsmittel ist Ihr einziges und ausschließliches Rechtsmittel bei Verletzung dieser eingeschränkten Garantie. Garantiereparaturen und -ersatzlieferungen haben eine neue Garantie, die neunzig (90) Tage oder den Restbetrag der ursprünglichen einjährigen Garantie beträgt, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

LEEP, SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, MITARBEITER, VERTRETER, AGENTEN, PARTNER UND LIZENZGEBER HAFTEN IN KEINEM FALL FÜR SCHÄDEN JEDLICHER ART, UNTER JEDER RECHTSTHEORIE, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT IHRER NUTZUNG ODER UNFÄHIGKEIT ZUR NUTZUNG DER DIENSTE ODER JEDLICHER MIT DEN DIENSTEN VERBUNDENER INHALTE ODER SOLCHER ANDEREN WEBSITES ODER DIENSTE ODER ARTIKEL, DIE ÜBER DIE DIENSTE ERHALTEN WURDEN, ERGEBEN, EINSCHLIESSLICH DIREKTER, INDIREKTER, BESONDERER, BEILÄUFIGER, FOLGENDER ODER STRAFENDER SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF KÖRPERVERLETZUNG, SCHMERZ UND LEIDEN, EMOTIONALEN STRESS, UMSATZVERLUST, GEWINNVERLUST, GESCHÄFTS- ODER ERWARTETE EINSPARUNGSVERLUST, VERLUST VON GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, NUTZUNGSVERLUST, VERLUST DES GOODWILLS, DATENVERLUST, UND OB VERURSACHT DURCH UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG, AUCH WENN VORHERSEHBAR. DIESE AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN UNABHÄNGIG DAVON, OB LEEP AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER NICHT. DAS VORSTEHENDE BERÜHRT KEINE HAFTUNG, DIE NACH GELTENDEM

RECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN ODER EINGESCHRÄNKT WERDEN KANN. SOWEIT DIE HAFTUNG NICHT WIE OBEN DARGELEGT AUSGESCHLOSSEN ODER EINGESCHRÄNKT WERDEN KANN, HAFTET LEEP IN KEINEM FALL FÜR ANSPRÜCHE, OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER UNTER EINER ANDEREN HAFTUNGSTHEORIE, DIE 100 USD ÜBERSTEIGEN.


GEISTIGES EIGENTUM

Leep ist eine Marke von Leep Health Ltd. Leep-Inhalte, Leep-Produkte, Leep-Funktionen und -Dienste sowie die zugrunde liegende Technologie sind durch Urheber-, Marken- und andere Gesetze des Vereinigten Königreichs und anderer Länder geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt für Leep Health Ltd. 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, Vereinigtes Königreich, WC2H 9JQ.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Ihre Nutzung der Leep-Produkte und -Dienste unterliegt unseren Nutzungsbedingungen, die unter leephealth.com/terms-of-use/ verfügbar sind, und unserer Datenschutzrichtlinie, die unter leephealth.com/privacy-policy verfügbar ist. Der oben dargelegte Garantierausschluss und die Haftungsbeschränkung stammen aus unseren Nutzungsbedingungen und können sich ändern, wenn wir unsere Nutzungsbedingungen ändern.

LEEP RING 1 REGULATORISCHE INFORMATIONEN

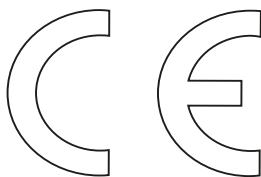


DE: Konformitätsinformationen

Leep Health Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Funkgerät mit der Richtlinie 2014/53/EU Radio Equipment Regulations 2017 und allen anderen anwendbaren EU-Vorschriften konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: leephealth.com/support/compliance



DE: Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) gemäß den nationalen Gesetzen und Vorschriften für Elektroschrott. Es sollte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden.

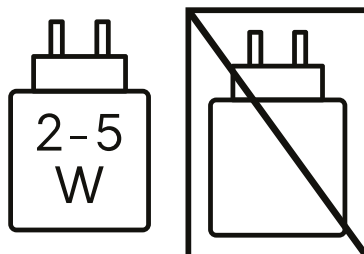


DE: Mindestens 2 Watt Ladeleistung

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2 Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.



FSC
www.fsc.org

MIX
Packaging | Supporting
responsible forestry
FSC™ C214940

PACKAGING RECYCLING	 PAP	Paper / Carta	Raccogli e differenzia. Verifica le disposizioni del tuo comune.
		Card / Carta	



FR

Éléments
d'emballage





FR





Al Azul

Envase Cartón



