

Chlorine Disinfection



Artikelnr.: 60152



Artikelnr.: 60132

Wet Wipe Chlorine Disinfection engangsklude imprægneret med klorgranulat

Med Wet Wipe Chlorine Disinfection opnår du en optimal og enkel desinfektion.

Pakken indeholder en brudbar pose med demineraliseret vand og klude imprægneret med stabilt klorgranulat. Når posen brydes, løber vandet ned i kludene, hvor væsken opløser klorgranulatet, som omdannes til aktivt desinfektionsmiddel.

Kludene er klar til brug efter 7 minutter.

Anvendelse

Anvendes til desinfektion af hjælpemidler, udstyr og større overflader f.eks. ved isolation af patienter og norovirus.

EN standard

Testmetode		tid
EN 13727	Bakterier	5 min
EN 13624	Gær	5 min
	Skimmelsvamp	15 min
EN 16615	Bakterier og gærsvampe	5 min
EN 14348	Myko- og tuberkelbakterier	5 min
EN 14476	Virus	5 min
EN 17126	Clostridium difficile	5 min

Faresætninger:

H302 Farlig ved indtagelse.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Supplerende faresætninger : EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Wet Wipe A/S
Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

Engangskludene produceres i to størrelser; maxi og mini.

Varenr. 60152: Chlorine Disinfection Maxi Karton á 24 pakker
1 pakke indeholder 5 klude, 43×30 cm.

Varenr. 60132: Chlorine Disinfection Mini Karton á 20 pakker
1 pakke indeholder 10 klude, 30×20 cm

Specifikationer:

Indhold granulat

100 % natrium dichloroisocyanurate dihydrate.

Indhold aktiverede og brugsklare klude

Hypoklorsyre svarende til 2000 ppm aktivt klor
pH 5-6

Rækkevidde

Maxi: 60 ml desinfektionsvæske per klud; rækker op til 8 m².
Mini: 30 ml desinfektionsvæske per klud; rækker op til 4 m².

Materiale

Klude: 65 % viskose / 35 % polyester blanding

Oprindelsesland / kvalitetscertifikat

Produceret i Tyskland under cGMP / ISO 22716

Holdbarhed

2 års holdbarhed. De aktiverede og brugsklare engangsklude bevarer desinfektionseffekten 7 dage efter aktivering.

Bemærk

Desinfektionsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

DK/DA, Ver4
Dec 2025

wetwipe®
by schülke →