

Anleitung für Zentrifuge

01

Warum dieser Schritt?

Für die Hormon-Analyse muss das Serum vom Blutkuchen getrennt werden.




02

Deine Methode wählen

Mit Zentrifuge

- ➔ 10 Min. zentrifugieren
- ➔ Kurier kann danach kommen

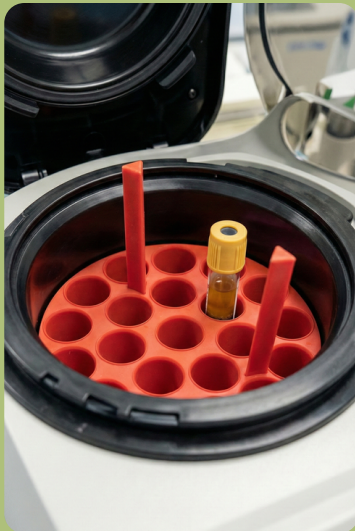

Ohne Zentrifuge


- ➔ 90 Min. stehen lassen
- ⚠ Kurier erst 2 Std. später!



03 | Serum umfüllen

Schritte:

- 1 Mit Pipette klares Serum absaugen (nicht den Blutkuchen!)
- 2 In gesondertes Röhrchen mit weißer Kappe umfüllen (beklebt mit "Serum zentrifugiert")

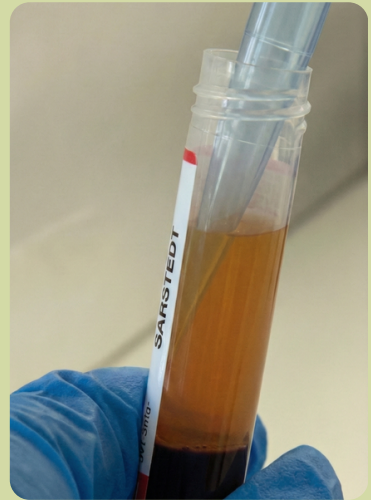

04 | ⚠️ Kurierplanung

Beispiel ohne Zentrifuge:

- Blutabnahme: 10:00 Uhr
- Kurier-Zeitfenster: ab 12:00 Uhr
- ⚠️ (2 Stunden Abstand einplanen!)

Beispiel mit Zentrifuge:

- Kurier ab 30 Min. nach Abnahme einplanen für ausreichend Puffer

05 | Bis zur Abholung

- Alle Röhrchen bei Zimmertemperatur lagern
- Neutralröhrchen zusätzlich mit allen anderen Röhrchen für Kurier bereitstellen

