

Welche Patienten sind geeignete Kandidaten für die Epitomee® Kapsel?

- Epitomee® wird zur Gewichtsreduktion bei übergewichtigen oder adipös Erwachsenen mit einem BMI von 25-40 kg/m² empfohlen, wenn es in Verbindung mit Diät und körperlicher Aktivität eingesetzt wird. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Epitomee®-Kapsel, einschließlich der Abschnitte zu Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen.
- Personen, die einen nicht-medikamentösen, nichtchirurgischen Ansatz wünschen.
- Personen, die Schwierigkeiten mit der Portionskontrolle oder frühzeitiger Sättigung haben.
- Personen ohne Komorbiditäten, die nicht für GLP-1- Medikamente in Frage kommen. Es schließt die Lücke für Patienten mit niedrigem BMI, die von aktuellen Behandlungen unterversorgt sind.



Wirkmechanismus

Jede Epitomee® Kapsel enthält eine proprietäre Polymerformulierung, die im Magen expandiert, nachdem sie mit Wasser eingenommen wurde und eine halbsteife, dreieckige Struktur bildet.

Diese Struktur imitiert das Sättigungsgefühl und löst den Vagusnerv aus, was den Patienten hilft, die Portionsgröße zu reduzieren und weniger zu essen, ohne sich benachteiligt zu fühlen⁶.



EINNEHMEN

Schlucken Sie eine Kapsel mit zwei Gläsern Wasser à 8 Unzen (250 ml) 30 Minuten vor dem Mittag und Abendessen.



EXPANDIEREN

Sobald sie im Magen ist, absorbiert das Gerät in der Kapsel das Wasser und dehnt sich sanft zu einer Dreiecksform aus.



SÄTTIGEN

Das erweiterte Dreieck übt sanften Druck auf die Magenwände aus und signalisiert dem Gehirn ein Sättigungsgefühl.



ZERFALLEN

Nach mehreren Stunden zerfällt die Kapsel vollständig im Dünndarm und wird auf natürliche Weise* aus dem Körper ausgeschieden.

*Bezieht sich auf den Wirkmechanismus des Geräts.

Einfach in Ihre Praxis zu integrieren

- 1 **Dosierung:** Anwendung erfolgt zweimal täglich durch eine Kapsel mit zwei Gläsern Wasser (8 Unzen oder 250 ml) 30 Minuten vor dem Mittag- und Abendessen.
- 2 **Programm:** Die Epitomee®-Behandlung ist zur Anwendung in Kombination mit Diät und körperlicher Aktivität indiziert.
- 3 **Überwachung:** Regelmäßige Nachsorge zur Unterstützung von Verhaltensänderungen und zur Nachverfolgung von Fortschritten.
- 4 **Verschreibung durch den Arzt nötig.**



BENUTZERFREUNDLICHKEIT

„Patienten berichteten durchgehend, dass die Epitomee® Behandlung einfach in ihren täglichen Ablauf zu integrieren war und eine außergewöhnliche Einhaltung zeigte, was zeigt, dass die Anwendung der Epitomee® Kapsel auch bequem und leicht zu handhaben ist.“



Donna Ryan, MD

Professorin Emerita am Pennington Biomedical Research Center

Für Website scannen



epitomee®
weight management capsule

Die *innovative* kleine Gewichtsmanagement-Kapsel

Kontaktieren Sie uns

epitomee@neaniu.com
www.neaniu.de

Epitomee®-Kapsel, FDA-zugelassen und CE-gekennzeichnet. Die Epitomee®-Kapsel ist zur Unterstützung der Gewichtsreduktion bei Patienten ab 18 Jahren bestimmt, die übergewichtig (BMI 25-30 kg/m²) oder adipös (BMI 30-40 kg/m²) sind und mit Diät und Bewegung allein keine zufriedenstellenden Ergebnisse erreicht haben. Die Epitomee®-Kapsel soll ergänzend zu Diät und Bewegung angewendet werden. Epitomee® ist kontraindiziert während der Schwangerschaft und bei Personen mit bekannter Allergie gegen einen seiner Bestandteile. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage vor der Anwendung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter epitomeecapsule.com. Hersteller: Epitomee Medical, 17 Hatochen St, Caesarea 3079892, Israel.

1 Jakicic JM, Ryan DH, Ard JD, et al. Association of the Early Response to an Oral Shape-Shifting Superabsorbent Hydrogel Capsule with Weight Loss. Clin Obes. 2025; 2 Kamar M, Ryan DH, Leonard S, et al. The safety and efficacy of extended use of an oral shape-shifting superabsorbent hydrogel capsule for weight loss: the ELECT extension study. Obesity Science and Practice. 2025; 3 Ard JD, Ryan DH, O'Neil PM, et al. Efficacy and safety of a novel oral hydrogel capsule in adults with overweight or obesity: the pivotal randomized RESET study. Obesity. 2025; 4 Bays HE, Ard JD, O'Neil PM, et al. Weight and cardiometabolic effects of a novel oral shape-shifting superabsorbent hydrogel capsule: Prespecified and exploratory analysis of the Epitomee capsule RESET Study. Obes Pillars. 2025; 5 Kushner RF, Ard JD, Wadden TA, et al. Quality of Life Improvements Associated with Weight Loss Using a Novel Shape-Shifting Hydrogel Capsule: RESET Study Results. International Journal of Obesity. 2025; 6 Shirin H, Neeland IJ, Ryan DH et al. Effects of an oral biodegradable device used for 12 weeks on weight reduction, cardiovascular risk factors, satiety, snacking, and meal size. Obesity Pillars. 2023

epitomee®
weight management capsule



Eine bahnbrechende Innovation im nicht-medikamentösen Gewichtsreduktion

Revolutionierung des Gewichtsreduktion durch Wissenschaft und Technologie

Die Epitomee®-Kapsel ist eine von der FDA zugelassene und CE-gekennzeichnet Technologie, medikamentenfreie Kapsel, die darauf ausgelegt ist, das Gewichtsreduktion zu unterstützen, indem sie Sättigung durch einen mechanischen und nicht pharmakologischen Ansatz fördert.

Neudefinition *des Gewichtsreduktion* mit Wissenschaft und Einfachheit

Die Epitomee®-Kapsel bietet Ihren Patienten eine handhabbare, rezeptpflichtige Lösung, um ein gesünderes Gewicht zu erreichen und zu halten – ohne die Risiken, die mit pharmakologischen Behandlungen verbunden sind.



FDA-ZULASSUNG UND CE-GEKENNZEICHNET TECHNOLOGIE
KLINISCH BEWIESEN OHNE MEDIKAMENTE

Für Patienten, die mit Portionskontrolle, GLP-1-Intoleranz oder Gewichtszunahmen zu kämpfen hatten, bietet die Epitomee®-Kapsel eine wissenschaftlich fundierte Lösung, um die Kalorienaufnahme zu reduzieren und gleichzeitig Lebensstiländerungen zu unterstützen.

Eine neuartige Technologie

Eine neuartige Technologie Wissenschaftlich fundierte Kapsel, die Nahrung imitiert – ohne Stimulanzen, ohne strenge Diäten – nur Appetitkontrolle für den Erfolg der Patienten.

Alternative ohne Medikamente

Ein klinisch erprobter, sicherer, nicht-pharmakologischer Ansatz zur Portionskontrolle und Appetitregulierung.

Die Behandlungslücke schließen

Ideal für Patienten, die nicht bereit oder geeignet für Medikamente oder Operationen sind, aber mehr als nur Lebensstiländerungen benötigen.

Einfachheit & Adhärenz

Einfach in der Anwendung, unterstützt die Adhärenz ohne komplexe Routinen oder Verhaltenserschöpfung.


Evidenzbasierte Wirksamkeit

Klinische Ergebnisse für sicheren, langfristigen Gewichtsverlust

VORHERSEHBARER GEWICHTSVERLUST

Frühzeitige Teilnehmer verloren 9,3% ihres Körpergewichts über 24 Wochen¹

Früher Gewichtsverlust mit Epitomee®-Behandlung (mindestens 2% Verlust in Woche 8) reatment führte zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 9,3% innerhalb voin 24 Wochen.

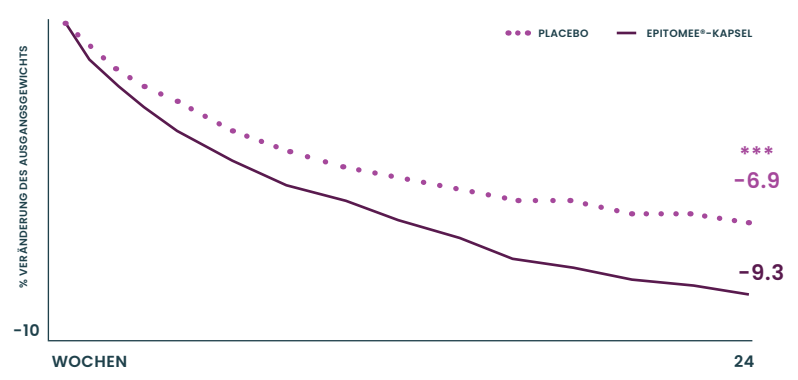


*** p<0.001 Epitomee® versus placebo early responders

NACHHALTIGE ERGEBNISSE

11,2% Körpergewichtsverlust über 48 Wochen in der Ext. Studie²

Teilnehmer, die 24 Wochen Behandlung mit Epitomee® abgeschlossen und mindestens 3% verloren hatten, nahmen an der Verlängerungsstudie für weitere 24 Wochen teil und hatten nach 24 Wochen 11,3% des Ausgangsgewichts verloren. Mit weiteren 24 Wochen Epitomee® und Lebensstilberatung hielten diese Teilnehmer einen Verlust von 11,2% des Ausgangsgewichts in Woche 48 aufrecht.


Teilnehmer mit Placebo haben nach 24 Wochen 6,0 % verloren. Nach Wechsel zur Epitomee® Kapsel verloren sie in den nächsten 24 Wochen zusätzlich 1,5 %.

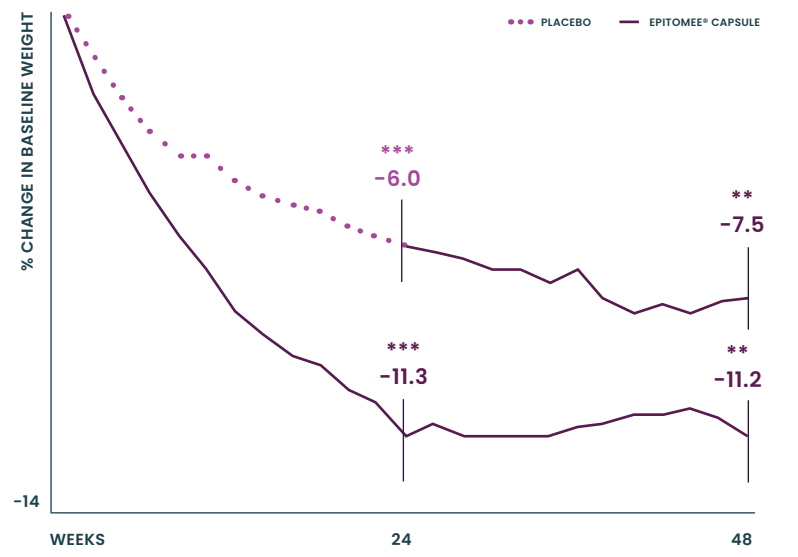

p<0.01; *p<0.001

GERINGES RISIKO

Keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse³

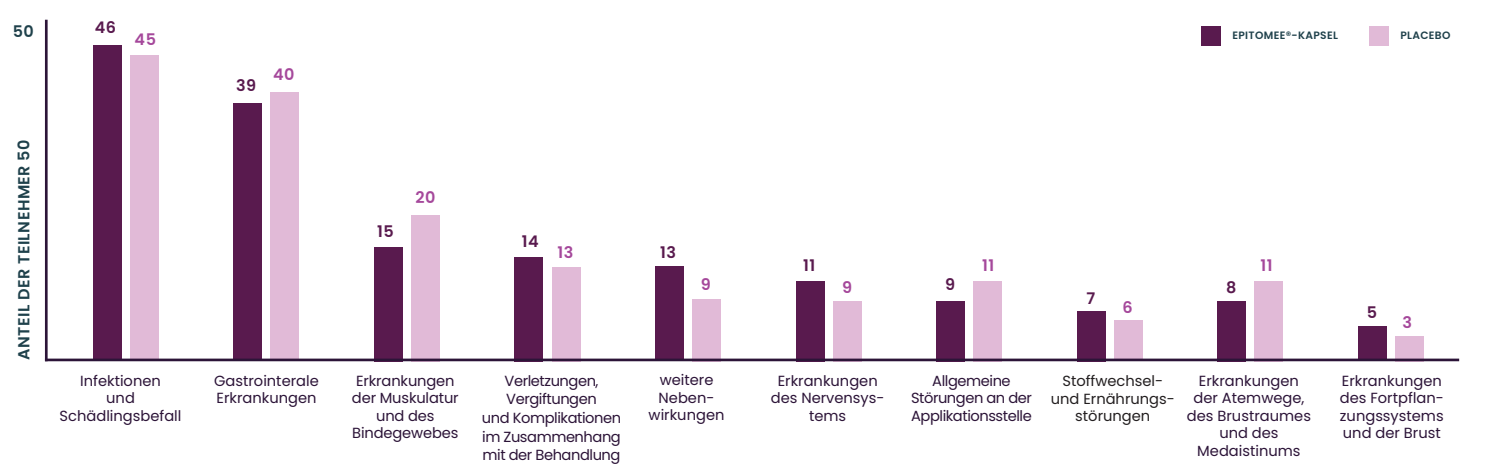

Die Epitomee®-Kapsel ist darauf ausgelegt, effektive Ergebnisse mit einem günstigen Sicherheitsprofil zu bieten. Die von Teilnehmern gemeldeten unerwünschten Ereignisse waren zwischen den Epitomee®- und Placebo-Gruppen ähnlich, was darauf hinweist, dass die Epitomee®-Behandlung keine offensichtlichen Nebenwirkungen hat.

Vollständige klinische Ergebnisse auf epitomeecapsule.com ansehen


Klinische Ergebnisse für verbesserte Gesundheitszustände

VERBESSERTES METABOLISCHES SYNDROM

Hilft, das Risiko des metabolischen Syndroms zu verringern⁴

Gewichtsverlust mit der Epitomee® Kapsel kann die glykämische Kontrolle und andere kardiometabolische Risikofaktoren verbessern und zur allgemeinen Gesundheit beitragen.

Von den 27 Teilnehmern in der Epitomee® Kapselgruppe mit MetS zu Beginn hatten 16 (60%) nach 24 Wochen nicht mehr 3 oder mehr diagnostische Komponenten des MetS. Unter den Teilnehmern mit MetS, die die Epitomee®-Kapsel einnahmen, verloren signifikant mehr Gewicht al diejenigen mit Placebo. (8,3% vs. 5,2%; p < 0.0004).

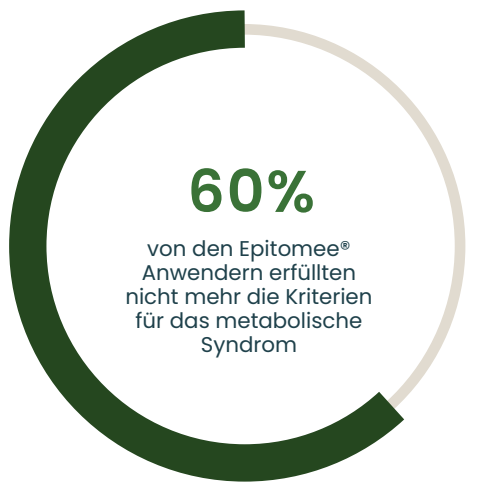

VERBESSERTER INSULINWERTE

Hilft, das Risiko von Diabetes zu verringern⁴

Gewichtsverlust bei Studienteilnehmern mit Prädiabetes war mit signifikanten Verbesserungen der Insulinwerte und der Insulinresistenz (HOMA-IR) innerhalb von 24 Wochen verbunden und verringerte ihr Risiko, Diabetes zu entwickeln, im Vergleich zu denen, die ein Placebo erhielten.

**p<0.01



Klinische Ergebnisse für verbessertes Wohlbefinden

VERBESSERTER GESUNDHEIT

Erleben Sie eine messbare Verbesserung der Lebensqualität⁵

Der Gewichtsverlust bei sowohl Epitomee® Teilnehmern als auch bei Placebo verbesserte signifikant die Lebensqualität im Vergleich zum Ausgangswert (# p < 0.05). Im Vergleich zu Placebo zeigte die Epitomee® Kapselgruppe signifikant größere Verbesserungen in der körperlichen Funktion und den IWQOL-Lite-CT Gesamtscores (*p < 0.05).

