

# Invia<sup>®</sup> Liberty<sup>™</sup>

## NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY SYSTEM

- EN Patient instructions for use
- ES Instrucciones de uso paciente
- FR Mode d'emploi pour le patient



# Ayuda

Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de empezar a utilizar este dispositivo.

Si tiene alguna pregunta sobre el sistema de tratamiento de heridas con presión negativa Invia Liberty, póngase en contacto con su médico o profesional sanitario en el siguiente número:

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
DEL MÉDICO / PROFESIONAL SANITARIO:

**Conserve estas instrucciones de uso (IDU) para el paciente en un lugar de fácil acceso.**

# Índice

Advertencias generales.....	31
Finalidad de este dispositivo.....	33
Uso previsto.....	33
Cuándo no se debe utilizar el dispositivo (contraindicaciones).....	34
Descripción del dispositivo.....	35
Pantalla.....	36
Condiciones que afectan al uso.....	36
Seguridad general en el hogar.....	37
Al dormir.....	38
Al ducharse, bañarse o lavarse.....	38
Al salir de casa.....	39
Instrucciones de configuración.....	39
Ajuste del maletín de transporte.....	41
Estado de la batería.....	41
Carga de la batería.....	42
Cambio del recipiente.....	43
Conexión y desconexión del conector rápido.....	44
Notificaciones y resolución de problemas.....	45
Tabla de alarmas.....	46
Limpieza y desinfección.....	50
Garantía.....	50
Mantenimiento y control de seguridad.....	50
Eliminación.....	50
Especificaciones técnicas.....	51
Signos y símbolos.....	52
Documentación técnica.....	54
Compatibilidad electromagnética (CEM).....	81

## Advertencias generales

### **ADVERTENCIA**


La persona encargada de utilizar este dispositivo a diario (paciente o cuidador) deberá ser capaz de leer, comprender y seguir las instrucciones suministradas por este manual de uso, por la pantalla del aspirador y por el profesional sanitario. Dicha persona debe poder escuchar y reaccionar a señales acústicas. Utilice el sistema NPWT Invia Liberty únicamente con la persona a quien se ha prescrito y solo para el uso previsto.

No aplique el tratamiento sin la supervisión de un profesional sanitario y sin consultar primero al personal sanitario y de enfermería capacitado sobre las instrucciones de uso del mismo. No está permitido realizar modificaciones en el equipo.

### **ADVERTENCIA**

Compruebe visualmente el apósito de la herida y el sistema Invia Liberty de manera frecuente.

Si observa una gran cantidad de sangre en el apósito, en los tubos o en el recipiente:

- 1 Apague el aspirador pulsando  durante 3 segundos.
- 2 Aplique presión sobre la herida.
- 3 Busque inmediatamente asistencia médica de emergencia.

Si tiene dificultades para respirar, busque inmediatamente asistencia médica de emergencia.




### **ADVERTENCIA**

Póngase de inmediato en contacto con su profesional sanitario si presenta los siguientes síntomas:

- pérdida significativa de la visión o la audición;
- dolor, molestia o enrojecimiento en la zona circundante a la herida;
- hinchazón, comezón o sarpullidos alrededor de la herida;
- fiebre;

- olor fuerte procedente de la herida;
- drenaje verde y espeso o cualquier cambio en el color del drenaje;
- náuseas, vómitos o diarrea;
- dolor de garganta con inflamación;
- mareos o confusión;
- reacciones alérgicas, como enrojecimiento, sarpullidos o urticaria, hinchazón o comezón graves.

### **ADVERTENCIA**

Una vez que el profesional sanitario haya ajustado la configuración de presión y modalidad del aspirador, no pulse ningún otro botón que no sea el botón de encendido/apagado [  ], el botón de espera [  ] o el botón de silencio [  ].

### **ADVERTENCIA**

El aspirador debe utilizarse las 24 horas del día. No detenga el aspirador a menos que así lo indique el profesional sanitario o que se produzca un sangrado excesivo.

Si se detiene el aspirador durante un tiempo superior a los plazos indicados a continuación, deberá cambiarse el apósito. Diríjase a su profesional sanitario para solicitar un cambio del apósito.

Apósitos de gasa: cambie el apósito si el aspirador ha estado detenido durante más de dos horas.

Apósito de espuma: cambie el apósito si el aspirador ha estado detenido durante más de dos horas.

### **ADVERTENCIA**

Si el aspirador deja de funcionar y no es posible encenderlo, llame inmediatamente a su profesional sanitario.

**PRECAUCIÓN:** De acuerdo con la legislación federal de Estados Unidos, la venta o el alquiler de este dispositivo solo podrá realizarlos un médico u otra persona a petición de un médico.

## Finalidad de este dispositivo

Su profesional sanitario le ha prescrito el tratamiento de heridas con presión negativa (NPWT).

Se ha demostrado que el tratamiento de heridas con presión negativa estimula la curación de toda una serie de tipos de heridas. La presión negativa (succión) se proporciona a una herida a través de un aspirador. La succión o presión negativa le ayudará a retirar los fluidos y cerrar su herida. Su profesional sanitario colocará un apósito especial sobre su herida y un tubo que irá desde la herida hasta el recipiente situado en el aspirador. A continuación, se enciende el aspirador a la presión prescrita para retirar las secreciones de su herida y estas pasan al recipiente. El tratamiento se aplicará las 24 horas del día.

## Uso previsto

El sistema de tratamiento de heridas con presión negativa Invia Liberty de Medela está indicado para ayudar a estimular la curación de heridas a través de medios entre los que se incluyen el drenaje y la eliminación de material infeccioso y otros fluidos, bajo la influencia de presiones negativas continuas o intermitentes, particularmente en pacientes que presenten heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas y dehiscentes, quemaduras de segundo grado, úlceras (por ejemplo, diabéticas o por presión), colgajos e injertos.

# Cuándo no se debe utilizar el dispositivo (contraindicaciones)

Contraindicado para pacientes que presenten:

- Heridas asociadas a cáncer
- Osteomielitis no tratada
- Desnutrición no tratada
- Fístula no entérica
- Fístula no explorada
- Tejido necrótico con presencia de escaras
- No colocar el apósito del tratamiento de heridas Invia sobre vasos sanguíneos u órganos expuestos
- No colocar directamente sobre anastomosis o vasos suturados

Si tiene cualquier duda, consulte a su profesional sanitario.

# Descripción del dispositivo

Revise el embalaje de entrega del sistema Invia Liberty para comprobar que esté completo y en buenas condiciones.


## **ADVERTENCIA**

No utilice accesorios que no sean los que se describen a continuación.



# Pantalla

## Botones para manejar el aspirador Invia Liberty

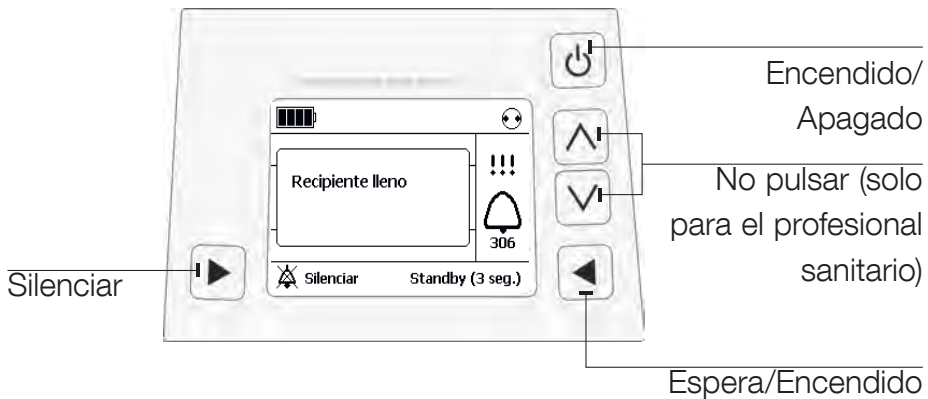

## Condiciones que afectan al uso

### PRECAUCIÓN

El aspirador Invia Liberty debe permanecer en posición vertical durante su uso.



# Seguridad general en el hogar



Lea y tenga en cuenta estas advertencias e instrucciones de seguridad antes de comenzar a utilizar el sistema. Estas instrucciones de uso deben guardarse con el dispositivo. Tenga en cuenta que estas instrucciones de uso son pautas generales para la utilización del producto. Para resolver situaciones médicas, deberá consultar a un médico.



## PRECAUCIONES/ADVERTENCIAS

- No utilice alargadores eléctricos con el aspirador Invia Liberty.
- Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda ocasionar tropiezos o caídas.
- Nunca coloque el cable de alimentación alrededor de su cuello.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes.
- No tire del cable de alimentación para desenchufarlo de la pared.
- No intente reparar usted mismo el aspirador Invia Liberty. Si no funciona, póngase en contacto con su profesional sanitario.
- Mantenga el aspirador Invia Liberty limpio y seco.
- Nunca sumerja el aspirador Invia Liberty en agua u otros líquidos.
- En caso de que el aspirador se moje, séquelo con una toalla.
- No seque el aspirador Invia Liberty en el microondas.
- Mantenga el aspirador fuera del alcance de niños y mascotas.
- Se requiere supervisión cuando el aspirador Invia Liberty se utiliza cerca de niños.
- No exponga el aspirador Invia Liberty a la luz solar directa.
- Riesgo de explosión: el aspirador Invia Liberty no se debe usar en entornos potencialmente explosivos, incluidos aquellos enriquecidos con oxígeno y áreas con anestésicos inflamables.
- El uso de teléfonos móviles, redes de área local (LAN) e inalámbricas (WLAN), walkie-talkies (radiotransmisores portátiles) y teléfonos inalámbricos puede interferir en el funcionamiento del aspirador Invia Liberty. Esto puede ocasionar una carga insuficiente de la batería o generar un fallo interno. Consulte el capítulo Notificaciones y resolución de problemas

para ver las acciones que se deben aplicar en caso de fallo interno. Algunos teléfonos móviles pueden interferir en el funcionamiento del aspirador Invia Liberty si se reciben o realizan llamadas cerca del mismo. Antes de utilizar un teléfono móvil cerca del aspirador Invia Liberty, compruebe que este continúa funcionando mientras realiza o recibe una llamada. Si detecta un cambio del nivel de vacío o algún otro error, coloque el aspirador Invia Liberty a una distancia de al menos un metro (3,3 pies) de cualquier teléfono móvil que esté emitiendo o recibiendo llamadas. Apague y encienda nuevamente el aspirador Invia Liberty para reajustarlo después de un error. Siempre que sea posible, se recomienda mantener una distancia de seguridad mínima de un metro (3,3 pies) entre el aspirador Invia Liberty y cualquier teléfono móvil.

## Al dormir



- Asegúrese de que los tubos del Invia Liberty no puedan doblarse.
- Evite que el aspirador pueda caer al suelo mientras duerme.
- Cargue siempre el aspirador Invia Liberty cuando se vaya a la cama.

## Al ducharse, bañarse o lavarse



- No utilice el aspirador Invia Liberty mientras se baña o se ducha.
- El Invia Liberty puede desconectarse del apósito durante un lapso de tiempo corto (de hasta 20 minutos) para cambiarse de ropa o para asearse. Analice los planes de aseo con su profesional sanitario.
- Evite que el aspirador Invia Liberty se moje.
- No coloque el aspirador Invia Liberty en un lugar desde el cual se pueda caer a una ducha, a un lavabo o una bañera.
- No toque el Invia Liberty si se ha caído al agua. Desconecte el dispositivo inmediatamente de la corriente eléctrica y desconecte el aspirador del apósito.

# Al salir de casa




- Compruebe el estado de la batería y, si es necesario, recárguela antes de salir de casa.
- Para mayor comodidad, coloque el aspirador Invia Liberty en su maletín de transporte.
- No se olvide de llevar consigo una fuente de alimentación y un recipiente extra.


## Instrucciones de configuración


### **ADVERTENCIA**


Compruebe con frecuencia el Invia Liberty y el apósito para asegurarse de que funcione. Compruebe visualmente el apósito de la herida, el área circundante y el fluido del recipiente para buscar indicios de infección u otras complicaciones, según lo que le indique su profesional sanitario.

### Encendido

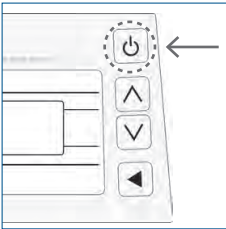

Encienda el aspirador Invia Liberty pulsando la tecla [  ].

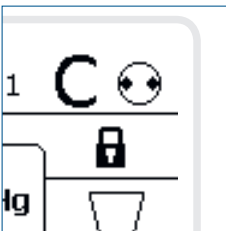

Vista de la pantalla cuando el aspirador está en funcionamiento. El indicador de funcionamiento/espera está girando [  ].

### **ADVERTENCIA**

No intente efectuar el tratamiento sin la supervisión de su profesional sanitario.



### **ADVERTENCIA**

El sistema de NPWT debe estar en funcionamiento las 24 horas del día. No detenga el tratamiento a menos que así lo indique su profesional sanitario o que se produzca un sangrado excesivo.



### **ADVERTENCIA**


Se deberá reemplazar el apósito y el profesional sanitario deberá recomenzar el tratamiento si este se suspende durante más de dos horas.




### **ADVERTENCIA**

El aspirador Invia Liberty no detecta bloqueos en los tubos conectados al adaptador de drenaje o al brazo curvo del conector en Y. A lo largo del día, supervise con frecuencia el tubo del apósito conectado al adaptador de drenaje o al brazo curvo del conector en Y, para asegurarse de que el tubo no esté doblado ni bloqueado.

Si identifica algún bloqueo en el tubo conectado al adaptador de drenaje o en el tubo conectado al brazo curvo del conector en Y, póngase en contacto con su profesional sanitario.

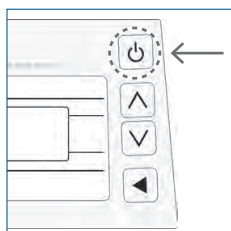

### **Apagado**

Pulse el botón [  ] durante 3 segundos para apagar el aspirador Invia Liberty. Púselo una sola vez.

## Ajuste del maletín de transporte

El aspirador Invia Liberty está concebido para colocarse en un maletín de transporte durante su funcionamiento.



- 1 Abra el maletín de transporte.
- 2 Deslice el aspirador Invia Liberty en el compartimento correspondiente.
- 3 Cierre la solapa de velcro sobre el aspirador.

La bandolera también puede usarse como cinturón.

Para esto, suelte la correa de los lados del maletín de transporte y pásela por las dos presillas ubicadas en la parte posterior del mismo.

## Carga de la batería

Cuando la batería está completamente cargada, debe durar aproximadamente unas diez horas. Si el aspirador Invia Liberty está funcionando de manera continua debido a una fuga de aire, es posible que la batería deba recargarse antes (al cabo de unas 4 horas).

### Símbolos de estado de la batería




llena

media carga


totalmente descargada (vacía)

# Carga de la batería

Si el dispositivo se queda sin batería, siga las siguientes instrucciones.

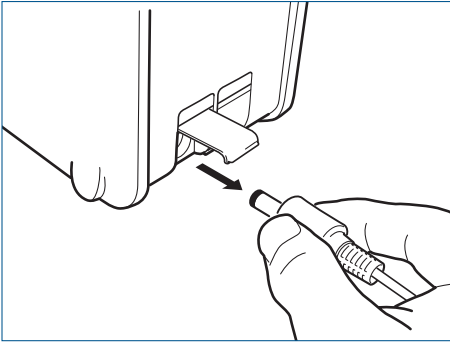

Abra el puerto de alimentación y conecte el Invia Liberty al enchufe eléctrico de la fuente de alimentación suministrada con el aspirador. Conecte el otro extremo de la fuente de alimentación a una toma de pared. Las barras en movimiento que se muestran en el monitor de la batería indicarán que se está cargando.

La batería estará completamente cargada al cabo de unas cuatro horas. Cuando la batería esté totalmente cargada, si permanece conectada a la fuente de alimentación, se mostrará el icono  en la pantalla. Una vez completada la carga, desenchufe la fuente de alimentación de la pared y desconecte el aspirador Invia Liberty de la fuente de alimentación.

Presione hacia abajo la cubierta de protección para cerrar el puerto de alimentación.



## PRECAUCIÓN

Debe continuarse con el tratamiento NPWT mientras se carga la batería del aspirador. No apague el aspirador mientras se carga.


Cargue siempre la batería durante la noche.


Puerto del enchufe adaptador





# Cambio del recipiente

Cambie el recipiente cuando parezca que esté lleno o cuando suene la alarma, de acuerdo con las instrucciones que se muestren en la pantalla del aspirador.

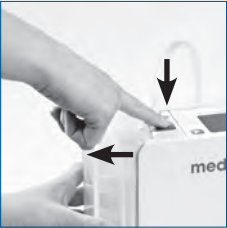- 1 Lávese las manos.
- 2 Cierre el tubo del recipiente.
- 3 Pulse el botón de espera [  > 3 segundos ] y el motor del aspirador dejará de funcionar.

- 4  Pulse el botón de liberación de la parte superior del aspirador y retire el recipiente.

- 5  Selle el recipiente utilizado con el tope situado en la parte lateral.

- 6  Desembale el nuevo recipiente, coloque las clavijas de la parte inferior del mismo en las ranuras que se encuentran en la base del aspirador. Empuje el recipiente hasta que haga clic dentro del aspirador Invia Liberty.


## PRECAUCIÓN

No utilice el recipiente Invia Liberty si el empaquetado estéril está dañado.



7



Pulse [  ] para encender el aspirador Invia Liberty y deslícelo en el interior de su maletín de transporte.


8 Deseche el recipiente usado según las instrucciones suministradas por su profesional sanitario.

## Conexión y desconexión del conector rápido



El conector rápido permite desconectar el equipo durante un lapso de tiempo corto (de hasta 20 minutos) para que pueda cambiarse de ropa o asearse.

1 Lávese las manos.


2 Cierre el tubo del recipiente y el tubo del apósito.

3 Pulse el botón de espera [  > 3 segundos ] y el motor del aspirador dejará de funcionar.



4

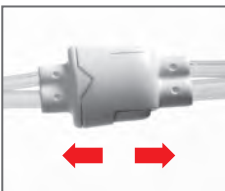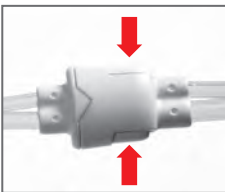

Presione los laterales del conector rápido para desconectarlo.

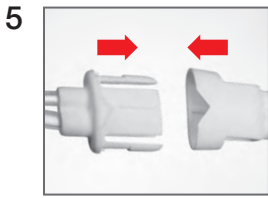

Para volver a conectar el conector rápido, acople sus extremos hasta que oiga un clic.

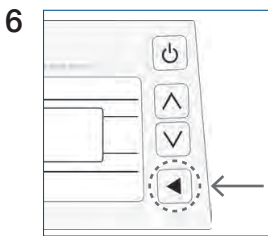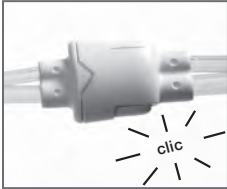


Pulse el botón «On» [ ◀ ] para continuar con el tratamiento.

## Notificaciones y resolución de problemas




No se asuste si oye una señal acústica. Siga estas indicaciones.

- 1 Si el aspirador Invia Liberty está en su maletín de transporte, abra la tapa del maletín.
- 2 Pulse [ ▶ ] para silenciar la señal acústica durante 60 segundos (puede pulsar de nuevo cada vez que suene la señal).

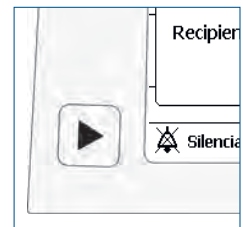

# Tabla de alarmas

Advertencia	401	<p>Batería baja</p> <p>Silenciar Standby (3 seg.)</p>	<p>Cargar batería</p> <p>Silenciar Standby (3 seg.)</p>
	405	<p>Modo standby</p> <p>Silenciar On</p>	<p>Conecte y desconecte el aspirador</p> <p>Silenciar On</p>
	406	<p>Temperatura interna alta</p> <p>Silenciar Standby (3 seg.)</p>	<p>Retire la bomba de la fuente de calor (p.ej., la luz solar directa) o retire cualquier cubierta adicional (p.ej., una manta).</p> <p>Silenciar Standby (3 seg.)</p>
Alarma	301	<p>Fuga en el sistema</p> <p>Silenciar Standby (3 seg.)</p>	<p>Controle si hay fugas en el sistema y si el contenedor está correctamente insertado.</p> <p>Consulte las instrucciones de uso para una información adicional.</p> <p>Silenciar Standby (3 seg.)</p>
	302	<p>Sistema obstruido</p> <p>Silenciar Standby (3 seg.)</p>	<p>Controle que el tubo está limpio / no está doblado. Controle el nivel de llenado del recipiente.</p> <p>Consulte las instrucciones de uso para información adicional.</p> <p>Silenciar Standby (3 seg.)</p>

	Comentarios / posible causa del fallo
	<p>Recargue la batería colocando el aspirador Invia Liberty en la estación de conexión o enchufe el cargador al puerto de alimentación del aspirador.</p> <p>El tiempo restante de la batería es de aproximadamente 30 minutos.</p>
	<p>Si el aspirador permanece en modo de espera durante más de cinco minutos, sonará una alarma.</p> <p>Para continuar con el tratamiento pulse el botón «On» [  ].</p>
	<p>Enfríe el aspirador Invia Liberty siguiendo las instrucciones de la pantalla.</p>
	<p><b>Apósito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe que no haya una fuga de aire en el apósito. Presione firmemente los bordes del apósito, alrededor del tubo de drenaje o sobre el Invia FitPad.</li> <li>- Puede aplicar una película adicional para fijar el apósito y sellar el área de fuga.</li> </ul> <p><b>Conexiones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegúrese de que el tubo del apósito esté conectado de forma adecuada al tubo del recipiente.</li> <li>- Asegúrese de que el tubo del recipiente esté insertado directamente al aspirador.</li> </ul> <p><b>Recipiente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegúrese de que el recipiente esté insertado de forma adecuada; suéltelo y vuelva a colocarlo.</li> <li>- Asegúrese de que no falte la junta tórica naranja que se coloca junto al tubo del recipiente en el aspirador. Puede solicitar más juntas al representante de Medela.</li> </ul>
	<p>Llame a su profesional sanitario.</p>

Alarma	305		
	306		
	311		
	313		
Fallo interno			



## PRECAUCIÓN

Si no puede identificar ningún símbolo o no comprende la alarma que se muestra en la pantalla, póngase en contacto con su profesional sanitario.

	Comentarios / posible causa del fallo
	<p>Recargue la batería colocando el aspirador Invia Liberty en la estación de conexión o enchufe el cargador al puerto de alimentación del aspirador.</p> <p>El tiempo restante de la batería es de aproximadamente 15 minutos.</p>
	<p>Cambie el recipiente (consulte el capítulo «Cambio del recipiente»).</p> <p><b>Recipiente:</b> – Suelte el recipiente y vuelva a colocarlo.</p> <p><b>Tubo:</b> – Asegúrese de que el tubo no esté doblado, enroscado ni bloqueado.</p>
	<p><b>Recipiente:</b> – Suelte el r ecipiente y vuelva a colocarlo.</p> <p><b>Tubo:</b> – Asegúrese de que el tubo no esté doblado, enroscado ni bloqueado.</p>
	<p>Cambie el recipiente (consulte el capítulo «Cambio del recipiente»).</p>
	<p>Reinicie el aspirador. Si persiste el fallo interno, apague el aspirador pulsando [  &gt; 3 segundos] y póngase en contacto con su profesional sanitario.</p>



## ADVERTENCIA

Si el aspirador falla o no es posible encenderlo, llame inmediatamente a su profesional sanitario.

## Limpieza y desinfección



El aspirador Invia Liberty puede limpiarse con un paño húmedo y un limpiador suave de uso doméstico.

## Garantía



La garantía tiene una vigencia de dos años a partir de la fecha de entrega. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño o daño indirecto ocasionados por un uso incorrecto o indebido, o por el uso del sistema por parte de personas no autorizadas.

## Mantenimiento y control de seguridad



El mantenimiento solo puede ser realizado por personal autorizado. El control de seguridad se reduce a la inspección visual de la carcasa y el cargador para detectar cualquier daño y se debe llevar a cabo antes de cada uso. Si no se utiliza el aspirador Invia Liberty, la batería debe recargarse aproximadamente una vez cada seis meses para asegurar su óptimo funcionamiento.

## Eliminación



Consulte con su profesional sanitario el mejor modo de desechar los apósitos, recipientes y tubos usados.

# Especificaciones técnicas

## Condiciones de almacenamiento de los accesorios

Los accesorios deben permanecer en su embalaje y almacenarse a una temperatura comprendida entre  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  y  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  (entre  $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$  y  $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).



## Condiciones ambientales de funcionamiento

El aspirador Invia Liberty y sus accesorios deben utilizarse a una temperatura comprendida entre  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  y  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$  (entre  $41\text{ }^{\circ}\text{F}$  y  $104\text{ }^{\circ}\text{F}$ ). No utilice los productos en condiciones de frío o calor extremo. Evite altos niveles de humedad relativa (se admite un intervalo de 15–93 %).



### PRECAUCIÓN

No utilice el aspirador Invia Liberty a más de 3000 m (9842 pies) por encima del nivel del mar.

## Clase de protección IP33

El aspirador Invia Liberty está protegido frente a la entrada de objetos extraños sólidos de más de 2,5 mm (0,1 pulgadas) así como de gotas de agua.

**IP33**

# Signos y símbolos



Este símbolo acompaña a una PRECAUCIÓN o ADVERTENCIA asociada al dispositivo (consulte la página 3).



Este símbolo indica que se trata de un dispositivo de clase II.



No deseche este dispositivo junto con otros residuos urbanos sin clasificar (aplicable solo a la UE).



Este símbolo muestra la fecha de fabricación (cuatro dígitos para el año y dos para el mes).



Este símbolo indica el nombre y la dirección del fabricante.



Este símbolo indica que el dispositivo se ha esterilizado mediante óxido de etileno.



Este símbolo indica el año y el mes a partir del cual debe dejar de utilizarse el dispositivo.



Este símbolo indica que este dispositivo necesita prescripción médica. PRECAUCIÓN: De acuerdo con la legislación federal de Estados Unidos, la venta de este dispositivo solo podrá realizarla un médico u otra persona a petición de un médico (solo aplicable a Estados Unidos).



Este símbolo acompaña a una pieza aplicada de tipo BF.



Este símbolo indica el número de catálogo del fabricante.



Este símbolo indica el número de serie del fabricante.



Este símbolo indica el código de lote del fabricante.



Este símbolo indica protección contra la entrada de objetos sólidos externos y contra los efectos dañinos causados por la entrada de agua.



Este símbolo recomienda seguir las instrucciones de uso.



Este símbolo indica el cumplimiento de requisitos adicionales de seguridad de EE. UU. y Canadá para equipos eléctricos sanitarios.



Este símbolo indica que no se debe utilizar el dispositivo si el embalaje está dañado.

## pcs

Este símbolo indica el número de artículos.



Este símbolo indica la toma de corriente continua.



Este símbolo acompaña a un dispositivo de un solo uso. No reutilice el dispositivo.



Este símbolo indica el límite de temperatura de funcionamiento, transporte y almacenamiento.



Este símbolo indica los límites de humedad para el funcionamiento y el almacenamiento.



Este símbolo muestra los límites de presión atmosférica para el funcionamiento y el almacenamiento del dispositivo.



Este símbolo indica que hay que mantener el dispositivo seco.



Este símbolo recomienda mantener el dispositivo alejado de la luz solar.



Este símbolo recomienda que se trate el dispositivo frágil con cuidado.



Este símbolo indica el cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva 93/42/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 relativa a los productos sanitarios.

# Documentación técnica



## **ADVERTENCIA**

No utilice accesorios distintos de los recomendados o vendidos por el fabricante como piezas de sustitución de componentes internos, ya que esto podría causar un aumento de las emisiones o disminuir la inmunidad del aspirador Invia Liberty.