

Étapes clés OdonAssist™

DISPOSITIF GONFLABLE POUR ACCOUCHEMENT INSTRUMENTAL PAR VOIE VAGINALE



01

PRÉPARATION

- Lubrifier les 4 fourreaux internes.
- Lubrifier le manchon et la coupelle.



02

APPLICATION


- Commencer l'insertion, puis libérer le bouton rouge et retirer la gaine de maintien.
- Lors des contractions, faire avancer le manchon en appuyant sur la poignée de l'applicateur.
- NE PAS tenir le manchon pendant l'insertion.
- Continuer de pousser jusqu'à ce que « 0 » apparaisse dans la fenêtre de contrôle.



03

GONFLAGE

- Pomper huit fois. NE PAS appuyer sur le bouton de dégonflage bleu pendant le gonflage.
- Retirer complètement l'applicateur et la coupelle.
- Écraser la poire de gonflage à deux reprises supplémentaires avant d'exercer la traction.

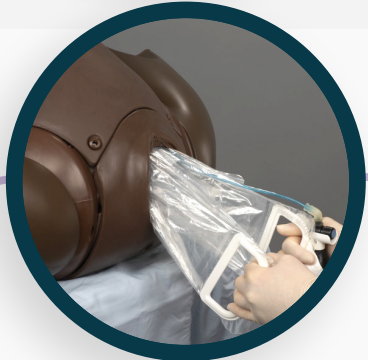

04

TRACTION

- Saisir initialement une poignée du manchon dans chaque main.
- Lors des contractions, tirer doucement et progressivement en suivant la filière génitale.



05

DÉGONFLAGE

- Dès que la tête émerge, APPUYER sur le bouton de dégonflage et le MAINTENIR ENFONCÉ. Retirer le manchon.
- Le ligne bleue rappelle à l'opérateur qu'il doit dégonfler le dispositif.
- Il est important de soutenir le périnée !



Suivre la procédure normale pour faciliter la naissance. Mettre au rebut tous les articles conformément à la procédure locale applicable. Ne pas réutiliser.

