

Étape clés OdonAssist™

DISPOSITIF GONFLABLE POUR ACCOUCHEMENT
INSTRUMENTAL PAR VOIE VAGINALE

01 PRÉPARATION

Lubrifier les 4 fourreaux internes, le manchon et la coupelle.

02 APPLICATION

Commencer l'insertion, retirer la gaine de maintien. Au cours des contractions, faire avancer le manchon. NE PAS tenir le manchon pendant l'insertion. Continuer de pousser jusqu'à ce que « 0 » apparaisse dans la fenêtre de contrôle.

03 GONFLAGE

Pomper 8 fois. NE PAS appuyer sur le bouton de dégonflage bleu à ce stade. Retirer l'applicateur. Presser la poire de gonflage deux fois avant de tirer.

04 TRACTION

Saisir les poignées et lors des contractions, tirer doucement et progressivement en suivant la filière génitale.

05 DÉGONFLAGE

Lorsque la tête fœtale se dégage, APPUYER sur le bouton de dégonflage et le MAINTENIR enfoncé. Il est important de soutenir le périnée !

Suivre la procédure normale pour faciliter la naissance. Mettre au rebut tous les articles conformément à la procédure locale applicable. Ne pas réutiliser.



Scannez ici ou rendez-vous sur le site [odonassist.com](https://www.odonassist.com) pour visualiser une vidéo donnant un bref aperçu du dispositif.



Scannez ici ou rendez-vous sur le site [odonassist.com](https://www.odonassist.com) pour visualiser une vidéo complète de formation.

mnhi.
maternal newborn
health innovations