



ANYTIME CT3

Sustav za kontinuirano praćenje
glukoze u stvarnom vremenu

**Točan i pouzdan
rtCGM** za bolju
kontrolu dijabetesa



SALVUS

ANYTIME CT3 – GLAVNE ZNAČAJKE:

- trajanje senzora: **14 dana**
- trajanje odašiljača: **2 godine**
- očitavanje svakih **3 min – 480 puta dnevno**
- **MARD: 9,07 %**
- širok raspon mjerenja: **1,7 – 27,8 mmol/L**
- **IP58** certifikat: otpornost na prašinu i vodootpornost (**2,5 m dubine / 1 sat**)
- domet: **6 m**
- vrijeme zagrijavanja: **1 h**
- nošenje na **NADLAKTICI** ili **TRBUHU**
- **bez skeniranja**: automatska sinkronizacija s pametnim telefonom
- **bez prekida u podacima**: jak i stabilan signal te trajna pohrana i automatsko dohvaćanje svih propuštenih podataka
- **bez kalibracije** – bez uboda: tvornički kalibriran i vjerodostojan
- **bez nelagode i ograničenja**: elegantnog zaobljenog oblika i malih dimenzija uz čvrsto prianjanje
- **bez komplikacija**: jednostavna upotreba i uređaja i aplikacije.



SENZOR:

- za jednokratnu upotrebu = **14 DANA**
- integriran u ergonomski **automatski one-touch APLIKATOR** za jednostavno, brzo i bezbolno postavljanje senzora.




ODAŠILJAČ:

- dugotrajan (**2 godine**) i **punjiv**: **pouzdan i ekološki** (manje otpada)
- jedno brzo punjenje (max. 90 min, realno oko 20 min.) podržava 14-dnevni ciklus nošenja
- **PUNJAČ** (kućište za punjenje) i USB-C kabel su uključeni
- **odašiljač se stavlja na senzor** (nakon aplikacije senzora).



APLIKACIJA:

- **dostupna na hrvatskom** putem pametnih telefona (Android i iOS)
- **detaljne upute** korak po korak + video vodič za povezivanje i postavljanje
- **intuitivna i jednostavna** za korištenje, s jasnim prikazima i obavijestima.

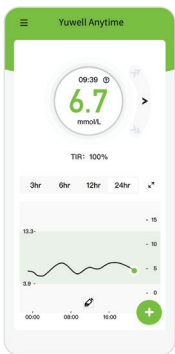

Početni zaslon:

- **trenutačno očitavanje** (svakih 3 min)
- **strelice trenda** glukoze
- **graf kretanja** glukoze (3, 6, 12 ili 24 h)
- **vrijeme u cilnom rasponu.**

Personalizacija:

- **individualno postavljanje donje i gornje granice = cilnog raspona**
- **bilježenje događaja:** obroci, lijekovi, inzulin, vježbanje (vrijeme i dodatne bilješke)
- **prilagodljiv način upozorenja:**
 - **± zvuk, ± vibracija** (vizualna obavijest na ekranu i kada je oboje isključeno)
 - mogućnost uključivanja/isključivanja svakog pojedinog alarma
 - alarm za hipoglikemiju < 3,1 mmol/L je uvijek aktivan bez mogućnosti isključivanja.

POVEZIVANJE I POSTAVLJANJE:

Yuwell Anytime

- **instaliranje aplikacije i registracija**
- e-mail za potvrdu (provjeriti neželjenu poštu)
- uključiti Bluetooth
- **slijediti upute u aplikaciji za jednostavno i brzo povezivanje i postavljanje.**

Povezivanje

1. PUNJENJE ODAŠILJAČA

napuniti odašiljač prije svake upotrebe (postavljanja na senzor) = plavo svjetlo i potom ga izvaditi iz punjača

2. POVEZIVANJE ODAŠILJAČA

u aplikaciji potvrditi SN odašiljača (serijski broj na odašiljaču)

3. POVEZIVANJE SENZORA

skenirati KOD senzora koji se nalazi na pakiranju – očitavanje počinje nakon 1 h.

Postavljanje

1. **SENZOR** (integriran u aplikator) zalijepiti na čisto i suho mjesto na nadlaktici ili trbuhu, otkočiti aplikator pa istovremeno stisnuti dva bočna gumba za otpuštanje senzora.

2. **ODAŠILJAČ** postaviti na senzor pod kutom (ukoso) i potom zakrenuti dok se ne čuje „klik”.

Priprema za novu sesiju

- nakon 14 dana ukloniti uređaj s tijela i pritiskom na kopču **odvojiti odašiljač od senzora.** Senzor odložiti u medicinski otpad, a odašiljač napuniti i koristiti na idućem senzoru.

PREDNOSTI ALARMA

ApWell Anytime CT3:

DODATNI ALARMI mogu kompenzirati „kašnjenje” razine glukoze u međustaničnoj tekućini u odnosu na krv

PREDIKTIVNI ALARMI unaprijed upozoravaju na moguće hipoglikemije i hiperglikemije što omogućuje pravovremenu reakciju i veću sigurnost.

UPOZORENJA U STVARNOM VREMENU:

- **niska glukoza** (postavljena donja granica)
- **visoka glukoza** (postavljena gornja granica)
- **nagli pad:** za više od 5 mmol/L u 30 min
- **nagli rast:** za više od 5 mmol/L u 30 min
- **prognoza niske glukoze:**
20 min prije 3,1 mmol/L
- **prognoza visoke glukoze:**
30 min prije 22 mmol/L
- **hipoglikemija** < 3,1 mmol/L
- gubitak Bluetooth veze.



Izvještaji i statistike:

- automatski generirani i uvijek vidljivi
- **DNEVNI PREGLED** za svaki dan pojedinačno: graf kretanja glukoze, prosječna, maksimalna, minimalna vrijednost
- **DETALJNI IZVJEŠTAJ** za ukupno (dosadašnje) vrijeme nošenja senzora: prosječna, maksimalna, minimalna vrijednost, HbA1c, 2-satna srednja postprandijalna glukoza, TIR, TAR, TBR (vrijeme unutar, iznad, ispod ciljnog raspona), razni grafički prikazi kretanja glukoze
- **AGP** (*engl. Ambulatory Glucose Profile*) standardizirani izvještaj
- **NEMOGUĆNOST PREKIDA I GUBITKA PODATAKA:** ako je pametni tel. izvan dosega / bez signala, ponovnim uparivanjem (približavanjem) **SVI propušteni podaci se automatski prenose**, bez vremenskog ograničenja („pamti” podatke svih 14 dana nošenja senzora).

Dijeljenje i prijenos podataka:

- **praćenje na daljinu** – dijeljenje podataka u stvarnom vremenu s do 20 osoba
- **Cloud** sustav za liječnike
- **Glooko** platforma
- **slanje izvještaja i AGP-a** direktno iz aplikacije (pdf).

HZZO OSNOVNA LISTA POMAGALA:

0325354019009 – ODAŠILJAČ
Yuwell Apwell Anytime CGM CT3
(odašiljač CT-300D)
1 kom / 2 god.

0325354020011 – SENZOR
Yuwell Apwell Anytime CGM CT3
(senzor CT-302) **do 7 kom / 3 mj.**

- maksimalno 26 senzora godišnje
- uz kvartalni set: 50 trakica + 50 lanceta
- dostupni i flasteri za dodatno pričvršćivanje.

INDIKACIJA 399 – osobe na intenziviranoj terapiji inzulinom (**4 i više doza inzulina**): bolesnici sa šećernom bolesti, cističnom fibrozom i nakon totalne i/ili distalne pankreatektomije. Slijepe osobe na inzulinu. Za osobe s navršениh 18 godina.

Dostupno i u slobodnoj prodaji bez dozname.

Yuwell Anytime – aplikacija za korisnike
Follow Anytime – aplikacija za pratitelje
(praćenje na daljinu npr. od strane obitelji)
yuwellview.com – Cloud za liječnike

EDUKACIJA I PODRŠKA:
091 4550 498 / 098 364 466

091 2344 362 podrška 24/7

SALVUS

Salvus d.o.o. Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica
www.salvushealth.com, info@salvushealth.com

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE.