

PROMO MEGA LASER

IL LASER CHE FA **CRESCERE** IL TUO CENTRO.

Risultati visibili fin dalla prima seduta.
Tecnologia **SHR** per trattamenti delicati e indolore.



Formule di pagamento
vantaggiose



Più trattamenti
più guadagno



Formazione
inclusa

ART. 9156

muster

MEGALaser 808

SHR Comfort



DA

373,00

✓ SENZA ANTICIPO

✓ PRIMA RATA DOPO **6** MESI



Scansiona e
scopri di più!

€/MESE + IVA

TAN 10,989 - TAEG 12,09

INCLUSO NELL'OFFERTA



**CARRELLO
SUPPORTER ART. 2026
COMPLETO DI
CASSETTO ART.2027**

in legno laccato
bianco
con cassetto
porta strumenti



**FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

Corso di formazione
avanzata con rilascio
dell'attestato
di legge



**ESTENSIONE
A 3 ANNI DI
GARANZIA**

Estensione di garanzia
fino a **3 anni** con
apparecchio di
cortesia gratuito



**ASSISTENZA
DEDICATA**

Supporto
tecnico sempre
al tuo fianco

Follow
us



Per maggiori informazioni
o per aderire all'offerta
contattaci al



Numero Verde
800 265330



Oppure via mail all'indirizzo
commerciale@musterbt.com

muster
BEAUTY TECHNOLOGY

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Offerta valida salvo approvazione dell'ente finanziatore convenzionato.

Prima rata a 180 giorni dalla stipula del contratto, salvo approvazione finanziaria.

Importo finanziato: €19.710,00+IVA.

Le condizioni economiche potrebbero variare in funzione del profilo del richiedente e della durata del finanziamento.

Offerta riservata a operatori professionali titolari di partita IVA con servizio aperto da almeno un anno.

Salvo errori ed omissioni.



CLIENTI MEDI ANNUI PER
UN CENTRO ESTETICO IN ITALIA

Tipo di centro	Clienti al giorno	Clienti al mese	Clienti all'anno
Piccolo	6	132	1.584
Medio	12	264	3.168
Grande	20	440	5.280

Un centro estetico in Italia serve in media circa
2.400 clienti all'anno
Fonti: Confartigianato Imprese Ufficio Parlamentare di Bilancio



Visto il numero medio dei clienti nei centri estetici italiani raggiungere il numero minimo previsto dalla “scheda incassi” è una certezza!

PREZZO DI LISTINO
€ 21.900,00 + IVA

ART. 9156



SE UN CENTRO ESTETICO HA MEDIAMENTE:

ESEMPIO DI SCHEDA INCASSI

NUMERO CLIENTI	TRATTAMENTI EFFETTUATI	NUMERO PACCHETTI	NUMERO SEDUTE PER PACCHETTO	PREZZO MEDIO A SEDUTA	PREZZO PER CLIENTE	TOT INCASSI ANNUI
25	trattamenti inguine + ascelle	25	10	65,00€	650,00€	16.250,00€
15	trattamenti mezza gamba + inguine	15	10	80,00€	800,00€	12.000,00€
15	trattamenti viso completo	15	10	30,00€	300,00€	4.500,00€
10	trattamenti gamba intera + inguine bikini	10	10	95,00€	950,00€	9.500,00€



TOTALE INCASSI ANNUI

42.250,00€



Più clienti soddisfatti



Maggior valore al tuo centro



Trattamenti efficaci e clienti fidelizzati

muster
MEGALaser 808
SHR Comfort

Art. 9156



ADDIO IRRITAZIONI E PELI INCARNITI

ADATTO A QUALSIASI
TIPO DI PELLE ANCHE
SE ABBRONZATE

PER TRATTAMENTI VISO E CORPO:

- REALMENTE INDOLORI
CON INNOVATIVO
SISTEMA SHR
- EFFICACI
- CONFORTEVOLI
- RAPIDI



SUPER HAIR
REMOVAL SYSTEM



LASER



TOUCH SCREEN

quali sono i vantaggi?




■ **RICRESCITA LENTA**, se non addirittura inesistente, grazie all'eliminazione del bulbo pilifero. Questo meccanismo produce un immediato riscaldamento e una conseguente distruzione delle cellule germinative del bulbo, dando vita al processo di Epilazione Progressiva Permanente.

■ Favorisce una **RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ** dei peli

■ **SHR SYSTEM:**
effetto **INDOLORE**



come funziona il laser?

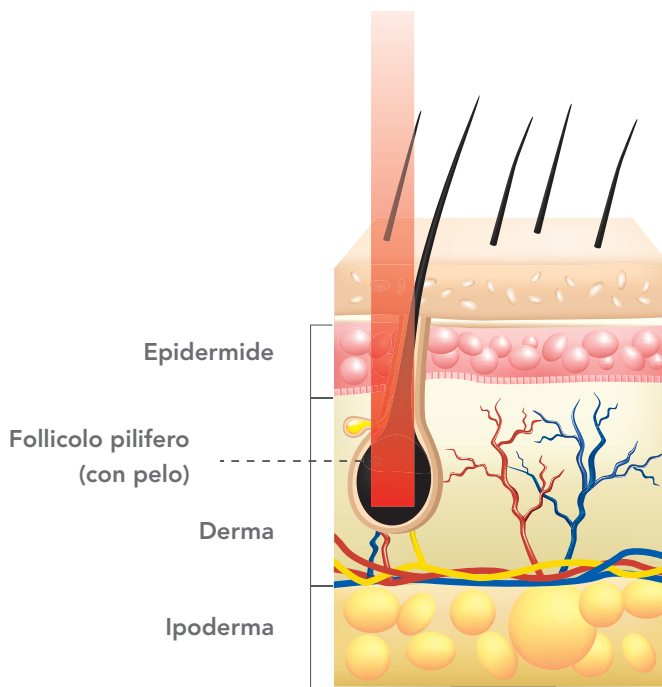

A differenza delle classiche tecniche di depilazione, che rimuovono solo il pelo, senza eliminare la matrice germinativa, l'epilazione laser consente di distruggerlo nella sua interezza, bulbo pilifero compreso.

Questa tecnologia sfrutta il principio della **FOTOTERMOLISI SELETTIVA** (ossia l'energia luminosa che si trasforma in calore una volta concentrata su un cromoforo) provocando la distruzione del bulbo e delle cellule che lo rigenerano, consentendo di ottenere risultati duraturi.

Il laser emette un fascio di onde unidirezionali e monocromatiche, a una frequenza tale da colpire selettivamente la melanina contenuta nei peli, surriscaldandoli e denaturandone le strutture vitali (in particolare il bulbo).

SI PUÒ TRATTARE QUALSIASI AREA DEL CORPO E DEL VISO DELLA DONNA... E DELL'UOMO!

DISPLAY TOUCH
+ PRATICO
+ VELOCE
+ COMODO

AREA DI SPOT
14X14 mm
(196 mm²)

il manipolo

- **LEGGERO, ERGONOMICO E BILANCIATO** per trattamenti in totale sicurezza e massima comodità. Visuale dell'area da trattare e scorrimento sulla cute migliorati grazie **ALL'INNOVATIVA FORMA DELLA NUOVA TIP FRONTALE** del manipolo.

- **DISPLAY TOUCH** con comandi semplici ed intuitivi:

+ PRATICO + VELOCE + COMODO

- Lunghezza d'onda 808nm e 12 BARRE LED da 50 W cad.

- Modalità di lavoro: sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo

- Dimensione spot: 14mm x 14mm
(196 mm²)

- Area Spot raffreddata: da -5°C a +5°C (regolabile)

- Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)

- Densità di Energia Max 40 J/cm²

- Sistema di emissione laser:
Pulsante + Pedale

- Vita media manipolo: 10.000.000 di spot*


* il manipolo laser art.99520 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.

IMPUGNATURA ERGONOMICA

NUOVA TIP

PROTEZIONE ANTI-PIEGA

LACCETTO DI SICUREZZA

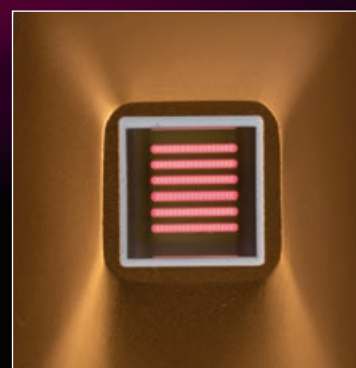

NUOVO DESIGN PORTA MANIPOLO: più resistente, con gomma antiscivolo per un collocamento sicuro del manipolo.

LONG LIFE CONTROL SYSTEM: polarizzazione avanzata dei diodi laser per una maggiore durata e performance elevate.

display

Software intuitivo e
semplice

AMPIO DISPLAY FULL HD TOUCH SCREEN DA 11,6" CON INCLINAZIONE REGOLABILE

per adattare la visione in qualsiasi condizione.

INTERFACCIA GRAFICA
CON SOFTWARE MODERNO ED
ESTREMAMENTE INTUITIVO
con comandi e sensibilità migliorati per
RISULTATI STRAORDINARI.



top
quality
design





SHR (Super Hair Removal) SYSTEM

Sfoltimento iniziale indolore, mediante l'impiego automatico di fluenze basse e frequenze alte.

SHR surriscalda gradualmente il pelo raggiungendo l'obiettivo e, contemporaneamente, abitua la pelle al calore riducendo al minimo la sensazione di dolore.

Dopo aver effettuato l'anamnesi della cliente e selezionata l'area da trattare, Mega Laser 808 imposta automaticamente i parametri corretti da utilizzare per il **TRATTAMENTO INDOLORE**.

INDICAZIONE: la modalità **SHR** è consigliata per lo sfoltimento iniziale dei peli (prime 1-2 sedute) per un **TRATTAMENTO INDOLORE** e una **RIDUZIONE DEI PELI EFFICACE E VISIBILE SUBITO**.


Successivamente, si consiglia di passare alla modalità di lavoro senza l'impiego del metodo SHR.

trattamenti sicuri

- NUOVO SOFTWARE:

veloce, moderno, intuitivo

- Solo pochi secondi per un'anamnesi completa
- Mega Laser 808 imposta automaticamente tutti i parametri idonei al trattamento
- Premere start e iniziare il trattamento in totale sicurezza.

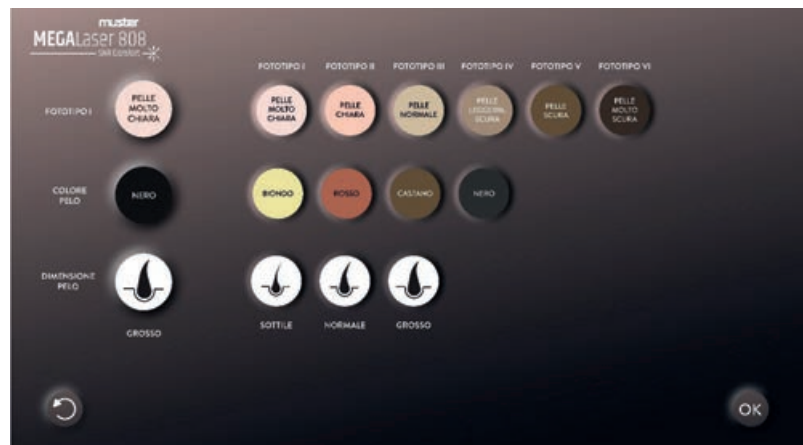

i punti di forza

REDDITIVITÀ

Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento.

PROFITTO

L'elevata redditività del trattamento consente elevati guadagni per l'Istituto. Ciò grazie anche alla possibilità d'integrare più trattamenti di epilazione su differenti parti del corpo, addirittura nella stessa seduta.

MAGGIOR INCASSO!

VELOCITÀ

Velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la Cliente, che ha sempre meno tempo disponibile.

FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA

Risultati visibili da subito.

SICUREZZA

Software di utilizzo e di controllo delle funzioni con anamnesi incorporata + Qualità dei materiali impiegati + Protocolli collaudati, permettono di lavorare per 12 mesi all'anno, anche su pelli abbronzate.

CONFORTEVOLE TRATTAMENTO INDOLORE CON PROTOCOLLO SHR.

Raffreddamento ad elevata intensità con doppio circuito.



MIRATO

Grazie alla nuova Tip frontale del manipolo, ottimi risultati anche su aree difficili come gomiti, ginocchia, mento, baffetti...

AVANGUARDIA E DESIGN

Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che racchiude tecnologia ad altissimo livello.



SUPER VANTAGGI OPERATORE

- **TECNOLOGIA INNOVATIVA** CHE MIGLIORA IL COMFORT E L'ASSORBIMENTO DELLA LUCE
- NON VIENE RICHIESTO ALCUN ANESTETICO TOPICO O RAFFREDDAMENTO SECONDARIO
- **RIDUZIONE** DEI TEMPI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **75%**
- **RIDUZIONE** DEI CICLI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **40%**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE AMPIE ZONE IN **POCHISSIMO TEMPO**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE (CON CAUTELA) ANCHE I FOTOTIPI PIÙ SCURI



SUPER VANTAGGI CLIENTE

- **TRATTAMENTI MOLTO PIÙ RAPIDI**, MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DEL PROPRIO TEMPO
- **TRATTAMENTI PIÙ CONFORTEVOLI** CHE INCORAGGIANO L'APPROCCIO DEL CLIENTE VERSO IL SISTEMA E LO CONVINCONO A PROSEGUIRE SINO AL SUO COMPLETAMENTO.
- IL CICLO DI TRATTAMENTI (MOLTO PIÙ VELOCE RISPETTO ALLE PRECEDENTI TECNOLOGIE) MIGLIORA I RISULTATI E LA SODDISFAZIONE
- LA VELOCITÀ DI ESECUZIONE RENDE ACCESSIBILI, PER TEMPO E DENARO, ANCHE LE ZONE PIÙ ESTESE (GAMBE, SCHIENA, ECC...)
- **NESSUNA SENSAZIONE DI DOLORE CON PROTOCOLLO SHR**



caratteristiche tecniche

Sorgente Laser a diodo
Lunghezza d'onda 808 nm (nanometri)
Potenza Laser 600 Watt
Dimensione Spot manipolo 14 x 14mm (196mm²)
Modalità di lavoro sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo
Fluenza 1÷40 J
Densità energia Max 40 J / cm²
Area Spot raffreddata da -5°C a +5°C (regolabile)
Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
Sistema di emissione laser Pulsante + Pedale
Schermo Full HD Touch-screen a colori da 11.6" con inclinazione regolabile
Numero di barre laser 12 barre da 50W cad.

Tempo a seduta Tempi Ridotti per zona
 Esempio: 4/6 min.
Velocità Impulso Fino a 10 spot secondo
Numero sedute per zona Da 5 a 7
Fototipi trattati Tutti fino al VI°
Raffreddamento Acqua a circuito integrato
Raffreddamento Manipolo Celle di Peltier (Tecnologia sicura ed innovativa) + acqua e aria
Vita Manipolo Fino a 10.000.000 di spot* (effettuati a valore medio di potenza)
Periodicità Stagionale 12 mesi all'anno
Effetti sulla pelle indolore con SHR SYSTEM
Ambiente in Istituto Nessun Odore



dati tecnici

Alimentazione 220 - 240V ~ 50/60Hz – 2200W
Dimensioni apparecchio 59x40x41 cm
Dimensioni apparecchio con porta manipolo montato 59x46,5x41 cm
Dimensioni imballo 73x50x58,5 cm
Peso apparecchio 36,5kg
Peso apparecchio con imballo 50kg

* il manipolo laser art.99520 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.

Il Laser per epilazione Mega Laser 808 è un'apparecchiatura conforme alle normative in vigore che regolamentano il Settore Estetico e precisamente:

- Decreto 12 maggio 2011 n.110, e
- Decreto 15 ottobre 2015 n. 206.
- Scheda Tecnico Informativa n. 21b.
- Categoria: LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER L'EPILAZIONE.
- Elenco apparecchi: Laser per epilazione estetica.

i

accessori inclusi mega laser 808



n. 1 pezzo

Art. 600430
ciotola



n. 1 pezzo

Art. 16242
Spatola



n. 1 pezzo

Art. 99511
Pedale



n. 1 pezzo

Art. 99227
Occhiali protezione operatore



n. 1 pezzo

Art. 99512
Kit carico acqua pert art. 9155 - 9156



n. 5 pezzi

Art. 9999
Occhiali protezione cliente

accessori inclusi mega laser 808



n. 1 pezzo

Art. 99236

Acqua Ultra Pura in tanica
da 5 litri



n. 1 pezzo

Art. 99500

set 2 chiavi con porta chiavi



n. 1 pezzo

Art. 99425

Jelly Gel All in One - New Formula
5 Kg

MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:

- LASER
- LUCE PULSATA
- SOFT LASER
- R.F. RADIO FREQUENZA
- ULTRASUONO
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

Art. 99521

Manipolo Mega Laser 808 con touch Screen multifunzionale



n. 1 pezzo

Art. 91560149071

Connettore maschio interlock per
9155/9156/9158

merchandising mega laser 808



n. 1 pezzo

Art. 99523

Roll-up Istituto dim. 80x200cm



n. 2 pezzi

Art. 21956

Dépliant informativo
consumatrice

(1 pezzo contiene 50 dépliant)

ADDIO AI PELI
SUPERFLUI,
PELI INCARNITI O
FOLLICOLITI

SENZA DOLORE!

