


Umfang und Anforderungen, um STVZO-Kit am Kundenrollstuhl befestigen zu können

Diese Information unterstützt Sie dabei, **vor Einsendung des Kundenrollstuhls** zu prüfen, ob das STVZO-Kit (Artikel Nummer: 47609100-ET) am jeweiligen Kundenrollstuhl montierbar ist. Zur Montage müssen **ausreichende freie Flächen** und **zentrale Befestigungsmöglichkeiten** am Rollstuhlrahmen verfügbar sein.

STVZO-Kit

- Platte mit Bohrungen (Hauptträger)
- Spiegel-/Reflektorarm (rechts)
- Querschienen zur Befestigung am Rollstuhl
- Befestigungsklemmen / Schellen
- Schrauben & Unterlegscheiben

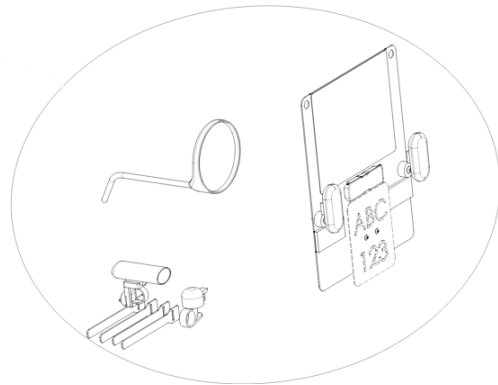

Sie müssen sicherstellen, dass **alle Komponenten am Rollstuhlrahmen montierbar sind**, bevor das Produkt eingesendet wird.

Checkliste für Sie (vor Einsendung)

Die nachfolgenden Maße sind kritisch, um sicherzustellen, dass das Bauteil montierbar ist und nicht mit Bauteilen des Rollstuhls kollidiert.

A. Rollstuhlgeometrie

- Ist ein freier Bereich von **mind. 310 × 260 mm** vorhanden?
- Liegt eine annähernd **senkrechte Fläche** vor?
- Gibt es **stabile Rahmenrohre** für die Befestigung?

B. Kompatibilität

- Keine Kollision mit:
 - Rückenbespannung
 - Taschen / Netzen
 - Bremsen
 - Schiebegriffen / Begleitgriffen

C. Kennzeichen-Sichtbarkeit

- Sichtwinkel gemäß STVZO (max. 45° Abweichung) gewährleistet?
- Keine optische Abschattung durch Zubehör?

D. Anbaupraktikabilität

- Genügend Raum für Werkzeuge/Zugang?
- Rohrdurchmesser passend?

Hinweis

Falls die erforderlichen Maße oder Befestigungspunkte **nicht** vorhanden sind, kann Sunrise Medical den Anbau **nicht durchführen**. Der Rollstuhl wird in diesem Fall **ungeprüft zurückgesendet**.