

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

NOM DU PRODUIT :

Erland Care - Protective Skin

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Protective Skin est une compresse imperméable au silicium superabsorbant. Protective Skin peut absorber n'importe quel type de plaies, des modérées aux fortement exsudantes. La compresse convient aux utilisateurs à la peau fine et aux utilisateurs facilement exposés aux lésions cutanées. Protective Skin est mince et flexible et peut facilement être appliquée sur les articulations où il pourrait être difficile autrement de trouver des compresses fonctionnelles qui s'appliquent bien sur la peau. Protective Skin peut facilement être appliquée et enlevée de la peau sans décapage de la peau.

En présence de liquides de plaie, les fibres superabsorbantes du coussinet formeront un gel humide qui aide à maintenir un environnement humide propice aux conditions naturelles de guérison.

Les produits Protective Skin peuvent également être utilisés comme compresse pour les plaies péristomiales, comme recouvrement de protection et de stomie et comme plaque de protection de la peau de stomie.

Protective Skin se compose de :

- Une couche de silicone perforée, souple et douce, en contact avec la peau
- Un coussinet intérieur avec de fortes propriétés de rétention de fluide.
- Un film de polyuréthane respirant

Remarque :

- Protective Skin est indiqué pour un usage externe uniquement
- Protective Skin n'arrête pas les saignements

2. INDICATIONS :

Les produits Protective Skin peuvent être appliqués sur des plaies sèches et modérées à fortement exsudantes telles que : Plaies de lit, ulcères de stomie, recouvrement de stomie, ulcères veineux et artériels de jambe, ulcères de diabète, brûlures de premier et deuxième degré et plaies traumatiques.

Les produits peuvent également être utilisés en plus d'autres produits. Plusieurs compresses peuvent être superposées les unes sur les autres dans les cas où il y a des liquides de plaie considérables.

3. CONTRE-INDICATIONS

Protective Skin est contre-indiquée dans les cas de :

- D'ulcères résultant d'une infection telle que la tuberculose ou la syphilis
- Brûlures au troisième degré
- Patients allergiques aux matériaux superabsorbants et/ou au silicium

Si un signe d'irritation ou d'infection se produit ou si l'état de la plaie s'aggrave, contactez l'autorité médicale appropriée. Reprendre l'utilisation quand l'état de guérison le permet.

4. PRÉCAUTIONS

Le produit n'est pas hémostatique et ne doit en aucun cas être utilisé sur des plaies saignantes.

5. INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR

5a. Utilisation sur des plaies :

1. Nettoyez soigneusement la zone de la plaie à l'aide d'un désinfectant ou d'un liquide neutre.
2. Retirer Protective Skin de l'emballage.
3. Retirer délicatement une partie du plastique deux pièces et fixer la compresse à la peau. Ensuite, faire la même chose avec l'autre moitié.
4. Il est important d'éviter les plis. Essayer d'obtenir la surface de compresse aussi lisse que possible.

5b. Utilisation comme plaque cutanée – Voir illustrations

5c. Enlèvement/changement de compresse

Le volume d'exsudat détermine l'intervalle entre les changements de compresses de Protective Skin. Il faut la changer dès qu'elle est saturée. La capacité superabsorbante à absorber les liquides entraîne moins de changements de compresse.

6. REMARQUES PARTICULIÈRES

Protective Skin est un article à usage unique. Une fois que le produit est retiré de la poche, il est classé comme utilisé. Il ne doit pas être réutilisé.

7. INCIDENTS GRAVES

Tout incident grave survenant suite à l'utilisation du produit doit être immédiatement signalé au fabricant et à l'autorité de santé de votre pays de résidence.

8. CONDITION DE STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

À stocker dans un endroit sec

Durée de conservation du produit : 3 ans

Fabriqué par :
Global Health Technology AS,
Løkkeveien 107-111
4007 Stavanger, Norvège