

SE

BRUKSANVISNING

PRODUKTNAMN:

Erland Care - Protective Skin

1. PRODUKTBESKRIVNING

Protective skin är ett vattentätt superabsorberande förband av silikon. Protective Skin kan absorbera allt från måttliga till kraftigt exuderande sår. Förbandet lämpar sig för användare med tunn hud och användare som lätt exponeras för hudskador. Protective Skin är tunt och flexibelt och kan enkelt appliceras i leder där det annars kan vara svårt att hitta funktionella förband som sitter bra på huden. Protective skin kan enkelt fästas på och tas bort från huden utan att det lossnar hud.

I närvaro av sårvätskor kommer de superabsorberande fibrerna i dynan att bilda en fuktig gel som bidrar till att upprätthålla en fuktig miljö som främjar förhållanden för naturlig läkning.

Protective Skin-produkterna kan också användas som förband för peristomala sår, om skydd och stomilock och som stomiskyddsplatta.

Protective Skin består av:

- Ett perforerat kontaktskikt av mjukt silikon
- En inre dyna med mycket bra vätskebindande egenskaper.
- En ventilerande polyuretanfilm

Observera:

- Protective Skin är endast avsett för externt bruk
- Protective Skin stoppar inte blödningar

2. INDICERINGAR:

Protective Skin-produkterna kan appliceras på torra och måttligt till kraftigt exuderande sår, såsom: liggsår, stomisår, stomilock, venösa och arteriella bensår, diabetessår, första och andra gradens brännskador och traumatiska sår.

Produkterna kan också användas ovanpå andra produkter. Flera förband kan läggas på varandra i fall där det finns betydande mängder sårvätskor.

3. KONTRAINDIKATIONER

Protective Skin är kontraindicerat för:

- Sår som är resultatet av en infektion, såsom tuberkulos eller syfilis
- Tredje gradens brännskador
- Patienter som är allergiska mot superabsorberande material och/eller silikon

Vid tecken på irritation eller infektion eller om sårtilståndet försämras, kontakta lämplig medicinsk myndighet. Återuppta användningen när såret läker normalt.

4. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Produkten är inte hemostatisk och får inte användas på blödande sår.

5. ANVÄNDARINSTRUKTIONER

5.a Ved bruk på sår:

1. Rengör försiktigt sårområdet med hjälp av desinfektionsmedel/neutral vätska.
2. Ta ut Protective Skin-produkten från förpackningen.
3. Dra försiktigt bort den ena av de två plastdelarna och fäst förbandet på huden. Gör därefter samma sak med den andra halvan.
4. Det är viktigt att undvika att det uppstår veck i förbandet. Försök att få förbandsytan att bli så slät som möjligt.

5.b Vid användning som hudplatta för peristomala sår - Se illustration.

5.c Borttagning/byte av förband

Volymen av exsudat avgör hur ofta Protective Skin-förbandet behöver bytas. Produkten bör bytas ut så snart den är helt mättad. Superabsorbentens förmåga att absorbera vätskor resulterar i färre förbandsbyten.

6. SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR

Protective Skin är en engångsartikel. När produkten har tagits ut ur påsen klassificeras den som använd. Produkten får då inte återanvändas.

7. ALLVARLIGA HÄNDELSER

Om en allvarlig situation uppstår till följd av att produkten används, måste detta omedelbart rapporteras till tillverkaren och hälsovårdsmyndigheterna i det land där du bor.

8. FÖRVARING OCH PRODUKTENS HÅLLBARHETSTID

Produkten ska förvaras torrt.

Produktens hållbarhetstid: 3 år

Tillverkad av:
Global Health Technology AS,
Løkkeveien 107-111
4007 Stavanger, Norge