

	INSTRUKCJA UŻYCIA	Czerwiec 2025 r.
	Starazolin Hydro Night krople do oczu, 10 ml	strona: 1/4

Starazolin Hydro Night

krople do oczu, 10 ml

Instrukcja użycia – należy uważnie przeczytać

SKŁAD

0,4% hialuronian sodu, chlorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, wodorofosforan sodu, woda oczyszczona.

Nie zawiera konserwantów.

PRZEZNACZENIE

Krople do oczu **Starazolin Hydro Night** są przeznaczone do stosowania w celu **łagodzenia objawów ciężkiej postaci suchego oka**.

Krople do oczu **Starazolin Hydro Night** dla suchych i podrażnionych oczu zawierają **sól sodową kwasu hialuronowego**, który naturalnie występuje w oku oraz w innych częściach ciała człowieka. Hialuronian sodu jest ważnym składnikiem cieczy wodnistej i ciała szklistego w oku. Po każdym mrugnięciu powiek hialuronian sodu **tworzy ochronną powłokę na powierzchni oka**. W ten sposób **skutecznie usuwa uczucie suchości i obecności piasku pod powiekami oraz pieczenie i podrażnienie**.

Starazolin Hydro Night to krople do oczu o wysokiej lepkości, odpowiednie do codziennego stosowania i do pielęgnacji oczu w nocy. Zawartość hialuronianu sodu w wysokim stężeniu zapewnia dłuższe utrzymywanie się na powierzchni oka, a także stabilizuje i uzupełnia film łzowy, co daje długotrwały efekt nawilżenia i ochronę oka.

Krople do oczu **Starazolin Hydro Night** stosuje się również w przypadku suchych i podrażnionych oczu **po zabiegach chirurgicznych** oraz w przypadku suchości oczu spowodowanej przez **leki przeciwzapalne podawane do oka** (po konsultacji z lekarzem).

Czynnikami ryzyka wystąpienia zespołu suchego oka, czyli zaburzeń filmu łzowego spowodowanych niedoborem łez lub ich nadmiernym parowaniem (co może prowadzić do uszkodzenia powierzchni oka i objawów dyskomfortu), są:

- **warunki środowiskowe** (centralne ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie jarzeniowe, zanieczyszczenie powietrza, dym i wiatr)
- **współczesny styl życia** (długotrwała praca przy komputerze, mieszkanie, praca i podróżowanie w klimatyzowanych pomieszczeniach)
- **starzenie się** (zespół suchego oka występuje u 75% populacji osób w wieku powyżej 65 lat)
- **pleć** (zmiany hormonalne u kobiet w czasie ciąży, karmienia piersią, miesiączkowania lub menopauzy)
- **noszenie soczewek kontaktowych**
- **zabiegi chirurgiczne** lub uszkodzenie oka
- obecność ciała obcego w oku
- **stosowanie leków** (przeciwdepresyjnych, przeciwnadciśnieniowych, środków antykoncepcyjnych)
- stosowanie kropli do oczu zmniejszających przekrwienie

	INSTRUKCJA UŻYCIA	Czerwiec 2025 r.
	Starazolin Hydro Night krople do oczu, 10 ml	strona: 2/4

- **choroby** (reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca, astma, choroby tarczycy, jaskra).

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Kiedy nie stosować kropli Starazolin Hydro Night:

- W przypadku nadwrażliwości (alergii) na hialuronian sodu lub którykolwiek z pozostałych składników kropli do oczu **Starazolin Hydro Night**.
W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i zgłosić się do lekarza.

Inne uwagi:

- Nie stosować produktu, jeśli widoczne jest uszkodzenie butelki lub zakraplacza kropli do oczu **Starazolin Hydro Night**.
- Aby zapewnić bezpieczne stosowanie i higienę, każda butelka powinna być używana tylko przez jedną osobę.
- Nie są znane interakcje kropli do oczu **Starazolin Hydro Night** z płynami do pielęgnacji soczewek kontaktowych, innymi kroplami do oczu lub stosowanymi miejscowo maściami do oczu.
- W przypadku stosowania innego produktu do oczu należy odczekać co najmniej 15 minut przed jego podaniem do oka.

Uwaga:

Po podaniu krople do oczu **Starazolin Hydro Night** mogą spowodować krótkotrwale niewyraźne widzenie. W związku z tym zaleca się powstrzymanie od prowadzenia samochodu i obsługiwanie pojazdów lub maszyn dopóki nie powróci prawidłowa ostrość wzroku.

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA PRODUKTU

Zakraplacz zawiera wbudowany filtr, który zapewnia bezpieczeństwo stosowania produktu, ponieważ zapobiega zanieczyszczeniu kropli do oczu i pozwala zachować **jałowość zawartości opakowania nawet przez 6 miesięcy po otwarciu**.

Krople **Starazolin Hydro Night** **nie zawierają konserwantów**, dzięki czemu prawdopodobieństwo podrażnienia i uszkodzenia powierzchni oka jest mniejsze.

Produkt jest na ogół dobrze tolerowany. Jeśli jednak wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić Producentowi oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pocztą elektroniczną (adres: incydenty@urpl.gov.pl), faksem (nr faksu: 22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa).

JAK STOSOWAĆ krople do oczu Starazolin Hydro Night

Krople do oczu **Starazolin Hydro Night** należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użycia. W razie wątpliwości przed zastosowaniem produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

	INSTRUKCJA UŻYCIA	Czerwiec 2025 r.
	Starazolin Hydro Night krople do oczu, 10 ml	strona: 3/4

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy **wkraplać 1-2 krople do oczu kilka razy na dobę, w zależności od potrzeb**. Mrugnąć kilka razy, aby równomiernie rozprowadzić kroplę na powierzchni oka.

Produkt nadaje się do długotrwałego stosowania.

Przy prawidłowym stosowaniu jedna **butelka o poj. 10 ml** wystarcza na **ponad 30 dni** stosowania.

Unikać kontaktu końcówki zakraplacza z powierzchnią oka lub jakąkolwiek inną powierzchnią.

Przed pierwszym podaniem kropli do oka należy **uaktywnić mechanizm butelki**. W tym celu należy zdjąć zatyczkę z pompki, odwrócić butelkę do góry dnem i **kilkakrotnie nacisnąć zakraplacz, aż pojawi się pierwsza kropla**.


Informacja dla osób noszących soczewki kontaktowe:

Krople do oczu **Starazolin Hydro Night** można stosować z soczewkami kontaktowymi i nie trzeba wyjmować soczewek przed podaniem ich do oka.

Stosowanie kropli do oczu **Starazolin Hydro Night** zwiększa komfort podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Instrukcja użycia:

1. Dokładnie umyć ręce.
2. Zdjąć zatyczkę z pompki (rysunek 1).
3. Chwycić pompkę ręką, jak na rysunku 2.
4. Odwrócić butelkę do góry dnem i naciskać aplikator, aż pojawi się pierwsza kropla (rysunek 3).
5. Odchylić głowę do tyłu i ostrożnie wpuścić 1 kroplę do oka (rysunek 4).
6. Nałożyć zatyczkę na pompkę.

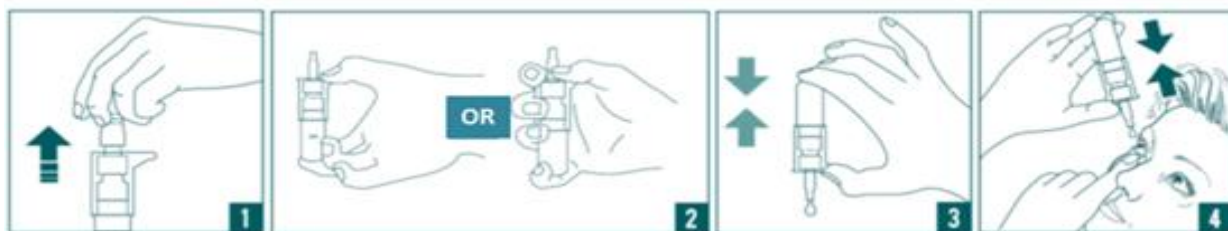

1. Zdjąć zatyczkę z pompki.
2. Chwycić pompkę ręką jednym z dwóch sposobów pokazanych na rysunku 2.
LUB
3. Odwrócić butelkę do góry dnem i uruchomić pompkę, naciskając ją, aż pojawi się pierwsza kropla.
4. Przytrzymać butelkę do góry dnem i naciskając pompkę, zakropić do oka przepisaną liczbę kropli.



AN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Chorwacja



	INSTRUKCJA UŻYCIA	Czerwiec 2025 r.
	Starazolin Hydro Night krople do oczu, 10 ml	strona: 4/4

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska
(logo Polpharma)

TERMIN WAŻNOŚCI

Wydrukowano na opakowaniu.

Termin ważności po otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać produkt w temperaturze poniżej 30°C w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

OPAKOWANIE

10 ml




DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI

Czerwiec 2025 r.

Objaśnienie symboli na produkcie

Symbol	Objaśnienie
	Przeczytać instrukcję użycia
	Wyrób medyczny
	Producent
	Dystrybutor
	Termin ważności
	Numer serii
	Produkt jałowy, sterylizowany z zachowaniem zasad aseptyki
	Górna wartość graniczna temperatury 30°C
	Zastosowanie wielokrotne u jednego pacjenta

	INSTRUKCJA UŻYCIA	Czerwiec 2025 r.
	Starazolin Hydro Night krople do oczu, 10 ml	strona: 5/4

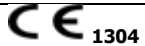	Nie używać produktów uszkodzonych ani przekłutych.
	Uwaga, patrz Instrukcja użycia (zawierająca istotne ostrzeżenia/środki ostrożności)
	Znak CE z numerem Jednostki Notyfikowanej