



myoncare

Gesundheitsindikator, Scores & Benutzerdefinierte Formeln

Version 1.12





Gesundheitsindikator


Der Gesundheitsindikator im Careplan Manager ist eine optionale Funktion, die nur für medizinisches Fachpersonal sichtbar ist.

Dieser Indikator ist innerhalb der Patientenliste als farbcodierter Ring um das Profilbild des jeweiligen Patienten sichtbar. Die Reihenfolge der Gesundheitsindikatoren wird standardmäßig: '**Schlecht**', '**Mäßig**', '**Gut**' und '**Neutral**' sein. Er errechnet sich aus den Antworten eines Patienten und den Werten, mit denen die Komponenten bewertet wurden (falls zutreffend).

Der Indikator ist eine Berechnung, die auf den Scorings der Patienten-Antworten aller Caretasks basiert, für die die Wertungs-Funktion aktiviert wurde. Zusätzlich werden in der Registerkarte 'Status Geändert' in der Patienten Liste jene Patienten hervorgehoben, deren Gesundheitsindikatoren kürzlich rot oder gelb geworden sind. Diese Funktion hilft dem medizinischen Fachpersonal, Patienten, die sofortige Aufmerksamkeit benötigen, schnell zu identifizieren und zu priorisieren. Sobald der Arzt auf die Daten des Patienten klickt und diese überprüft, wird der Patient aus der 'Status geändert'-Liste entfernt und ist nur noch in der Liste 'Bestehende Patienten' zu sehen.

Der Gesundheitsindikator präsentiert ausschließlich, ob der Patient sich in einem '**Schlechten**', '**Mäßigen**', '**Guten**', oder '**Neutralen**' Zustand befindet.

Die Wertebereiche dieser drei Zustände werden von der medizinischen Fachkraft bei der Erstellung des jeweiligen Caretasks definiert. Der Indikator stellt den schlechtesten erreichten Wert einer Aufgabe dieses Patienten dar, die aktiv ist und bevorstehende Ereignisse hat. Um die Detailergebnisse des Patienten und dessen Aufgabe einzusehen, können Anwender auf die Detailansicht des entsprechenden Patienten navigieren und anschließend „**Ergebnisse anzeigen**“ bei der gewünschten Aufgabe auswählen.

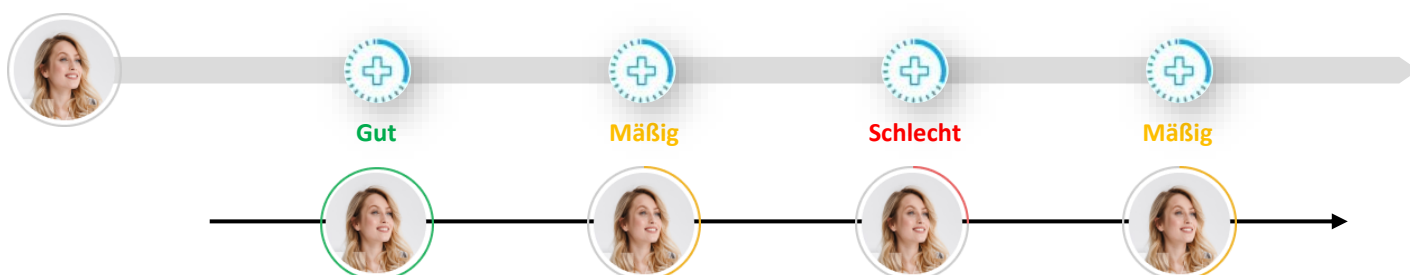



Um die Detailergebnisse des Patienten und seiner Aufgaben einzusehen, klicken Sie auf die Detailansicht des entsprechenden Patienten und wählen Sie dann bei der gewünschten Aufgabe **"Ergebnisse anzeigen"** aus. Die Schwellenwerte für die Farbskala des Indikators werden mit drei Farben initialisiert: Grün steht für einen guten Gesundheitszustand; Orange steht für einen mittleren bis unterdurchschnittlichen Gesundheitszustand und Rot soll Angehörige der Gesundheitsberufe auf einen sich verschlechternden oder schlechten Gesundheitszustand hinweisen. (Die Bewertungen von Gut, Mäßig und Schlecht müssen von einer medizinischen Fachkraft definiert werden.) Falls der Patient auf keine Aufgabe mit Wertung geantwortet hat oder keine Verbindung zu myoncare hergestellt hat, wird die Farbe des Gesundheitsindikators grau, wie unten dargestellt, sein:



Scoring

Die Anwendung von Wertungen von Komponenten und/oder Antwortoptionen ermöglicht es der medizinischen Fachkraft, eine mehrstufige Auswertung durchzuführen, um eine Rangfolge oder Wertungen einzelner Komponenten und ihrer individuellen Antwortoptionen festzulegen. Unter Komponenteneinstellungen (rechte Seite des Bildschirms) muss der Schieberegler aktiviert werden, um eine Wertung festzulegen.

Für verschiedene Arten von Komponenten wird das Bewertungssystem maßgeschneidert, um Genauigkeit und Relevanz sicherzustellen.

- **Komponenten für Freitext, Ja/Nein, Schmerzortdiagramm und Abschnitt:** Diese Komponenten haben eine einzige Punktzahl, die von der medizinischen Fachkraft festgelegt wird, und werden so bei ihrer Beantwortung berücksichtigt.
- **Single-Choice- und Multiple-Choice-Komponenten:** Jede Auswahloption kann eine individuelle Punktzahl haben, die von der medizinischen Fachkraft festgelegt wird. Die Punktzahl wird durch die jeweils ausgewählte Option bestimmt.



- **BMI und Blutdruckkomponenten:** Diese Komponenten enthalten vordefinierte Kategorien, für die Punktzahlen individuell vergeben werden können. Wenn der Patient auf den Caretask antwortet, werden seine Antworten entsprechend kategorisiert und die Punktzahl wird auf dieser Grundlage bestimmt.
- **Ranking-Komponenten:** Jeder Option in einer Ranking-Komponente kann eine eigene Punktzahl zugewiesen werden. Die grundlegende Bewertungsrichtlinie wird dabei durch die medizinische Fachkraft festgesetzt. Wenn der Patient alle Optionen bewertet, werden die Punktzahlen der einzelnen Optionen in die Berechnung der Gesamtpunktzahl einbezogen.
- **Komponenten des Numerischen Wertebereichs und der Numerischen Eingabe:** Die Punktzahl entspricht dem Wert, den der Patient oder das medizinische Fachpersonal bei der Beantwortung des Caretasks eingegeben hat.
- **Information, Datumsanfrage und Dateianfrage:** Für diese Komponenten können keine Wertungspunkte aktiviert werden.

The screenshot shows the 'Komponenten' (Components) section of the Caretask editor. A component titled 'Please Rank the most symptoms you feel' is selected. It lists various symptoms with checkboxes and a rating scale from 0 to 10. A blue box highlights the 'Wertung' (Rating) section on the right, which shows the rating for each symptom. A blue arrow points to the 'Wertung' toggle switch, which is currently turned on.

Symptom	Wertung
Allergies	1
Anemia	1
Asthma	1
Diabetes	3
Dizziness	1
Bleeding	1
Fainting	3
Headaches	1

Caretask-Einstellungen

Komponenten



Kategorisieren via Gesundheitsindikator

Score-Summe ⓘ

15

Mit Datenlabel verbinden



Gut

0

Min

4

Max

Komponente hinzufügen



Mäßig

5

Min

11

Max

Komponente hinzufügen



Schlecht

12

Min

15

Max

Komponente hinzufügen



Benutzerdefinierte Formeln

Gesundheitsfachkräfte können mehrere Punktzahlen berechnen, indem sie benutzerdefinierte Formeln in den Einstellungen des Caretask erstellen. Um loszulegen, aktivieren Sie einfach die Option „Benutzerdefinierte Formel“. Sobald sie aktiviert ist, erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms eine Schaltfläche mit der Bezeichnung „Sub-Score hinzufügen“. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Gesundheitsfachkraft ein Abschnitt mit der Bezeichnung „Sub-Score 1“ und zwei Textfeldern zum Eingeben eines Titels und einer gültigen Formel angezeigt.

Es sind maximal 10 Abschnittsformeln erlaubt. Um eine weitere Abschnittsformel hinzuzufügen, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Sub-Score hinzufügen“, und ein neuer Abschnitt mit der Bezeichnung „Sub-Score n“ (wobei „n“ eine Zahl zwischen 2 und 10 ist und sich mit jeder neuen hinzugefügten Abschnittspunktzahl erhöht) wird mit eigenen Titel- und Formeltextfeldern angezeigt. Durch Klicken auf die „Löschen“-Schaltfläche neben einem Abschnitt wird dieser aus der Liste entfernt.



We make healthcare scalable.

www.myon.academy | www.myoncare.com

Bei Fragen: service@myoncare.com