



myoncare

Caretasks

Version 1.12





Caretasks

Zugewiesene Caretasks und ihre Ergebnisse/Antworten können überprüft werden.



Wenn Sie im Aktionsmenü in der Detailübersicht eines Patienten die Option "**Caretask zuweisen**" auswählen, wird automatisch der Workflow für die Zuweisung von Caretasks geöffnet und das medizinische Fachpersonal wird aufgefordert, einen Caretask aus einer vorhandenen Vorlage zuzuweisen.

Caretasks sowie Zusatzinformationen können bearbeitet und angepasst werden, z. B. die Gültigkeit, das Wiederauftreten und die ICD-Referenz eines Caretasks.

Im Medizinprodukt hat der Benutzer auch die Möglichkeit, einzelne, individuelle Schwellenwerte hinzuzufügen.

HINWEIS: In Fällen, in denen Patienten möglicherweise nicht in der Lage sind, auf Caretasks zu reagieren, haben HCPs die Möglichkeit, in ihrem Namen zu antworten, indem sie die Schaltfläche "Stellvertretend antworten**" verwenden. Dieses Feature ist vom Patientenübersichtsbereich aus zugänglich, speziell über die Caretask-Registerkarte. Es ist wichtig, diese Funktionalität mit Bedacht auszuüben.**

Auf der Registerkarte ‚Caretask‘ und der Registerkarte ‚Review Caretask‘ des Care Manager werden alle verfügbaren Caretasks, die mindestens eine Frage enthalten, aufgelistet. Diese können den Patienten zugewiesen, gesucht und sortiert werden. Es werden nur Elemente angezeigt, auf die der Benutzer und/oder der Standort Zugriff hat bzw. die er sehen darf.



Hinzufügen oder Bearbeiten einer Caretask-Vorlage



Mit einem Klick auf den Button "**Caretask erstellen**" wird die medizinische Fachkraft auf eine Konfigurationsseite weitergeleitet. Auf dieser Seite kann die medizinische Fachkraft einen Caretask-Namen hinzufügen (oben in der Mitte der Seite) und die Caretask-Einstellungen anpassen.

1. Fügen Sie den Namen der zu erstellenden Caretask hinzu.

2. Auswahl des Caretask-Typs: für Patienten oder HCPs.

Care Manager ▶ Caretask erstellen Speichern & Beenden Schließen

Caretask Name hinzufügen 0/50

Caretask-Einstellungen Komponenten

Legen Sie fest, wer diese Caretask ausführen kann

☐ Patienten (standard)

☐ Mediziner

☐ Doctor	☐ Nurse	☐ Content Manager
☐ ONCARE	☐ External HCP	☐ Neurologist
☐ Nephrologe	☐ Ophthalmologist	☐ ZTA
☐ Radiologist for Cardio CT	☐ Zahnarzt	☐ Implantologie Expert
☐ Zahnarzt GP	☐ Zahnlabor Produktion	☐ MKG Chirurg
☐ TMZler	☐ Neurologist external	☐ Orthopedic Doctor Internal
☐ Author	☐ Demographic_Admin	☐ Demographic_Doctor

❖ **Review Caretask:** Dieses Feld wird nur sichtbar, wenn ‚Mediziner‘ ausgewählt ist, um die Caretasks im myoncare Careplan Manager durchzuführen. Wenn Sie dieses Feld auswählen, wird die Caretask in eine spezielle Kategorie umgewandelt, die für den Arzt in einer neuen Registerkarte innerhalb des Care Managers mit dem Namen „Review Caretask“ zugänglich ist. Diese spezifischen Caretasks können den Patienten weder manuell zugewiesen noch während der Erstellung eines Care Pathways ausgewählt werden. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, diesen Caretask zu scannen. Ihr einziger Zweck besteht darin, die Überprüfung von Berichten zu erleichtern.

Care Manager ▶ Caretask erstellen Speichern & Beenden Schließen

Caretask Name hinzufügen 0/50

Caretask-Einstellungen Komponenten

Legen Sie fest, wer diese Caretask ausführen kann

☐ Patienten (standard)

☒ Mediziner

☐ Doctor	☐ Nurse	☐ Content Manager
☐ ONCARE	☐ External HCP	☐ Neurologist
☐ Nephrologe	☐ Ophthalmologist	☐ ZTA
☐ Radiologist for Cardio CT	☐ Zahnarzt	☐ Implantologie Expert
☐ Zahnarzt GP	☐ Zahnlabor Produktion	☐ MKG Chirurg
☐ TMZler	☐ Neurologist external	☐ Orthopedic Doctor Internal
☐ Author	☐ Demographic_Admin	☐ Demographic_Doctor
☐ Demographic_Nurse	☐ Demographic_External HCP	

☒ Review Caretask



❖ Vorlagenbeschreibung

- ❖ Erlauben Sie dem Patienten, Dateien nach der Durchführung der Caretask zu überprüfen: Bereitstellung der beigefügten Dokumente des Caretasks, um den Patienten dauerhaft zur Verfügung zu stehen
- ❖ ICD-10 Referenzen, OPS Codes
- ❖ Benutzerdefinierte Formel
- ❖ Kategorisieren via Gesundheitsindikator
- ❖ Erstellung eines Berichts über die Antworten für den Patienten
- ❖ Benutzerdefinierte Wiederholung:
 - ‚Phase‘: Versorgungsphase für welche die Vorlage erstellt wird.
 - ‚Startzeit‘: ab welchem Zeitpunkt die Aufgabe für Patienten zur Beantwortung zur Verfügung stehen soll. Die Zeiten richten sich nach der Zeitzone des Patienten.
 - ‚Turnus‘: ermöglicht es medizinischem Fachpersonal, eine detaillierte, benutzerdefinierte Wiederholung festzulegen. Verfügbare Optionen sind: "Täglich", "Wöchentlich", "Monatlich" und "Jährlich". Weitere Optionen zur Angabe der Wiederholung sind die Wochentage (nur wenn „Wöchentlich“ ausgewählt ist).
 - ‚Anzahl der Ausführungen‘: definiert die Anzahl der Wiederholungen nach denen die Ausführungen enden sollen.
 - ‚Gültigkeit‘: legt den Zeitraum fest, in dem der Caretask verfügbar ist und beantwortet werden kann.

0/50

Caretask-Einstellungen

Komponenten

☒ Benutzerdefinierte Wiederholung ⓘ

Phase

Planung ▾

Startzeit

09 : 00

Turnus

Täglich ▾

Jeden/Jedes

1 ▾

Tag(e)

Anzahl der Ausführungen

1

+
-

Gültigkeit

1

+
-

Tag(e) ▾



Kategorisierung über Gesundheitsindikator

Löst aus, dass die zugehörigen Komponentenbewertungen in die Berechnung des Gesundheitsindikators einbezogen werden, wenn ein Patient oder eine medizinische Fachkraft den Caretask beantwortet und wenn der Caretask wiederholt wird. Um dem schlussendlich erreichten Wert eine Wertigkeit zuzusprechen, können die Bereiche definiert werden, welche einem „Guten“, „Mäßigen“ und „Schlechten“ Gesundheitsstatus entsprechen. Hierbei kann frei festgelegt werden, ob ein hoher oder niedriger Wert einem „Guten“ oder „Schlechten“ Ergebnis entspricht. Um dem Patienten in der PatientApp die Bewertungswerte anzuzeigen, aktivieren Sie die Option „Gesamtscore mit Patient teilen“,

Die ‚Kategorisierung via Gesundheitsindikator‘ ist standardmäßig deaktiviert. Dies bedeutet, dass zugewiesene Punktzahlen für Komponenten nicht automatisch berechnet werden, es sei denn, diese Option ist in den Caretask-Einstellungen aktiviert. Wenn es deaktiviert bleibt, werden die Caretasks von der Berechnung ausgeschlossen und zeigen keine Punktzahl an, so dass den Patienten kein Gesundheitsindikator zugewiesen wird.

Wenn die ‚Kategorisierung via Gesundheitsindikator‘ aktiviert ist, können Komponenten über "Komponente hinzufügen" den drei Score-Kategorien zugeordnet werden. In Abhängigkeit zur Antwort auf den Caretask werden die zusätzlichen Komponenten dem Patienten angezeigt. Um weitere Komponenten hinzuzufügen, muss das medizinische Fachpersonal auf "Komponente hinzufügen" klicken, wodurch ein Dropdown-Menü mit 12 voreingestellten Komponenten ausgelöst wird. Jede Komponente kann eine Frage oder eine aufgabenähnliche Beschreibung enthalten. Falls die Option ‚Kategorisierung via Gesundheitsindikator‘ nicht aktiviert ist, wird der Gesundheitsindikator ebenfalls nicht angezeigt.

Hinweis: Bei Caretasks, die von medizinischem Fachpersonal beantwortet werden sollen, kann das medizinische Fachpersonal keine zusätzlichen Komponenten zu den Kategorien „Gut“, „Mäßig“ oder „Schlecht“ definieren. Diese Funktionalität ist nur für Caretasks für Patienten vorbehalten. Dementsprechend werden alle vorhandenen zusätzlichen Komponenten eliminiert, wenn die Rolle von Patient auf Mediziner geändert wird.




Verknüpfte Caretasks

Medizinisches Fachpersonal kann Verbindungen zwischen jedem Caretask und jeder Gesundheitsindikatorekategorie herstellen, die dem übergeordneten Caretask zugewiesen ist. Wenn der verknüpfte Caretask auch über die Funktion ‚Kategorisierung über Gesundheitsindikator‘ verfügt, kann das medizinische Fachpersonal eine weitere Ebene von verknüpften Caretasks hinzufügen. Diese mehrstufige Verknüpfung kann bis zu drei Ebenen reichen.

Verknüpfte Caretasks oder Bewertungen haben eine konfigurierbare Gültigkeit und wiederholen sich nicht.

Gesundheitsfachkräfte können einen Caretask mit Verknüpfungen nicht direkt bearbeiten. Um den Caretask zu bearbeiten, müssen stattdessen alle Verknüpfungen innerhalb des Care Pathways zuerst entfernt werden.

Neben der Karte der verknüpften Caretasks befindet sich ein Löschen-Symbol. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird der ausgewählte verknüpfte Caretask gelöscht.

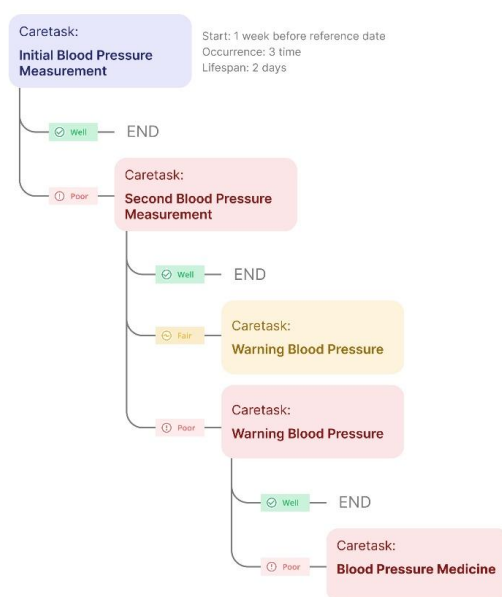

Die übergeordneten Caretasks haben die Funktion 'Kategorisierung via Gesundheitsindikator' aktiviert. Wenn ein Patient nach Beantwortung dieses Caretasks in die Kategorie 'Schlecht' fällt, löst dies den zweiten Caretask ‚Zweite Blutdruckmessung‘ aus. Ähnlich dazu hat auch der zweite Caretask ‚Zweite Blutdruckmessung‘ die Funktion 'Kategorisierung über Gesundheitsindikator' aktiviert. Nachdem der Patient diesen Caretask beantwortet hat, wird ihm bei Zuordnung zu den Kategorien 'Gut' oder 'Schlecht' die Aufgabe 'Warnung Blutdruck' zugewiesen. Wenn der Patient nach Beantwortung des Caretasks 'Warnung Blutdruck' in die Kategorie 'Schlecht' fällt, erhält er den Caretask 'Blutdruckmedikation'.



Zuweisung von Caretasks

myoncare Careplan Manager ermöglicht es den Nutzern, Caretasks auf drei Arten zuzuweisen:

- Zuweisung innerhalb der Patientenübersicht eines bestimmten Patienten
- Zuweisung über den Care Manager an ausgewählte Patienten
- Zuweisung über einen QR-Code oder Deeplink

Zuweisung innerhalb der Patientenübersicht eines bestimmten Patienten

 Im Workflow auf der Patientenübersichtsseite muss das medizinische Fachpersonal **"Caretask zuweisen"** im Aktionsmenü auswählen (erscheint nach dem Klicken auf die **"+"-Schaltfläche**), das sie zum **"Zuweisungsmodul"** weiterleitet, in dem die vier Schritte aufgeführt sind, die erforderlich sind, um einem Patienten einen Caretask zuzuweisen.

1. Caretask auswählen:

Wählen Sie einen Caretask, der an den Patienten gesendet werden soll. *Hinweis:* Die Suchfunktion sucht nur nach einer Übereinstimmung im Namen.

Caretask zuweisen an Basma Reset

1

Caretask auswählen

2

Caretask-Einstellungen

3

Komponenten Konfigurationen

4

Zuweisen / Versenden

blood pressure14/150

Titel

Durchgeführt von

ICD-10

Interner Name

Blood pressure

Doctor

Blood Pressure positive care task

Patienten

Blood Pressure positive care task (1)

Patienten

Caretask with BMI and Blood Pressure Components

Doctor

< Zurück

1

Nächste >

10

Einträge pro Seite

Anzeigen 1 - 4 von 4 Einträge anzeigen

Bitte wählen Sie eine Caretask

Weiter

© 2025-03 ONCARE GmbH – myoncare v.1.12

 myon.academy



2. Einstellungen:

Im zweiten Schritt müssen Sie ein Startdatum festlegen.

Planen Sie die Aktivierung des Caretasks, indem Sie das Startdatum, die Wiederholungen und die Gültigkeit definieren. Innerhalb der medizinischen Variante hat das medizinische Fachpersonal auch die Möglichkeit, individuelle Schwellenwerte festzulegen (oder alle voreingestellten Schwellenwerte aus der Vorlage zu entfernen).

Caretask zuweisen an Basma Reset

1 Caretask auswählen 2 Caretask-Einstellungen 3 Komponenten Konfigurationen 4 Zuweisen / Versenden

* Titel
Blood Pressure positive care task 33/50

Startet ab
08.05.2025 09 : 00

Phase
Planung

Turnus
Täglich Jeden/Jedes 1 Tag(e)

ICD Code
ICD-Codes oder Krankheit hinzufügen 0/4

Anzahl der Ausführungen
☒ 1 ☐ 08.05.2025

Zurück Weiter

3. Komponenten-Konfigurationen:

Stellen Sie in diesem Schritt sicher, dass alle Punkte, Schwellenwerte und Sprünge überprüft wurden.

Zudem darf zu keiner Zeit eine Wertung als alleinige Grundlage für eine Intervention, relevanten medizinischen Behandlung oder Priorisierung einzelner Patienten führen. Innerhalb der medizinischen Variante wird auch das medizinische Fachpersonal aufgefordert, die festgelegten Schwellenwerte zu überprüfen. Darüber hinaus dürfen auch die Schwellenwerte nicht als alleinige Grundlage für eine Intervention, eine entsprechende medizinische Maßnahme oder eine Priorisierung einzelner Patienten verwendet werden.

Caretask zuweisen an Basma Reset

1 Caretask auswählen 2 Caretask-Einstellungen 3 Komponenten Konfigurationen 4 Zuweisen / Versenden

Benachrichtigung

☒ Standard/Schwellenwerte verwenden

☐ Einzelne Schwellenwerte hinzufügen

1 Optimal 0-0
Optimal: < 120 / < 80
Normal: 120 - 129 / 80 - 84
Hochnormal: 130 - 139 / 85 - 89
Hypertonie Grad 1: 140 - 159 / 90 - 99
Hypertonie Grad 2: 160 - 179 / 100 - 109
Hypertonie Grad 3: ≥ 180 / ≥ 110

Den Inhalt ausblenden

Bitte nach unten Scrollen. Zurück Weiter

Caretask zuweisen an Basma Reset

1 Caretask auswählen 2 Caretask-Einstellungen 3 Komponenten Konfigurationen 4 Zuweisen / Versenden

Benachrichtigung

☒ Standard/Schwellenwerte verwenden

☐ Einzelne Schwellenwerte hinzufügen

☒ Ich bin mir bewusst, dass Schwellenwerte und Wertungen nicht als alleinige Grundlage für medizinische Interventionen, weitere medizinisch relevante Maßnahmen oder die Priorisierung von Patienten verwendet werden dürfen.

☒ Ich bestätige, dass alle Schwellenwerte, Wertungen und Sprünge validiert wurden und dem Zweck dieses Caretasks/Care Pathways angemessen Rechnung tragen.

Bitte nach unten Scrollen. Zurück Weiter



4. Zuweisen / Versenden:

Im letzten Schritt kann die medizinische Fachkraft die geplante Zuweisung überprüfen.

Caretask zuweisen an Basma Reset

1 Caretask auswählen 2 Caretask-Einstellungen 3 Komponenten Konfigurationen 4 Zuweisen / Versenden

Zugewiesen an
Basma Reset

Titel
Blood Pressure positive care task

Anzahl der Fragen
25

Phase
Planung

Startet ab
08 Mai 2025 09:00

Dauer
Jeden/Jedes 1 Tag für 1 mal

Zurück Speichern Sofort versenden

Zuweisen aus dem Care Manager-Modul zu bestimmten Patienten

Das Zuweisen von Caretasks aus dem myoncare Caretask-Modul ist die effizienteste Methode, um einen Caretask mehreren Patienten gleichzeitig zuzuweisen.

Nachdem Sie auf das Symbol "Zuweisen" auf der rechten Seite der Vorlagen Übersicht geklickt haben, wird ein "Zuweisungsmodul" angezeigt. Der HCP muss nun die Patienten auswählen, an die der Caretask zugesendet und entsprechend des oben beschriebenen Ablaufs zugewiesen werden soll.

Hinweis: Die Einstellungen können noch während des Zuweisungs-Ablaufes geändert werden. Nur der zuvor ausgewählte Caretasks, d. h. der Caretasks, der in der Zeile angezeigt wird und mit "Zuweisen" ausgewählt wurde, kann zugewiesen werden.

Caretasks können nur denjenigen Patienten zugeordnet werden, zu deren Careteam der aktuelle Nutzer gehört. Nur diese Patienten werden durch einen Filter angezeigt.

Um einen Caretask effektiv einer bestimmten Patientengruppe zuzuweisen, kann der HCP die Filterfunktion im ersten Zuweisungsschritt innerhalb des Care Managers verwenden. Auf diese Weise kann ein Caretask einer vorsortierten Patientengruppe in ihrer Gesamtheit zugewiesen werden.

Care Pathways Caretask Review Caretask

1/150

Titel	Interner Name	Durchgeführt von	ICD Code
Blood pressure		Doctor	
Blood Pressure positive care task		Patienten	
Blood Pressure positive care task (1)		Patienten	
Caretask with BMI and Blood Pressure Components		Doctor	

< Zurück 1 Nächste >

10 Einträge pro Seite Anzeigen 1 - 4 von 4 Einträge anzeigen



Zuweisung eines Caretasks per QR-Code oder Deeplink

Durch Klicken auf das QR-Code-Symbol innerhalb des Care Managers beim jeweiligen Caretask wird ein Modul auf der rechten Seite der myoncare Careplan Manager für medizinische Fachkräfte geöffnet. Dieses Modul zeigt einen QR-Code, einen Deeplink, eine Schaltfläche zum Exportieren des QR-Codes sowie eine Möglichkeit, den QR-Code zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Um Caretasks über den QR-Code oder den Deeplink zuzuweisen, muss der QR-Code über den Schieberegler „QR-Code aktivieren“ aktiviert werden. Dies ist nicht möglich für Care Pathways mit Aufgaben in der Vergangenheit sowie für Caretasks, die von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden sollten.

Wenn der Patient den angezeigten QR-Code scannt oder den Deeplink öffnet, wird der Caretask zugewiesen und an den Patienten ausgespielt.

In dem Moment, wenn der Patient einen QR-Code scannt oder den Deeplink öffnet, wird der Zeitpunkt des Scannens als Referenzdatum und -uhrzeit festgelegt. Alle Caretasks, die im Care Pathway enthalten sind, werden auf der Basis dieses Datums und dieser Uhrzeit geplant. Wenn ein QR-Code eines Caretasks gescannt wird, wird eine einzige Ausführung dieses Caretasks an den Patienten gesendet.

Der QR-Code kann als PNG oder JPG exportiert werden, um individuelle Einladungs- oder Registrierungsbriefe zu erstellen.

Alle Patienten, die den QR-Code scannen und nicht bei dem Standort der Gesundheitsdienstleister angemeldet sind, starten durch das Scannen automatisch den Verbindungsprozess. Damit wird die Selbstregistrierung ausgelöst.

The screenshot displays the myoncare Care Manager interface. On the left, a sidebar contains navigation options: Patientenverwaltung, Care Manager (highlighted), Termine, Dateien, and Verwaltung. The main area shows a table of Caretasks under the 'Care Pathways' tab. The table has columns for Titel, Interner Name, Durchgeführt von, and ICD Code. The first row is '-ver value test' with internal name 'n%55%&...'. A blue arrow points to the QR code icon in the actions column of this row. On the right, a detailed view for the selected task shows the 'ONCARE QR-Code' section with a large QR code and a text box explaining that scanning the QR code assigns the Caretask to the patient. Below the QR code is a text input field with the URL 'https://pwa-stage.myoncare.c' and an 'Exportieren' button. At the bottom right of this panel is a toggle switch for 'QR-Code aktivieren' which is currently turned on.

Titel	Interner Name	Durchgeführt von	ICD Code
-ver value test	n%55%&... p%55%&...	Patienten	
**Allgemeine Informationen	GOPOM	Patienten	
**Allgemeine Informationen (1)	GOPOM	Patienten	
**Allgemeine Informationen (2)	GOPOM	Patienten	
**Allgemeine Informationen (3)	GOPOM	Patienten	
**Allgemeine Informationen (4)	GOPOM	Patienten	
**Allgemeine Informationen (5)	GOPOM	Patienten	

ONCARE QR-Code

Durch das Scannen des QR-Codes wird die Caretask dem Patienten zugewiesen. Neue Patienten verbinden sich dadurch auch mit Ihrem Standort.

<https://pwa-stage.myoncare.c>

Exportieren

QR-Code aktivieren



KI-gestützter Care Pathway und Caretask-Empfehlung "myon.ai"

Mit myon.ai können Sie die Erstellung von Care Pathways und Caretasks mithilfe von KI-gesteuerter Unterstützung optimieren. Durch die Analyse wichtiger Eingaben – wie z. B. des Kontexts, der klinischen Stadien (z. B. Planung, Behandlung, Nachsorge) und Rahmenbedingungen wie PROMs (ICHOM), ICD-Codes oder bestimmter Krankheiten generiert myon.ai automatisch strukturierte und detaillierte Empfehlungen für Caretasks, wodurch ein manueller Aufbau bei gleichzeitiger Beibehaltung der Genauigkeit und Konsistenz entfällt.

Jeder Care Pathway besteht aus mehreren, miteinander verbundenen Caretasks, die eine Eltern-Kind-Struktur bilden, in der die Caretasks mit dem übergeordneten Behandlungsplan verknüpft sind. myon.ai vereinfacht diesen Prozess, indem es Caretasks mit wesentlichen Elementen wie Punktzahlen, Sprüngen, Übergängen und Schwellenwerten vor-designed, was schnelle Anpassungen und Verfeinerungen ermöglicht.

Sie behalten die volle Kontrolle und haben die Möglichkeit, Caretasks zu überprüfen, zu verfeinern und zu validieren, um sicherzustellen, dass sie sowohl den medizinischen als auch den organisatorischen Standards entsprechen. Vor dem Abschluss weist ein Bestätigungsschritt nochmals auf Ihre Verantwortung hin: Beim Speichern eines Caretasks wird ein Popup-Fenster mit der Meldung angezeigt: "Ich bestätige, dass ich den gesamten Inhalt des Caretasks überprüft habe und er korrekt, vollständig und für den Patientengebrauch geeignet ist." Um fortzufahren, müssen Sie das Kontrollkästchen für die Zustimmung aktivieren und sicherstellen, dass jedes Element vor der Implementierung die erforderlichen wissenschaftlichen Standards erfüllt.

Durch die Integration von myon.ai in Ihren Workflow können Sie die Effizienz steigern, die Konsistenz wahren und das Pflegemanagement effektiv skalieren.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die medizinische Fachkraft (HCP) dafür verantwortlich ist, die Richtigkeit der von "myon.ai" generierten Inhalte zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie mit den klinischen Richtlinien und den Standards für die Patientensicherheit übereinstimmen.



Warnungen



- myoncare erhebt weder den Anspruch noch die Absicht, die Erfahrung und das Fachwissen einer medizinischen Fachkraft zu ersetzen, unabhängig vom Anwendungsszenario. Es bietet dem Benutzer lediglich eine zusätzliche Unterstützung bei der Überwachung des Gesundheitszustandes von Patienten. Alle Inhalte, die innerhalb von myoncare angezeigt und erstellt werden, setzen voraus, dass der Nutzer eine Plausibilitätsprüfung durchführt, bevor er weitere Maßnahmen und Behandlungen einleitet oder die Ergebnisse der medizinischen sowie der nicht-medizinischen Geräte beurteilt.
- Verwenden Sie den Gesundheitsindikator NIEMALS als alleiniges Entscheidungskriterium für Diagnose und/oder Therapie. Dies wird auch durch die folgende Warnung im System angezeigt: „Ich bin mir bewusst, dass Schwellenwerte und Wertungen nicht als alleinige Grundlage für medizinische Interventionen, weitere medizinisch relevante Maßnahmen oder die Priorisierung von Patienten verwendet werden dürfen.“
- Vor der Zuweisung von Care Pathways oder Caretasks sollten alle Wertungen, Schwellenwerte und Jumps auf Richtigkeit überprüft werden. Darüber hinaus darf eine Wertung oder Schwellenwert zu keinem Zeitpunkt die alleinige Grundlage für eine Intervention, eine medizinisch relevante Maßnahme oder die Priorisierung einzelner Patienten bilden. Dies wird in der folgenden Warnung beschrieben: "Ich bin mir bewusst, dass Schwellenwerte und Punktzahlen nicht als alleinige Grundlage für medizinische Eingriffe, weitere medizinisch relevante Maßnahmen oder die Priorisierung von Patienten verwendet werden dürfen". "Ich bestätige, dass alle Schwellenwerte, Wertungen und Sprünge validiert wurden und dem Zweck dieses/r Caretask/Care Pathways angemessen Rechnung tragen."
- Sobald der medizinische Fachkraft eine weitere Komponente mit Bewertung hinzufügt oder die bestehende Bewertung einer Komponente in einem vorhandenen Caretask anpasst, muss das gesamte Bewertungsschema des Caretasks überprüft und angepasst werden.
- Es muss sichergestellt werden, dass nur Patienten ausgewählt werden, die diesen Care Pathway oder Caretask gemäß der Absicht des medizinischen Fachpersonals erhalten sollen.
- Es muss darauf geachtet werden, dass der Referenztyp korrekt ausgewählt ist, da alle Caretasks des Care Pathway in fester Beziehung zum Referenztyp definiert sind. Andernfalls werden die Caretasks zu einem anderen Zeitpunkt an die Patienten gesendet.



Warnungen



- Wenn ein Start- oder Enddatum definiert ist, definiert die Beschreibung von „vor“ und „nach“ das Datum in Bezug auf den Referenztyp (z. B. 9:00 Uhr, 3 Tage vor der Operation).
- Falls ein Termin neu geplant wird (aber bereits mit Care Pathways verbunden ist), zeigt das Umplanungsschema auch potenzielle Konflikte mit einem roten Umriss an (z. B. ein Caretask ist in der Vergangenheit). Stellen Sie sicher, dass alle Care Pathways und die damit verbundenen Caretasks noch korrekt sind, oder passen Sie diese entsprechend an (Hinweis: manuelle Anpassung notwendig). Folgende Warnung wird angezeigt: "Markierte Caretasks haben ein Startdatum in der Vergangenheit und werden daher nicht an den Patienten versendet. Um sie an den Patienten zu senden, gehen Sie zu dem betreffenden Patienten und ändern Sie dort das Startdatum der Caretask". Um einen Konflikt innerhalb eines Caretasks anzupassen (z. B. ist ein Caretask in der Vergangenheit), schließen Sie den Workflow der Terminanpassung ab und gehen Sie zu der Übersicht des bestimmten Patienten, für den der Termin neu geplant wurde. Gehen Sie zum spezifischen Caretask und wählen Sie „Zuweisung bearbeiten“ und passen Sie das Startdatum entsprechend an.
- Falls bereits ein Termin und ein Care Pathway verbunden waren (über Referenztyp und ICD-Code), ist es nicht möglich, denselben Care Pathway ein zweites Mal zu verbinden. Die folgende Meldung wird angezeigt: "Der Care Pathway '<name of care pathway>' ist bereits aktiv für diesen Patienten. Sie können einen Care Pathway nicht mehrere Male zuweisen."
- Beim Scannen eines QR-Codes eines Caretasks oder eines Care Pathway wird die neueste Aktualisierung des Inhalts zugewiesen und an den Patienten gesendet.
- Aus Gründen der Datensicherheit und des Datenschutzes wird den Anwendern empfohlen, das von ONCARE voreingestellte Initialkennwort unmittelbar nach der ersten Anmeldung zu ändern.
- Wenn die Filtereinstellung so gewählt ist, dass nicht alle Patienten sichtbar sind, wird die folgende Warnung angezeigt: „Filter angewandt!“.



Warnungen



- Anwendern und medizinischem Fachpersonal wird hiermit empfohlen, sich nicht allein auf Schwellenwertbenachrichtigungen für die Diagnose/Intervention oder eine spätere Anpassung der Therapie eines Patienten zu verlassen.
- Alle Schwellenwerte und Wertungen müssen aus den Vorlagen entfernt werden, falls ein oder mehrere Patienten nicht 18 Jahre alt sind.
- Caretasks und Vorlagen, welche Wertungen oder Schwellenwerte enthalten, können Patienten unter 18 Jahren nicht zugewiesen werden. Dies wird durch eine Warnung am unteren Ende der Patientenauswahl angegeben sowie dadurch, dass der „Weiter“-Button deaktiviert ist.
- Falls Anwender Gesundheitsdaten von öffentlich zugänglichen Registrierungsverfahren einholen wollen, z.B. indem sie die Registrierungs-QR-Codes oder Deep-Links auf einer Website in anonymer Form öffentlich zugänglich machen, muss der entsprechende Anwender dafür Sorge tragen, dass die rechtlichen Grundlagen zur Datenverarbeitung ausreichend geschaffen sind. Alternativ müssen die Daten zu jedem Zeitpunkt anonym bleiben. ONCARE übernimmt in derartigen – und ähnlichen – Fällen keinerlei Haftung.
- Die angezeigten Aktivitätsdaten können ungenau oder unvollständig sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Entscheidungsfindung.
- Verwenden sie die Videoanruffunktion von myoncare NICHT für einen NOTRUF oder zur Diagnose. Die Anrufqualität hängt von der Netzwerkverfügbarkeit und Kameraqualität ab und kann daher nicht ausreichen, um den Gesundheitszustand eines Patienten zu diagnostizieren oder zu beurteilen.
- Der Care Pathway kann Caretasks enthalten, die vor dem Referenzdatum geplant sind. In diesem Fall erscheint ein Popup, um den Benutzer darauf hinzuweisen, die Planung des Caretasks sowie das gewählte Referenzdatum zu überprüfen.
- Wenn der Benutzer einen Care Pathway auf der Grundlage eines bestehenden Termins des Patienten zuweisen möchte, muss er sicherstellen, dass der Termin des Patienten mit dem entsprechenden Referenztyp und ICD-Code gekennzeichnet ist. Ist dies noch nicht geschehen, wird im Zuordnungsprozess eine Warnung angezeigt, dass der Patient noch keinen genauen Termin hat. Daher kann die medizinische Fachkraft den Termin dem Patienten nicht zuweisen.



Warnungen



- Durch die Veröffentlichung von QR-Codes oder Deep-Links auf einer Website, auf Flyern oder als Aushang in Kliniken in anonymisierter Form müssen Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal proaktiv sicherstellen, dass der Caretask oder der Care Pathway nur zur allgemeinen Unterstützung gedacht ist, aber keine für einen einzelnen Patienten individualisierten Inhalte enthält. Die Caretasks sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung gedacht und sollten nicht alleinstehend als medizinischen oder persönlichen Rat angesehen werden. Seien Sie sich bewusst, dass die Caretasks von Einzelpersonen aus der Öffentlichkeit beantwortet werden können und dass dadurch keine Arzt-Patienten-Beziehung entsteht. Alle medizinischen Informationen sollten nur als allgemeine Informationen zur Verfügung gestellt werden. Unter Öffentlichkeit ist jeder zu verstehen, nicht die Mitglieder einer bestimmten Gruppe, und Öffentlichkeit bedeutet nicht, dass ein bestimmtes Arzt-Patienten-Verhältnis besteht. ONCARE übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für möglicherweise auftretende Unterlassungen, Fehler oder für jeglichen Missbrauch der öffentlich zugänglich gemachten QR-Codes. ONCARE kann die Verfügbarkeit des Dienstes zu keinem bestimmten Zeitpunkt garantieren. Da die Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt, werden Sie aufgefordert, alle möglichen Mittel und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um die oben genannten Faktoren zu vermeiden. ONCARE übernimmt keine Garantie für die Sicherheit oder Wirksamkeit und haftet nicht für Verluste oder Schäden, sich aus der oben genannten Nutzung ergeben können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche Verluste, Verletzungen, Krankheiten oder Tod.



We make healthcare scalable.

www.myon.academy | www.myoncare.com

Bei Fragen: service@myoncare.com